



GRIPO STØTTESTANG

- LÆNGST MULIGT I EGET HJEM

EN AKTIV OG TRYK
FORFLYTNING

Et system - mange muligheder

GRIPO en god støtte i hverdagen

GRIPO er et solidt og fleksibelt hjælpemiddel, som giver tryghed for brugeren, når denne vil rejse sig op eller foretage en forflytning i eget hjem. Gripo passer til alle rum og er meget nem at montere. Gripo støttestang fungerer udemærket alene, men kan også suppleres med forskelligt gavnligt tilbehør.

- Støtte, når du trænger til det
- Udnytter brugerens egne ressourcer
- Nem at montere, demontere og flytte
- Monteres uden skruer, søm eller brug af værktøj
- Stort udvalg af brugbart og fleksibelt tilbehør
- Utallige anvendelseområder



Gripo Standard
Varenr.: 35-01004
HMI no.: 133727



Bøjle, triangel

Mosgummi og universalbeslag 40/22 mm

Varenummer 35-01026



To-håndsgreb

Med mosgummi og universalbeslag 40/22 mm

Varenummer 35-01039



- Gør det lettere at rejse sig op fra seng/stol
- Gør det lettere at foretage forflytning til/fra kørestol
- Ved brug af 2-3 stk. monteret i forskellige højder, kan de anvendes til at træne stand-funktion ved hjælp af «klatre» effekt

Vertikalt minigreb

Rørdiameter 22 mm med 2 universalbeslag 40/22 mm

Varenummer 35-01038





Gallegreb

Med 2 universalbeslag 40/22 mm.
Håndtag i strop med mosgummi
Varenummer 35-01028



Gelænder rør

Diameter 40 mm. 75 cm lang.
Universalbeslag bestilles separat
Varenummer 35-01030

Diameter 22 mm. 75 cm lang.
Univesalbeslag bestilles separat
Varenummer 35-01029



Monteres mellem 2 Gripo stænger i lav position

- Giver støtte og hjælp til bruger ved af- og påklædningsituationer
- Giver bruger med funktionsnedsættelse muligheden for selv at klare af- og påklædningsituationer



Fordelen ved Gallegreb/Gripo


- Giver brugeren støtte, når denne trænger til det
- Giver en følelse af at kunne præstere
- Aflaster plejen/hjælperen samt mindsker risikoen for belastningsskader
- Aktiverer brugeren, hvilket er vigtigt for blodcirkulationen og mave/tarmfunktionen
- Støtte ved forflytning og stillingsændring i seng
- Omkostningsbesparende i og med at brugeren og de pårørende selv kan klare mere uden assistance fra plejepersonale

Gelænder rør dia. 22 mm

75 cm lang. Med mosgummi.
Universalbeslag bestilles separat
Varenummer 35-01031



- Kan monteres skråt f.eks. som gelænder ved en mindre trappe eller ved niveau forskel
- Monteres på badeværelset ved vask eller ved toilettet mellem 2 Gripo støttstænger

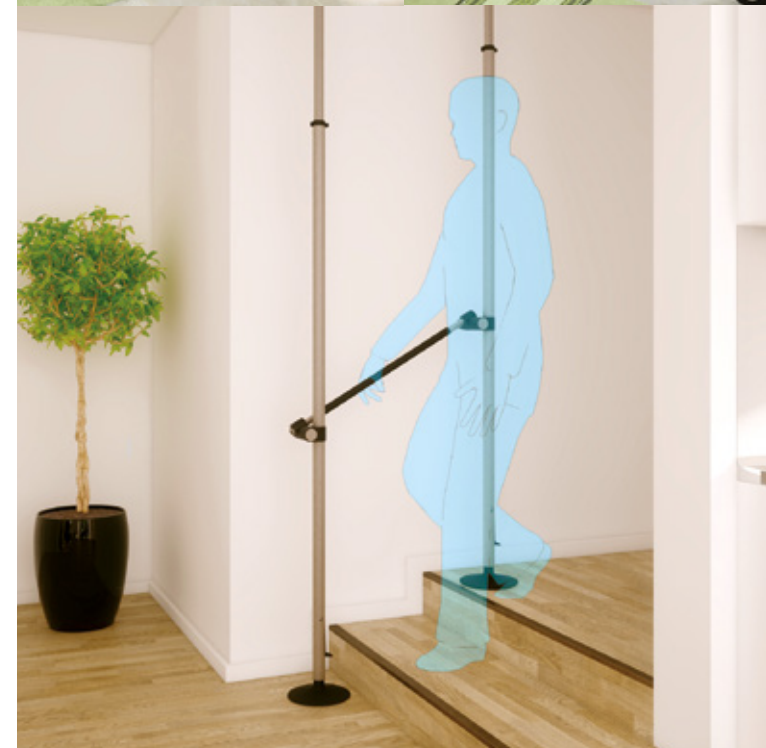

Gallegreb rør som sidestøtte

Uden strop og krog. Med 2 universalbeslag 40/22 mm
Varenummer 35-01058



- Ingen løse dele
- Støtte til at rejse sig op og forflytning på f.eks. toilettet


Gelænder rør diameter 40 mm

160 cm lang. Universalbeslag bestilles separat
Varenummer 35-01032



Monteres som gangbare mellem 2 Gripo stænger

- Til rum med højt dørtrin, hvor bruger ikke kan komme ind med f.eks. kørestol
- Gangbare f.eks. mellem seng og toilet, i gangen eller lignende hjælp til at brugeren kan klare sig selv
- Kan monteres efter hinanden, som en lang gangbarre ved hjælp af flere Gripo stænger

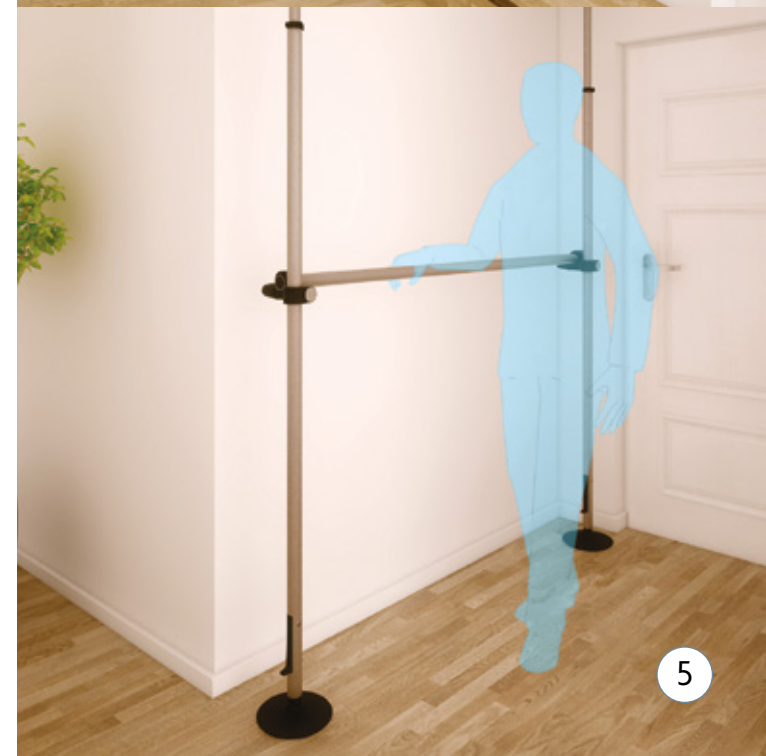



Kombinationsgreb
Med 2 universalbeslag 40/22 mm
Varenummer 35-01064



- Godt to-håndsgreb for brugere med store hænder
- Meget stabilt (vrider ikke)
- Kan bruges som greb i 2 højder («klatre» greb)
- Bruger kan læne sig op af grebet ved af- og påklædningssituationer



Sæde opklappeligt
Med universalbeslag 40/22 mm
Bredde 35 cm, dybde 40 cm
Varenummer 35-01034



(Maks brugervægt 110 kg)



Armlæn, sidestøtter
Bredde mellem armlæn 56 cm
Varenummer 35-01068



Tekniske specifikationer

Gripo	
Krav til lofthøjde	Min. 210 cm - Maks. 320 cm
Krav til loftkonstruktion	Skal tåle punktbelastning på 100 kg
Maks. belastning	100 kg horisontalt midt på stangen
Brugervægt	Maks. 210 kg
Materiale	Aluminium og plast
Produktets egenvægt	4,7 kg, uden tilbehør

Varenummer oversigt

Gripo Støttestang

Varenummer	Beskrivelse	Specifikationer
35-01001	Gripo Lang	Lofthøjde 260 cm - 320 cm
35-01003	Gripo Speciel	Lofthøjde lavere end 210 cm
35-01004	Gripo Standard	Lofthøjde 210 - 300 cm



Varenummer oversigt

Cirkelbøjle Dia. 30 og 40

Varenummer	Beskrivelse	Specifikationer
35-01071	Med mosgummi og dobbeltbeslag - D30	Diameter 40/22 mm
35-01072	Med mosgummi og dobbeltbeslag - D40	Diameter 40/22 mm

Multigreb med 360° rotation

Varenummer	Beskrivelse	Specifikationer
35-01070	Mulighed for 360° rotation For hver 30° (12 positioner) låses grebet	Diameter 40/22 mm

Bøjle, triangel

Varenummer	Beskrivelse	Specifikationer
35-01026	Med mosgummi Med universalbeslag 40/22 mm	Rørdiameter 22 mm

Kombinationsgreb

Varenummer	Beskrivelse	Specifikationer
35-01064	Komplet med 2 universalbeslag 40/22 mm	Højde 24 cm, længde 30 cm Rørdiameter 22 mm

To-håndsgreb

Varenummer	Beskrivelse	Specifikationer
35-01039	Med mosgummi, med universalbeslag 40/22 mm	Greb bredde 48 cm Rørdiameter 22 mm
35-01051	Med mosegummi. Uden universalbeslag	Bredde, gripeflade 48 cm Rørdiameter 22 mm

Gallegreb

Varenummer	Beskrivelse	Specifikationer
35-01028	Komplet med 2 universalbeslag 40/22 mm Håndtag i strop med mosgummi	Maks brugervægt 110 kg

Gallegreb rør for sidestøtte

Varenummer	Beskrivelse	Specifikationer
35-01058	Med glide stoppere og 2 universalbeslag 40/22 mm	Maks brugervægt 110 kg



Varenummer oversigt

Mini-greb, vertikalt

Varenummer	Beskrivelse	Specifikationer
35-01038	Med 2 universalbeslag 40/22 mm	Rørdiameter 22 mm

Gelænder rør

Varenummer	Beskrivelse	Spesifikasjoner
35-01029	Uden universalbeslag	75 cm langt, rørdiameter 22 mm
35-01031	Med mosgummi. Uden universalbeslag	75 cm langt, rørdiameter 22 mm
35-01030	Uden universalbeslag	75 cm langt, rørdiameter 40 mm
35-01032	Uden universalbeslag	160 cm langt, rørdiameter 40 mm

Sæde opklappeligt

Varenummer	Beskrivelse	Specifikationer
35-01034	Med universalbeslag 40/22 mm	Bredde 35 cm, Dybde 40 cm Maks. brugervægt 110 kg

Armlæn/sidestøtter til opklappeligt sæde

Varenummer	Beskrivelse	Specifikationer
35-01068	Med universalbeslag 40/40 mm	Bredde mellem armlæn 56 cm.

Top plade til skråt loft

Varenummer	Beskrivelse	Specifikationer
35-01053	For montering i skråt loft	Regulerbar

Top plade til svagt loft

Varenummer	Beskrivelse	Specifikationer
35-01033	Top plate stor	70 x 31 cm

Universalbeslag med fri rotation

Varenummer	Beskrivelse	Specifikationer
35-01024	Uden tandhjuls formet spændeskive	Diameter 40/22 mm

Gripe strømpe


Varenummer	Beskrivelse	Specifikationer
35-01067	For bedre greb. Fastgøres med lynlås	Længde 20 cm. For rørdiameter 40 mm



Gripo anvendes til øvelser med træningselastik


Siddende roning med elastik

Fastgør elastikken i brysthøjde og sid med ansigtet vendt mod fastgørelsespunktet. Tag fat i elastikken med begge hænder og træk elastikken ind mod brystet, samtidig med at du trækker skulderbladene sammen. Før elastikken langsomt tilbage og gentag øvelsen.

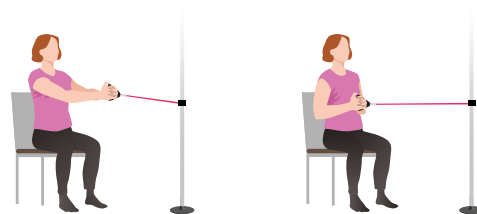


Siddende træning af ben

Fastgør elastikken over ankelhøjde og sid med ansigtet vendt mod fastgørelsespunktet. Der skal være god støtte i lænden, tag fat i stolens armlæn for støtte. Med elastikken fastgjort omkring hælen føres benet bagover og ind under stolen. Før elastikken langsomt tilbage til udgangspunktet og gentag øvelsen.

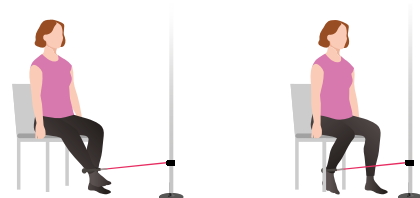


Øvelse med balance på 1 ben med elastik

Stå på et ben med hænderne i siden. Fastgør en elastik rundt om ankelen på det ben, du ikke står på. Bevæg det strakte benet skiftevis frem og tilbage i forhold til benet du står på.

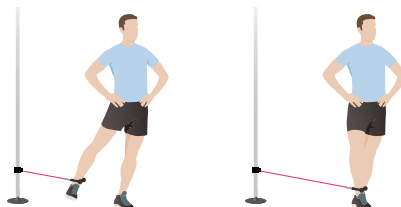


Stående benløft bagud med elastik

Fastgør elastikken nederst på Gripo stangen og rundt om ankelen. Stå med ansigtet mod Gripo stangen. Hoftelæddet er let bøjet på det aktive ben. Før benet bagover og stræk maksimalt i hoften. Byt ben.

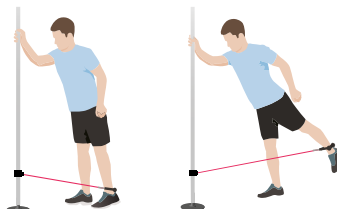


”Stenkast” med elastik

Fastgør elastikken højt oppe på Gripo stangen. Stå med et håndtag i hver hånd og med ansigtet mod stangen. Hold armene strakte ud fra kroppen og træk armene bagover. Slip langsomt bagefter.

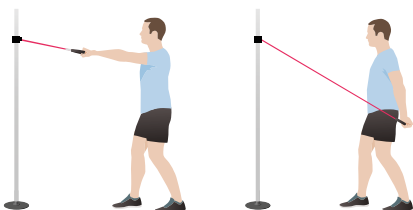

Stående brystpres med elastik

Fastgør elastikken i ca. brysthøjde. Stå med ryggen mod Gripo stangen og hold armene ud til siden ca. i brystniveau. Albuerne skal være bøjedede og pres armene frem, samtidig med at armene strækkes ud.

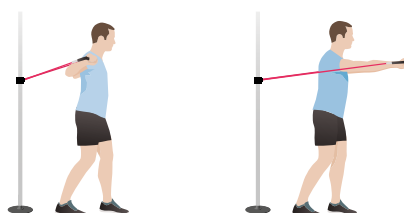

OM ROPOX

FÅ FRIHEDEN TIL TRYGT AT KLARE DIG SELV

“Mennesker med nedsat funktionsevne skal have en lettere hverdag med højere livskvalitet, øget selvværd og frihed til trygt at klare sig selv.” Det var vores målsætning, da vi blev grundlagt i 1962. I dag er vi mere end 60 medarbejdere, der fortsat arbejder efter det samme mål.

Med mere end 50 års erfaring er vi blandt verdens førende inden for produktion af hjælpemidler og møbler til handicappede og udstyr til ergo- og fysioterapeutisk genoptræning. Som en del af AddLife-koncernen har vi derudover adgang til et stort og stærkt netværk af partnere, der er specialiseret i at udvikle services og produkter til både den private og offentlige sundhedssektor.

Vi er repræsenteret i fire verdensdele, hvor vi er anerkendt og værdsat for vores høje kvalitet, fleksibilitet og brugervenlighed.

Læs mere på www.ropox.dk.



ROPOX BORDE

SMUKKE
HØJDEINDSTILLELIGE
BORDE TILPASSET
INDIVIDUELLE BEHOV



ROPOX KØKKENER

FLEKSIBLE OG
HØJDEINDSTILLELIGE
KØKKENLØSNINGER



ROPOX BADEVÆRELSE

INNOVATIVE
OG SPÆNDE
PRODUKTER I EN SMUK
SAMHØRIGHED

ROPOXTM
BETTER WAYS TO BETTER DAYS
— A PART OF **AddLife**