

Ropox Sideafdækninger

Brugermanual

Montagevejledning

Denne manual skal altid ledsage produktet

Indholdsfortegnelse

Generelle oplysninger	3
Tekniske data	4
Montagevejledning	5
Vedligeholdelse	7
Rengøring.....	7
Reklamationer	8

Generelle oplysninger

Produktinformation



Det er vigtigt at læse denne manual inden montage og ibrugtagning.


Produkt : Ropox Sideafdækninger

Producent : Ropox, DK-4700 Næstved, Tel. +45 55 75 05 00

Anvendelsesområde – Ropox Sideafdækninger anvendes sammen med Ropox Pusleborde (Medi og Maxi) og sikre barnet på bordet, samt at der ikke kan komme ting eller personer i klemme ved højdejustering af puslebordet.

Varenumre

Størrelse af sideafdækning:	Varenr.
61 cm x 105 cm	50-50683
82 cm x 105 cm	50-50682

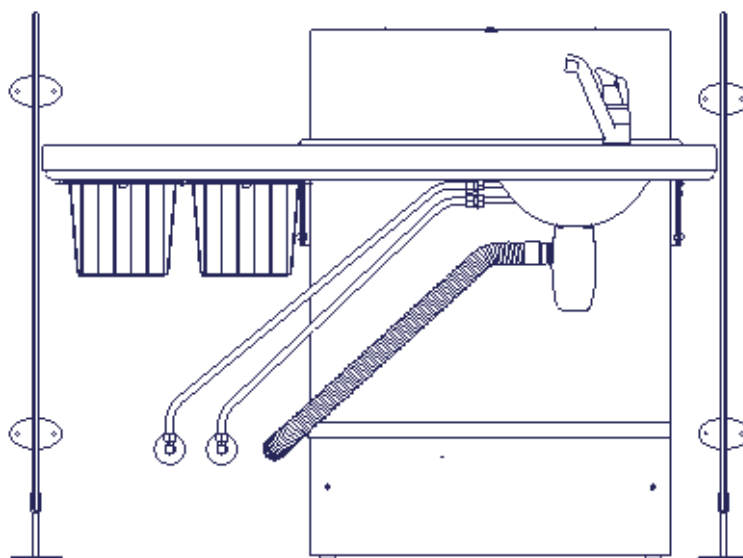


Generelle oplysninger


Tekniske data

Dimensioner: 50-50682: 50-50683:
Højde = 105 cm Højde = 105 cm
Bredde = 82 cm Bredde = 61 cm


Materiale – beslag: Stålplade St.37, Pulverlakeret, hvid RAL 9010 mat
Materiale - plade: Hvid 12 mm kompakt-laminat

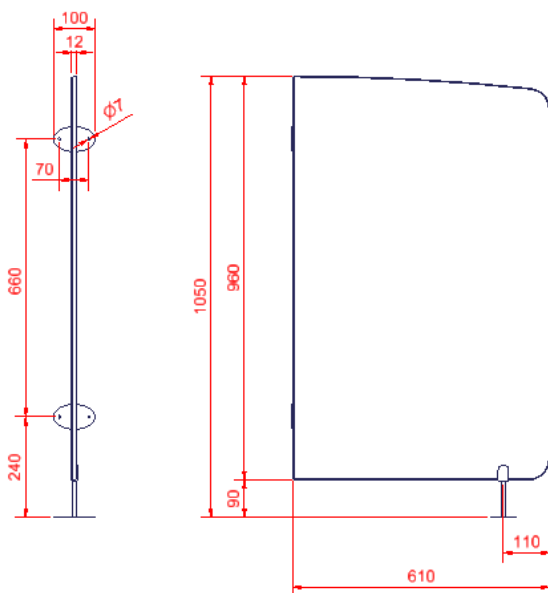


Sideafdækning 50-50683

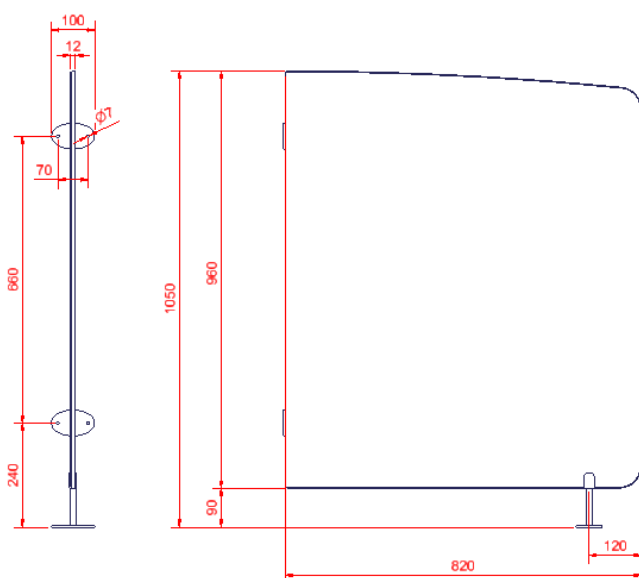


Sideafdækning 50-50682

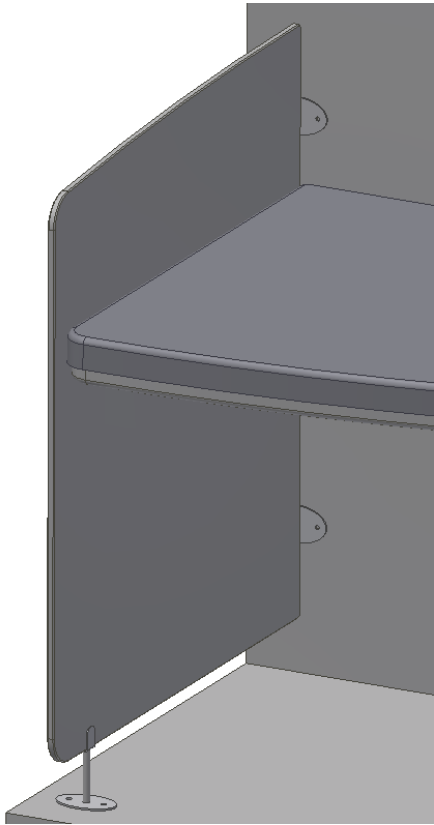


1: Sideafdækningen placeres ved siden af puslebordet, så der ikke opstår klemningsfare.

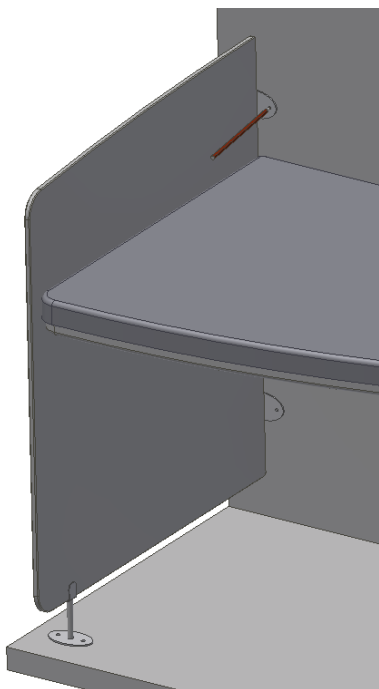



2: Der mærkes på væg og gulv igennem de 3 montagebeslag.

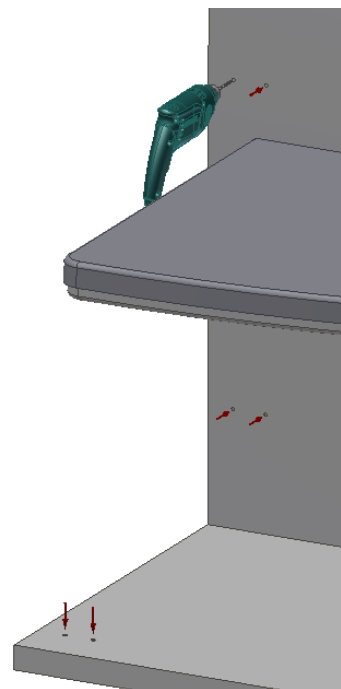

3: Huller bores i væg og gulv.

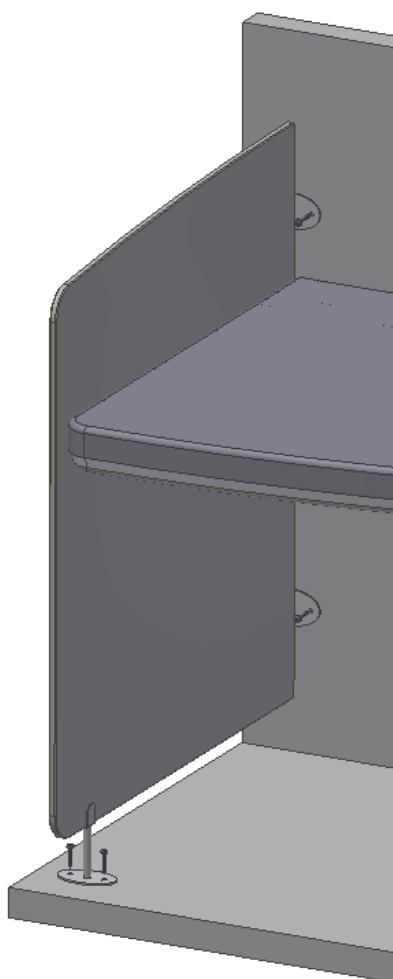

4: Plugs og skruer monteres i de 6 huller.

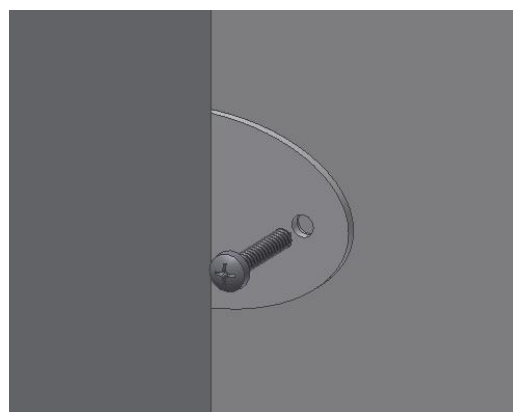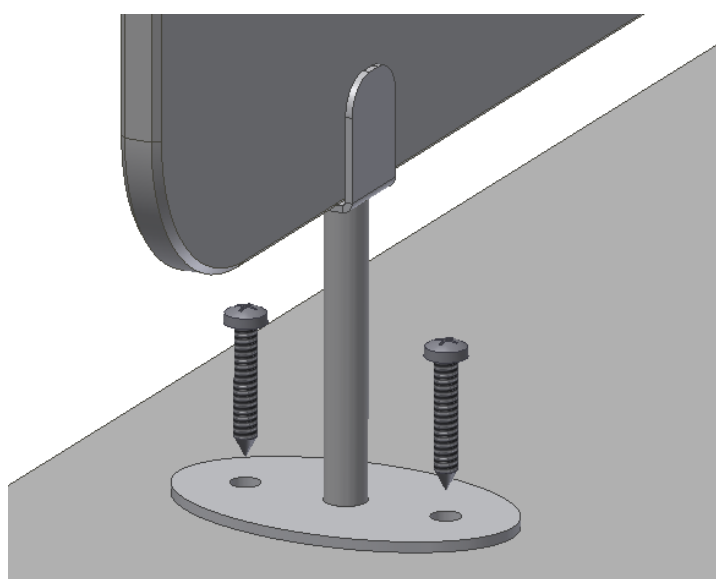

Vedligeholdelse

Ropox Sideafdækningsplader er vedligeholdelsesfrie. Af sikkerhedsmæssige hensyn anbefales det dog jævnligt at checke alle montageskruer for at sikre, at fastspændingen på væggen er i orden og sikker.

Rengøring

Benyt ikke højtryksrensere til rengøring af dette produkt. Der anvendes blot en blød klud eller svamp med almindeligt maks. 60°C varmt sæbevand (pH 7) eller husholdningssprit.

Vigtigt:

Benyt ikke skurepulver eller andre slibende midler, da de vil ridse overfladerne. Benyt heller ikke spidse eller skarpe rengøringsredskaber. Stærk syre eller alkaliske produkter må ikke anvendes.

Reklamationer

Se venligst Generelle Salgs- og Leveringsbetingelser på www.ropox.com



Ropox A/S

Ringstedgade 221

DK – 4700 Næstved

Tel.: +45 55 75 05 00

E-mail: info@ropox.dk

www.ropox.dk