

GRIPO

BETJENINGSVEJLEDNING

DANSK



CE

HEPRO

Indledning

Gripo er et solidt og fleksibelt støtteredskab, som giver tryghed i forbindelse med at rejse sig og forflytte sig i hjemmet. Gripo passer i de fleste hjem med loftshøjde på mellem 210 og 300 cm og er meget nem at montere. For loftshøjde under 210 cm og over 300 cm tilbyder Hepro Gripo Special og Gripo Lang. Støttestangen fungerer udmærket alene, men kan også kompletteres med nyttigt tilbehør.

Med Gripo kombinerer vi kvalitet og miljø. Produktet er fremstillet af genanvendelige materialer, som er skånsomme mod huden og modstandsdygtige mod korrosion, noget, der også gør det ideelt til brug i vådrum og fugtige miljøer. Hos Hepro tænker vi altid på miljøet. Derfor leveres Gripo i genanvendelig, miljøvenlig emballage, mærket med Grønt Punkt – et bevidst valg for at beskytte både mennesker og natur.

dele af EN 12182:2012 og er i overensstemmelse med EN 21856:2022. Den er fremstillet i materialerne aluminium og plast og beregnet til at stå i spænd mellem gulv og loft i et hvilket som helst rum, hvor loft og gulv har styrke nok til at tåle en punktblastning på 100 kg.

Stangen monteres hurtigt og nemt uden skruer eller værktøj og fastgøres sikkert mellem gulv og loft. Med et bredt udvalg af tilbehør kan den tilpasses forskellige brugerbehov. Hepro arbejder altid med at udvikle nyt tilbehør ud i fra brugerbehov og tilbyder nu ny sengehest og nyt tilbehør for svagere lofter.

Hepro er producent og kan derfor tilbyde brugertilpassede løsninger, når det er nødvendigt. Hepro er en norsk industrivirksomhed, der udvikler, producerer og sælger hjælpemidler til ældre og bevægelseshæmmede. Virksomheden blev grundlagt i 1987 og har i dag ca. 85 ansatte. Virksomhedens hovedkontor og fabrik ligger i Rognan i Nordland.

Stangen er testet og godkendt i henhold til relevante

Hepro AS, Tømmerveien 10, 8250 Rognan.

VIGTIGT!


Læs betjeningsvejledningen grundigt inden stangen tages i brug

Gripo

Art. nr. 35200 Gripo

Art. nr. 35210 Gripo

Art. nr. 35202 Gripo Special

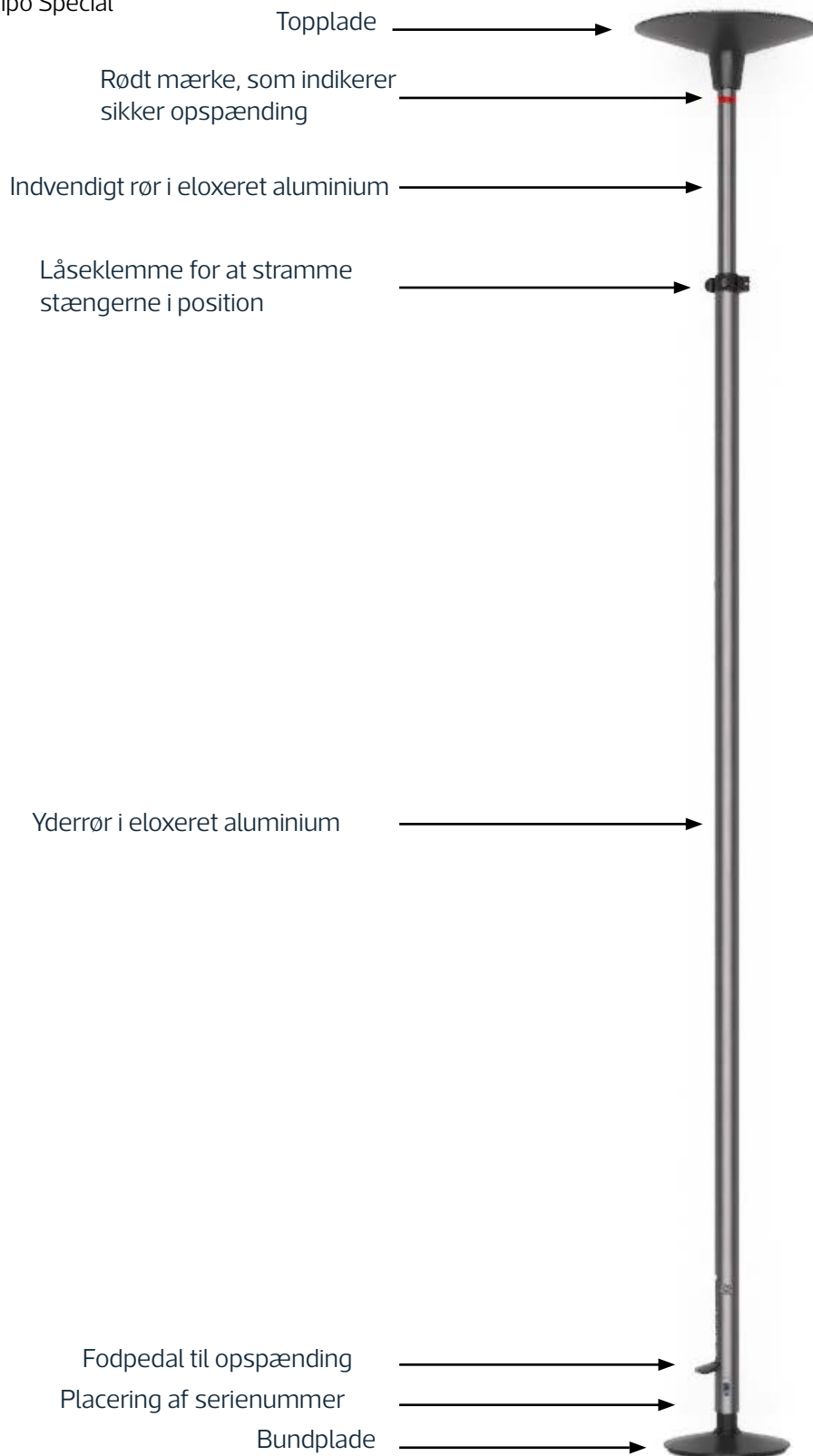

Sikkerhed

Dette produkt er beregnet til anvendelse i private hjem eller institutioner.

- Brug Ikke produktet, hvis den røde sikkerhedsring øverst på stangen er synlig.
- Vurder altid klemfare mellem stangen og andre møbler/genstande. For yderligere information, læs punkt 4 og 5, side 9-10 i betjeningsvejledningen
- Monter Ikke produktet på løse genstande, som ikke er fastgjort sikkert til loft eller gulv, som fx gulvmåtter, plader eller lignende.
- Børn må ikke lege med produktet.
- Placer Ikke produktet på overflader, der ikke er plane eller parallelle.
- Ved montering i vådområder, brug skridsikring; Art. Nr. 35007
- Produktet på ikke modificeres eller ændres på en måde, der ikke er beskrevet i betjeningsvejledningen.
- Brug Ikke produktet med andet ekstraudstyr, som ikke hører til Gripo/produktet
- Gripo kan monteres i brusenicher, men produktet bør ikke permanent stå nedsænket i vand eller andre væsker.
- Vær forsigtig ved åbning af emballagen, således at hverken du selv eller produktet bliver beskadiget.

GRIPO BESTÅR AF:

1 x bundplade (den mindste)
1 x topplade (den største)
1 x stang
1 x gasfjeder
1 x betjeningsvejledning

VARIANTER

Art.nr	Beskrivelse	Loftshøjde
35200	Gripo	210-300 cm
35210*	Gripo Lang	260-340 cm
35202	Gripo Special	Under 210 cm

* Denne udgave har, ud over til ekstra højde, et 15 cm længere yderrør, som passer for dem, der har brug for at have tilbehør fastgjort højt oppe på stangen, evt. ønsker at bruge stangen til træning/aktivitet.

Indhold

Indledning	2
Gripo	3
Sikkerhed	4
Indhold	5
1 Symbolforklaring	6
2 Indhold i pakken	6
3 Miljø	7
4 Risikovurdering af afstande under montering	9
5 Sikkerhed ved montering	10
6 Instruktioner for brug	11
7 Montering	13
8 Demontering	17
9 Vedligeholdelsesrutiner	17
10 Garanti	17
11 Revisioner af denne betjeningsvejledning	18

1 Symbolforklaring



Producent



Serienummer
CE-mærkning



Advarsel




Medicinsk udstyr



Produktionsdato




Læs betjeningsvejledningen nøje inden

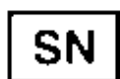

brug

2 Indhold i pakken

STANG

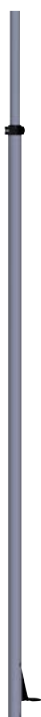

TOPPLADE / BUNDPLADE



GASFJEDER



3 Miljø

3.1 MATERIALER OG GENANVENDELSE

Gripo genanvendes i henhold til lokale bestemmelser; kontakt venligst din lokale genbrugsstation for yderligere information.

Når Gripo har nået sin levetid, er det hurtigt og effektivt at sortere komponenterne.

Del	Materiale	Sorteres som
Aluminiumsprofiler (eloxeret)	Aluminium	Metal
Bund- og topplade samt andre plastdele	PA6	Plast
Gasfjeder	Rustfri stål	Metal
Fodpumpe	Aluminium	Metal
Fastgørelsesmidler (skruer, møtrikker, skiver, bøsninger)	Stål, kobber, aluminium	Metal

Lang levetid og kvalitet:

Under udviklingen af Gripo har vi lagt stor vægt på at vælge materialer af høj kvalitet. Produktet er designet med slidstærke materialer og med en robust konstruktion. Gripo er testet af Hepro og brugere i over 20 år for maksimal ydelse og levetid. Dette reducerer behovet for hyppig udskiftning, hvilket bidrager til at spare ressourcer og fremme en mere bæredygtig anvendelse – til fordel for både dig og miljøet

Reparation og genbrug:

Designet muliggør udskiftning af dele. Vi tilbyder reservedele i aftaleperioden og fem år efter, hvilket reducerer affald.

ALUMINIUMSSTANG:

Gripes eloxerede aluminiumsstænger er 100% genanvendelige og kan genvindes uendeligt uden tab af kvalitet. Genanvendelse af aluminium kræver kun 5% af den energi, der kræves for at producere ny aluminium, hvilket gør det til et meget bæredygtigt valg.

Eloxeringen giver en hård, slidstærk overflade, som beskytter mod både ridser og korrosion, hvilket gør stængerne ideelle til krævende miljøer, også optimalt i brug i vådrum. Den jævne, glatte finish gør materialet nemt at rengøre, samtidig med, at den sikrer lang holdbarhed og optimal funktionalitet.



PLASTDELE I PA6:

De plastdele, vi bruger, er fremstillet i PA6, et meget slidstærkt materiale, testet af Hepro for maksimal ydelse og levetid. Materialet tåler både høje og lave temperaturer, selv under stor belastning. Materialet er både stærkt og holdbart samt nemt at rengøre og sikrer derved god hygiejne i hele produktets levetid. Materialet er et bæredygtigt valg, som kombinerer høj kvalitet, pålidelighed og miljøvenlighed i ét materiale.



4 Risikovurdering af afstande under montering




Vurder altid klemfare mellem Gripo og andre møbler/genstande. Vær specielt opmærksom på afstand mellem stang og andet møbel, og vurder Afstanden, så brugeren ikke kan komme i klemme mellem Gripo og møblet.



For at undgå klemfare skal montering af Gripo udføres med korrekt sikkerhedsafstand til genstande, som bruges sammen med og i forbindelse med Gripo. Kritiske områder for klemfare er torso, nakke og hoved. Sørg for, at "Anbefalede afstande mellem genstande" overholdes. Disse afstande er afgørende for at sikre tryk brug og hindre alvorlige skader.

ANBEFALEDE AFSTANDE MELLEM GENSTANDE

For at undgå klemfare af:	Anbefalet afstand for voksne	Anbefalet afstand for børn
Hoved / Nakke / Torso	Under 120 mm eller over 250 mm	Under 60 mm eller over 250 mm
Fødder	Under 35 mm eller over 100 mm	Under 25 mm eller over 45 mm

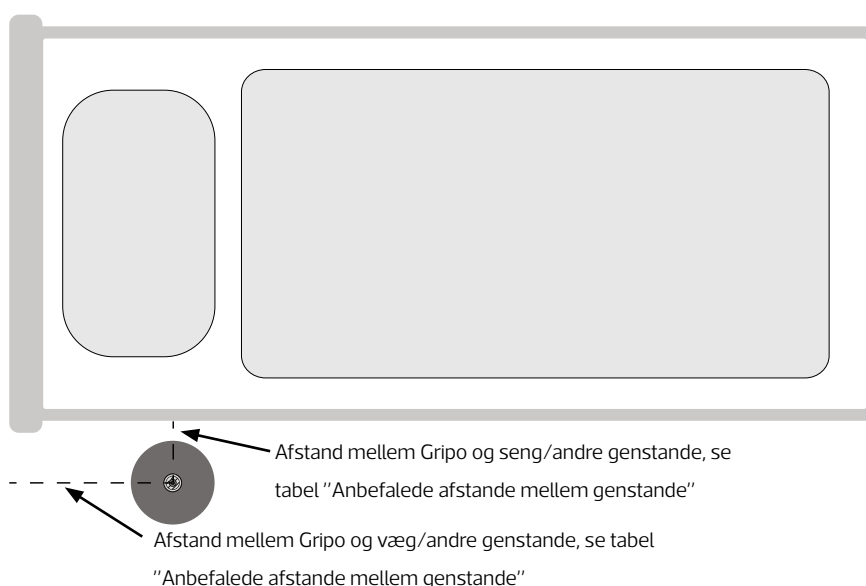


5 Sikkerhed ved montering

Personer, der installerer Gripo, skal tage hensyn til følgende:

For at undgå situationer, hvor brugeren kan sidde fast mellem Gripo og andre genstande, sørg for at overholde de anbefalede afstande.


Vær opmærksom på, at justerbare og/eller flytbare genstande kan føre til at afstanden mellem Gripo og objektet ændres. Eksempler på flytbare og/eller justerbare genstande er løftestole eller senge, som kan hæves og sænkes eller skubbes.

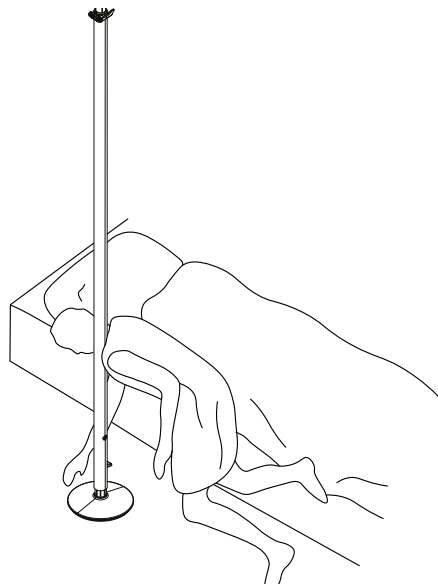

Bemærk, at Gripo er et solidt og fleksibelt støtteredskab, som giver tryghed, når man skal rejse sig eller forflytte sig i hjemmet. Hvis man har brug for et hjælpemiddel for at undgå at brugeren falder ud af sengen, skal der benyttes tilbehør, der er egnet til dette formål, og ikke Gripo-stangen i sig selv.

Vurder altid klemfare mellem Gripo og andre møbler ved montering.

For at hindre klemfare mellem seng/stol og Gripo, kan der monteres et cirkelgreb D30, eller tilsvarende tilbehør, således som det er vist på billederne.

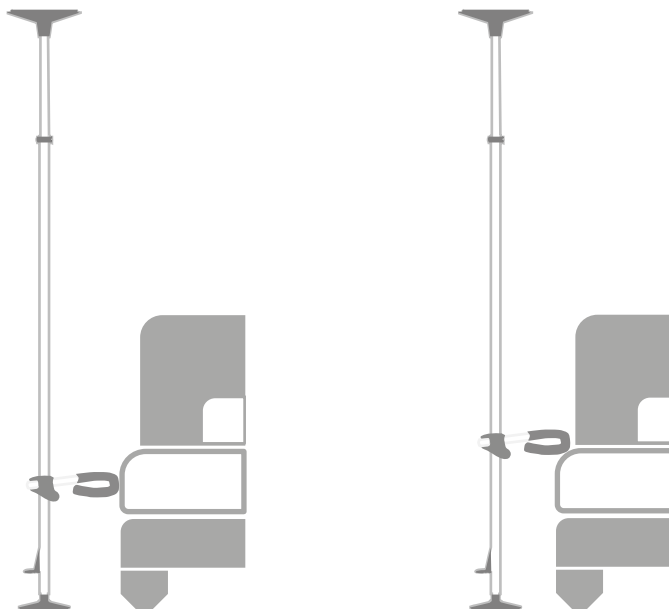

6 Instruktioner for brug

UDVIKLET OG PRODUCERET I HENHOLD TIL:

- MDR 2017/745
- Relevante dele af EN 12182:2012 i overensstemmelse med EN 21856:2022

BRUGSMILJØ

Dette produkt er beregnet til brug i private hjem eller institutioner. Gripo-stangen bør have rumtemperatur inden montering.

BRUGERVÆGT

Maksimal brugervægt 210 kg.

DIMENSIONER GRIPO

Vægt	4,7 kg
Højde	210 cm til 300 cm
Bredde topplade	29 cm

TRANSPORT

Under transport skal produktet være sikret på en sådan måde, at det ikke kan medføre fare for passagerer eller andre genstande.


TILTÆNKET BRUG

Gripo støttestang er alsidig og kan bruges i forskellige situationer, hvor der er behov for støtte ved oprejsning. Enten det er i badeværelset, ved sengen, i gangen eller andre steder, vil Gripo være der for at støtte dig. Støttestangen fungerer udmærket alene, men kan også kompletteres med nyttigt tilbehør for at tilpasses dine individuelle behov.

6.1 MONTERING AF GRIPO MOD LOFT

Før Gripo monteres bør loftskonstruktionen undersøges med hensyn til styrke og mulighed for placering af stangen på ønsket sted. Loft og gulv skal være stærke nok til at tåle en punktbelastning på 100 kg.

Ved gipslofter er det meget vigtigt, at Gripo monteres som vist på tegningen. Undgå at placere Gripo mellem loftsbjælker, også ved spånpladelofter. Ved montering af Gripo på gipsloft eller andre svage lofter anbefales det at benytte tilbehør til svage lofter, som sikrer ekstra forstærkning mellem stangens topplade og loftet.

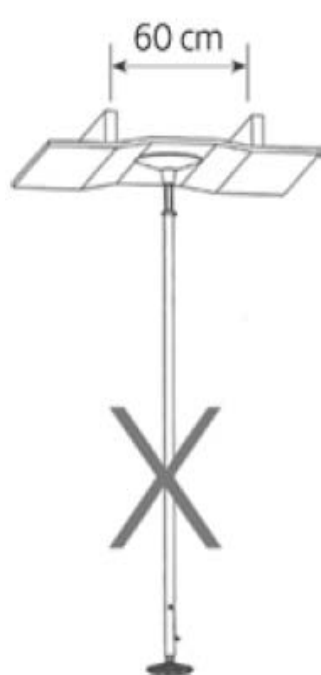

Ikke sådan



Benyt stor loftsplade



Sådan

7 Montering

1

Inden du påbegynder montering.

1. Placer stangen på den lille bundplade, således at stangen passer i sporet.
2. Placer gasfjederen på toppen af inderrøret og skub gasfjederen mod det røde sikkerhedsmærke.
3. Fastgør den store topplade på toppen af gasfjederen, således at stangen passer i sporet.




Kraften, der virker mod loftet er 100 kg


1



2

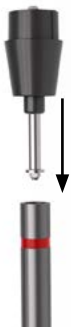

3

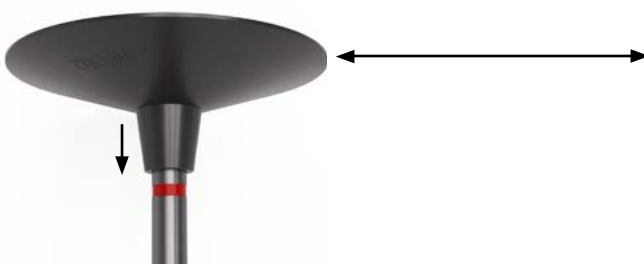

2

Placer stangen et egnet sted.

1. Hiv fodpedalen ud.
2. Åbn låseklemme.

1



2



3

Skub inderrøret op, indtil toppladen når loftet, mens bundpladen stadig holdes i kontakt med gulvet.

Sørg for, at stangen er lodret.



4

Drej det indre rør med uret, således at inderrøret låses fast i yderrøret.



5

Lås låseklemme.
NB: Sørg for, at skruen på låseklemmen er strammet.



6

Tryk fodpedalen ned. Hvis man er usikker på, om loftet tåler belastningen, hold øje med at loftet ikke slår revner, mens man forsigtigt trykker fodpedalen ned.

Tjek, at den røde markering er væk.

Hvis den røde markering er synlig, demonter stangen og start fra punkt 2.



Sørg for, at den røde markering ikke er synlig under brug.

Hvis den kommer frem - tag stangen ned og sæt den op igen.

Kontroller at strammeskruen på låseklemmen ikke er løs og at inderrøret er skruet godt fast.

Hvis det røde mærke stadig er synligt, kan en mulig årsag være at loftkonstruktionen ikke er stærk nok.

8 Demontering

Hiv fodpedalen op og løs låseklemmen. Om nødvendigt, drej det indre rør mod uret.

9 Vedligeholdelsesrutiner

9.1 RENGØRING

Vask produktet med vand på maks. 85°C i minimum 3 minutter eller desinficer kemisk med et godkendt desinfektionsmiddel. Nogle desinficeringsmidler kan misfarve produktet, men vil ikke påvirke funktionen.

9.2 GENBRUG

Gripo er konstrueret til lang levetid og kan derfor genbruges. For at genbruge Gripo skal top- og bundplade samt gasfjeder udskiftes. Desuden skal aluminiumsstængerne desinficeres indvendigt og udvendigt. Gripo er så klargjort til ny bruger med minimal vedligeholdelse.

10 Garanti

Ved normal brug i overensstemmelse med betjeningsvejledningen har Gripo 5 års levetid og 5 års garanti. Garantiperioden for tilbehør er 2 år. Ved reklamationer eller henvendelser om produktet skal produktets serienummer altid oplyses som reference.

Ved fejl på produkter kontaktes

Hepro, Tlf.nr.: +47 46 74 55 55.

11 Revisioner af denne betjeningsvejledning

Revision	Dato	Forfatter	Notat
1.0	20.02.2025	Anders Gloslie	Established

Notater

HEPRO

Aktiv og tryg
i alle livets faser

HEPRO AS | Tømmerveien 10, 8250 Rognan - Norge
hepro.no | firmapost@hepro.no | (+47) 46 74 55 55