



# Ropox Dock-in

## Benutzerhandbuch

Verbleibt beim Produkt

# Inhaltsverzeichnis

---

<b>Produktinformation .....</b>	<b>3</b>
<b>Technische Daten .....</b>	<b>4</b>
Maßskizzen .....	4
Montageschablone .....	5
Nachrüstung .....	6
Ohne Montageschablone .....	8
<b>Anweisungen .....</b>	<b>12</b>
Täglicher Gebrauch .....	13
Permanente Verriegelung .....	13
Auslösung der Verriegelung .....	14
Empfehlungen .....	14
Höhenverstellung .....	15
<b>Wartung .....</b>	<b>15</b>
Reinigung .....	16
Fehlersuche .....	17
Abfallentsorgung .....	17
Normaler Gebrauch .....	17
Lagerung und Transport .....	17
Etikett .....	18
Zeichenerklärung .....	18
<b>Ersatzteile .....</b>	<b>19</b>
<b>Reklamationen .....</b>	<b>20</b>



Immer dieses Handbuch vor Ingebrauchnahme durchlesen

Produkt: Ropox Dock-in

Hersteller: Ropox A/S, DK-4700 Naestved, Tel. +45 55 75 05 00

Anwendungsbereich: Ropox Dock-in ist eine Zubehörkomponente für das Ropox Schwenkwaschbecken. Dadurch erhält das Waschbecken eine zusätzliche Tischplatte sowie erhöhte Stabilität und Sicherheit, wenn es verriegelt ist. Die Dock-in Einheit kommt in Privatwohnungen, Pflegezentren und ähnlichen Institutionen zum Einsatz.

## Komponenten

40-40069 Ropox Dock-in



## Technische Daten

---

Höhenverstellung 150mm

Materialien Tischplatte: Gegossenes Marmor und Kunststoff Komposit mit hochglanzpoliertem & porenfreiem Gelcoat  
Rahmen: Oberflächenbehandelter Stahl  
Verriegelungsvorrichtung: Rostfreier Stahl

Oberflächenbehandlung Stahl: Blauchromat, pulverlackiert, weiß RAL 9003 matt


Max. Belastbarkeit Nach DS/ISO 17966: max. Benutzergewicht 245kg

Ropox Dock-in ist zur Unterstützung und Stabilisierung des Waschbeckens entwickelt worden, so dass sich eine Person von 245 kg auf das verriegelte Waschbecken stützen kann. Das Gewicht von 245 kg basiert auf einer Person, die sich in einem Winkel von bis zu 45° befindet.



Dieses Produkt ist CE-gekennzeichnet und wurde gemäß den europäischen Normen für persönliche Hygiene DS/ISO 17966 und der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte geprüft.

## Maßskizzen

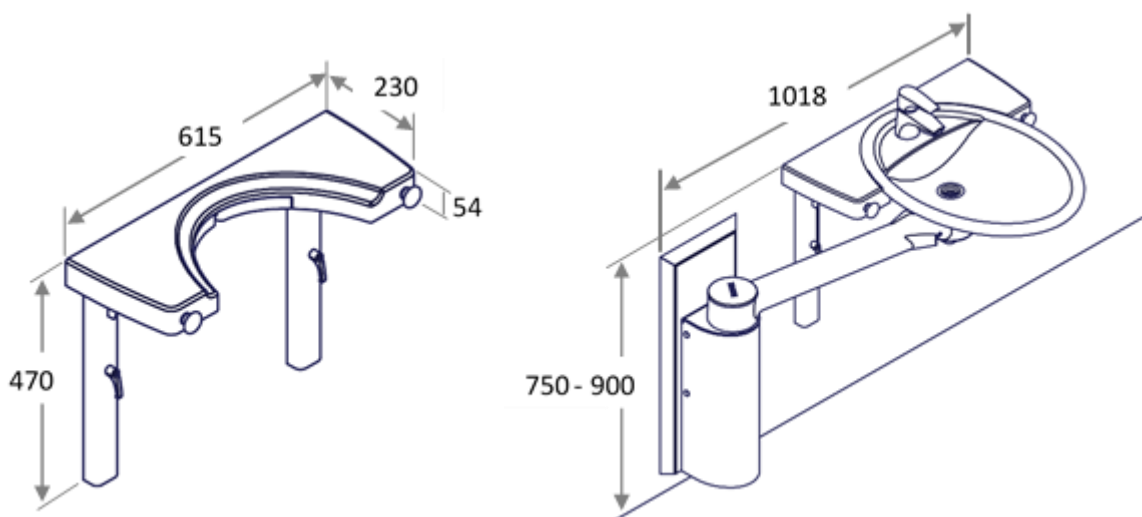

# Montageanleitung

## Montageschablone

Nr. 1

Für Schwenkbares Waschbecken

40-41110 und 40-41120



Nr. 2

Für Schwenkbares Waschbecken

40-41130



Nr. 3

Für Schwenkbares Waschbecken

40-41140




Nr. 4


Nachrüstung





## Nachrüstung

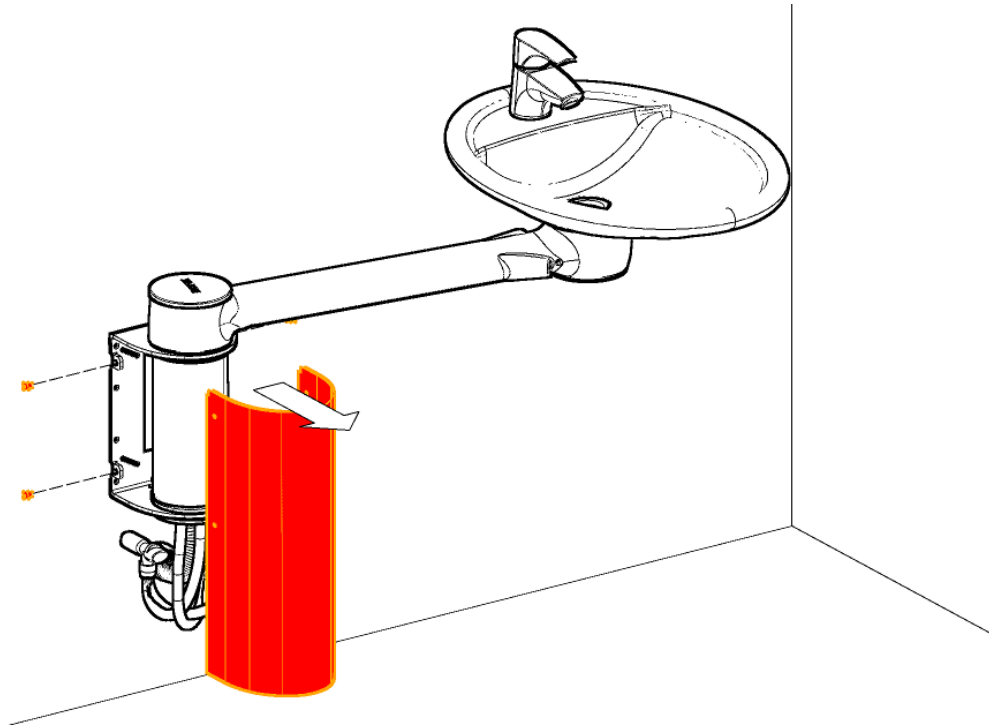

1

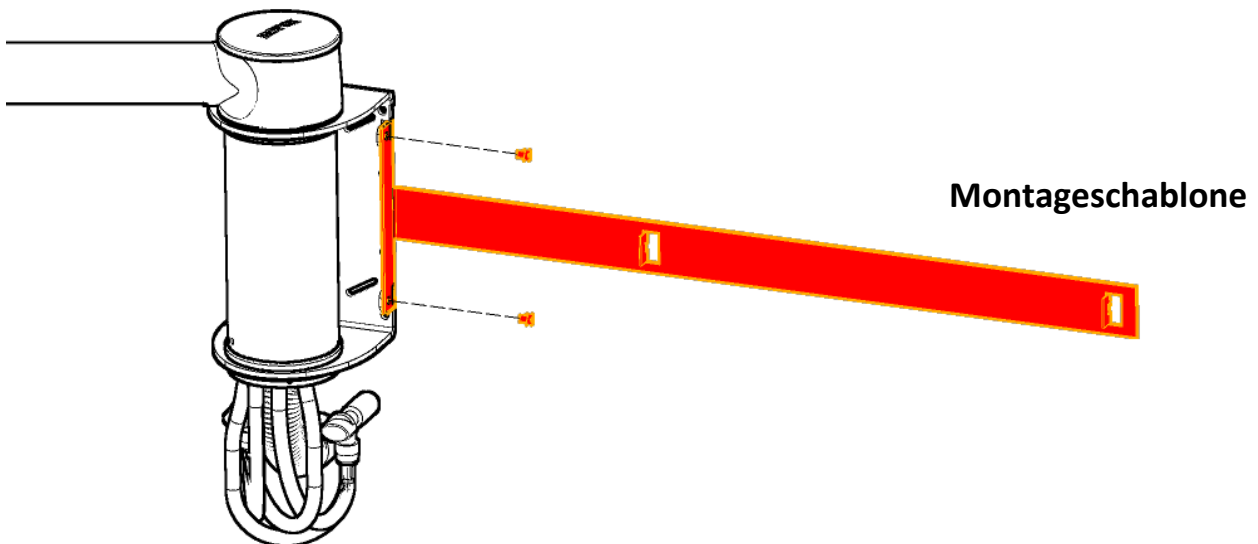

2

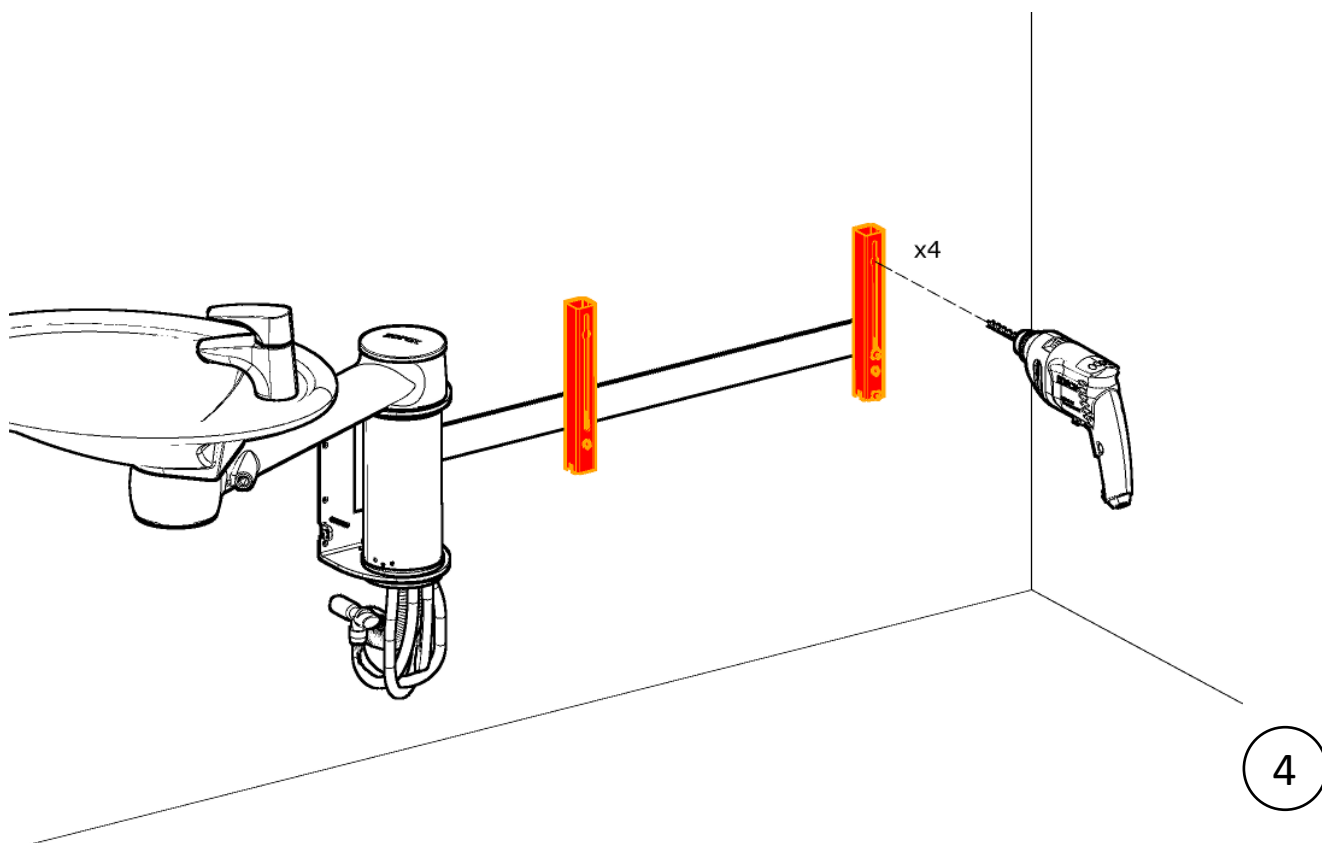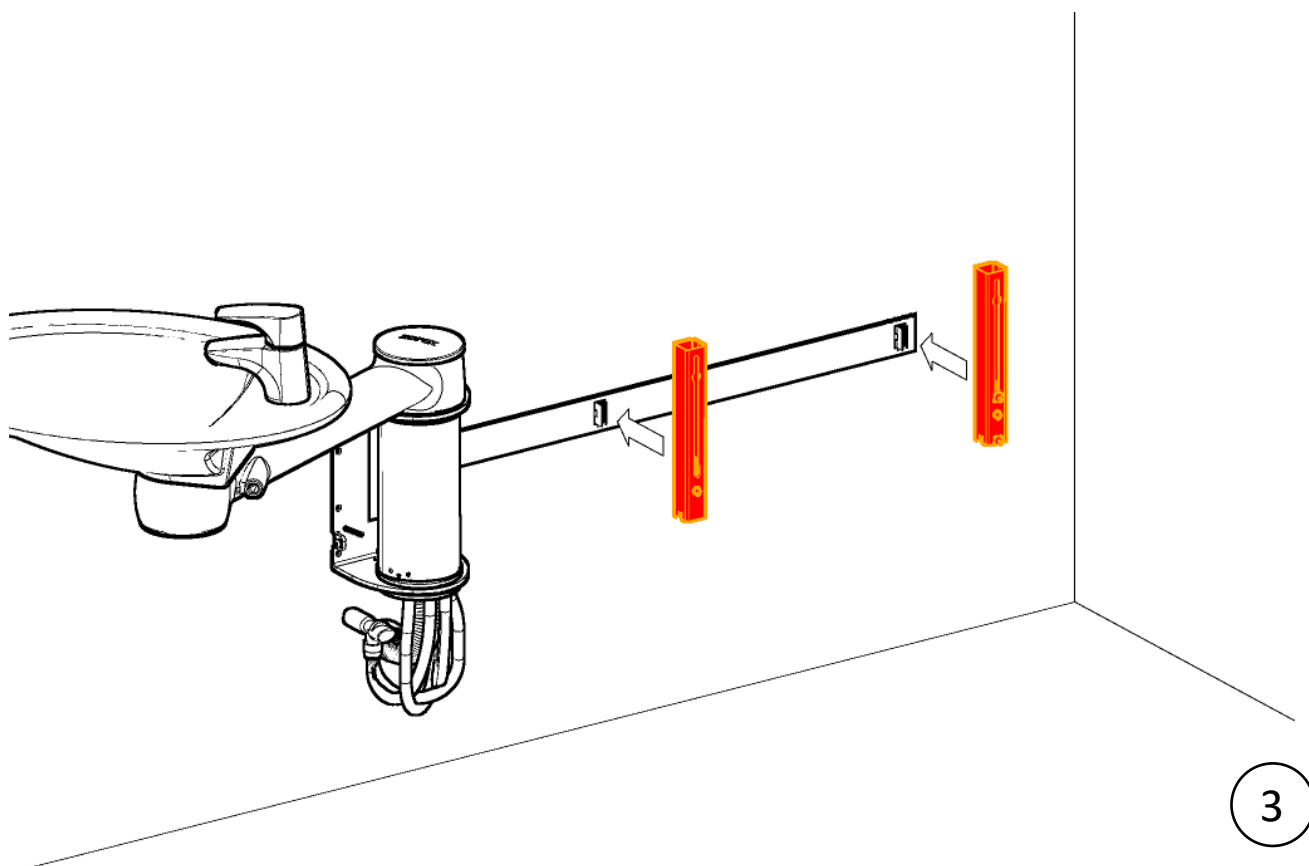


## Ohne Montageschablone

### Für Ropox Schwenkbares Waschbecken (fixiert)

40-41110

40-41120

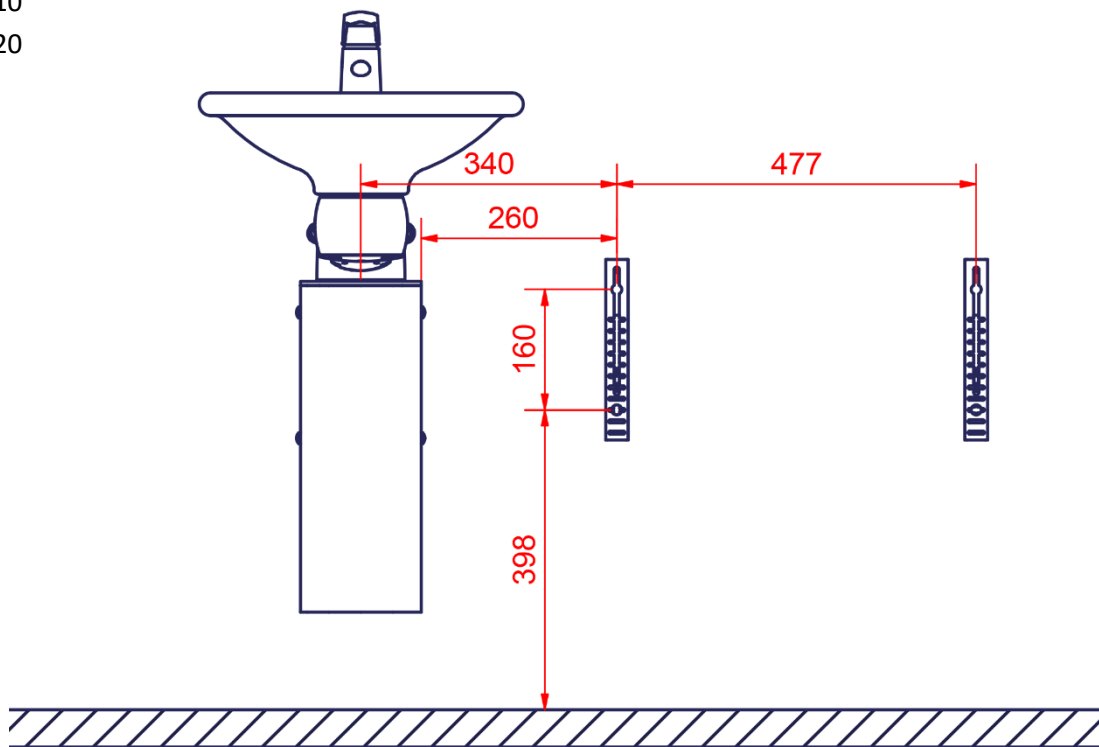


### Für Ropox Schwenkbares Waschbecken (Höhenverstellbar)

40-41130

40-41140

ACHTUNG: Das Waschbecken muss in der oberen Position sein

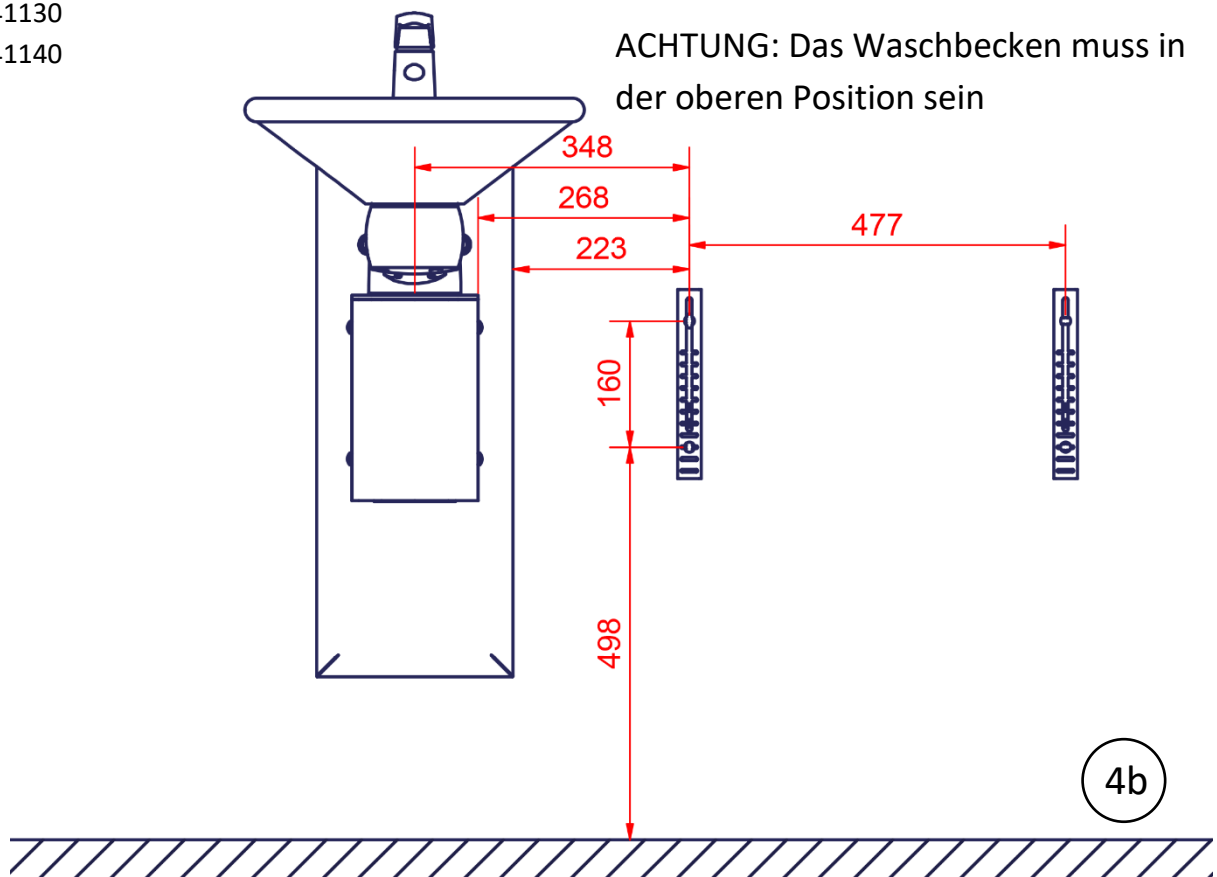


4b






Das Produkt wird mit 4 Schrauben und Dübel geliefert was für die Montage an einer Betonwand berechnet worden ist.

Der Monteur muss immer das Material, die Beschaffenheit und Stärke der Wand bewerten und geeignete Schrauben und Dübel, für diesen Typ Wand, anwenden.

Maximale Belastung der obersten Schrauben 98kg.

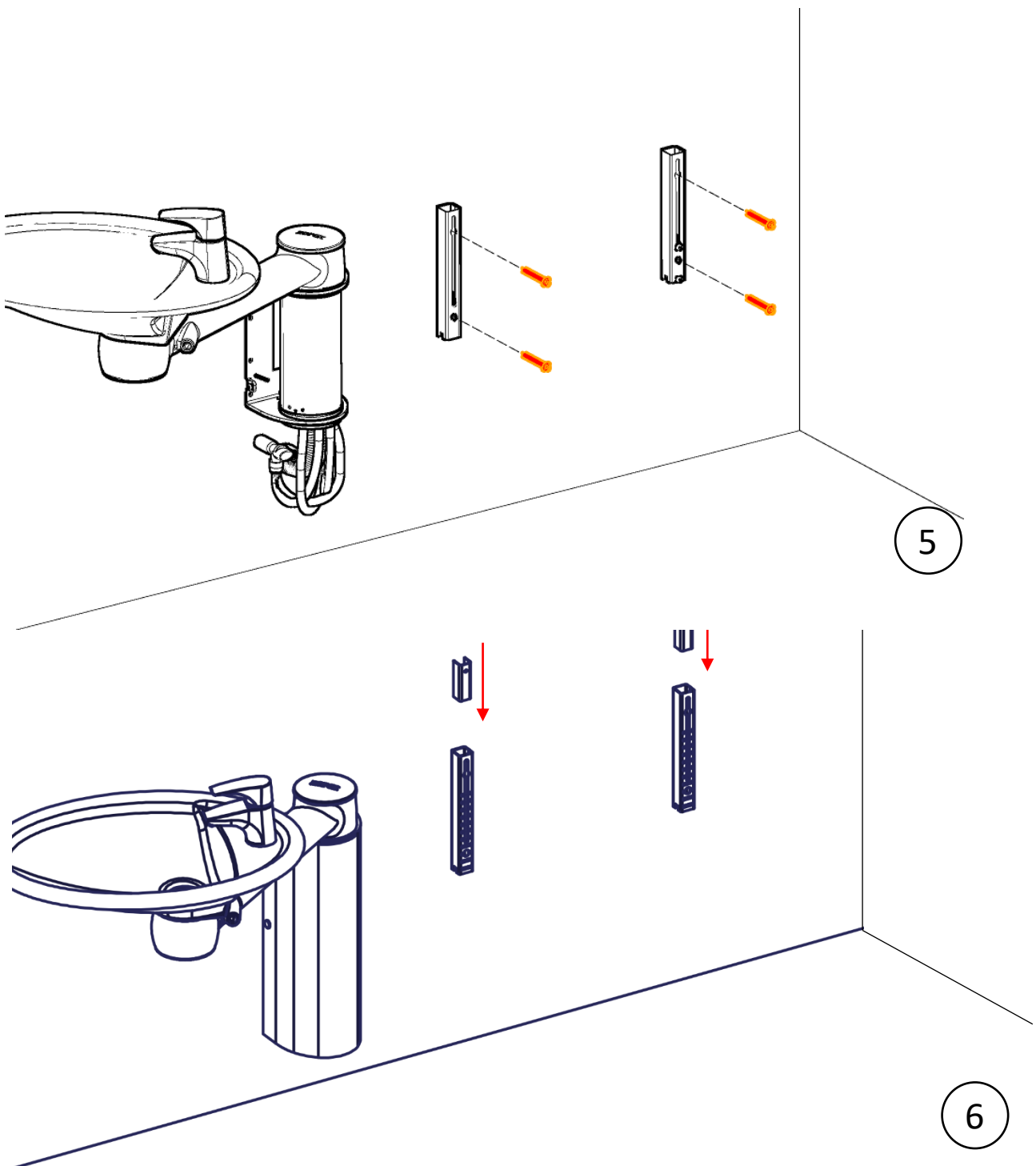


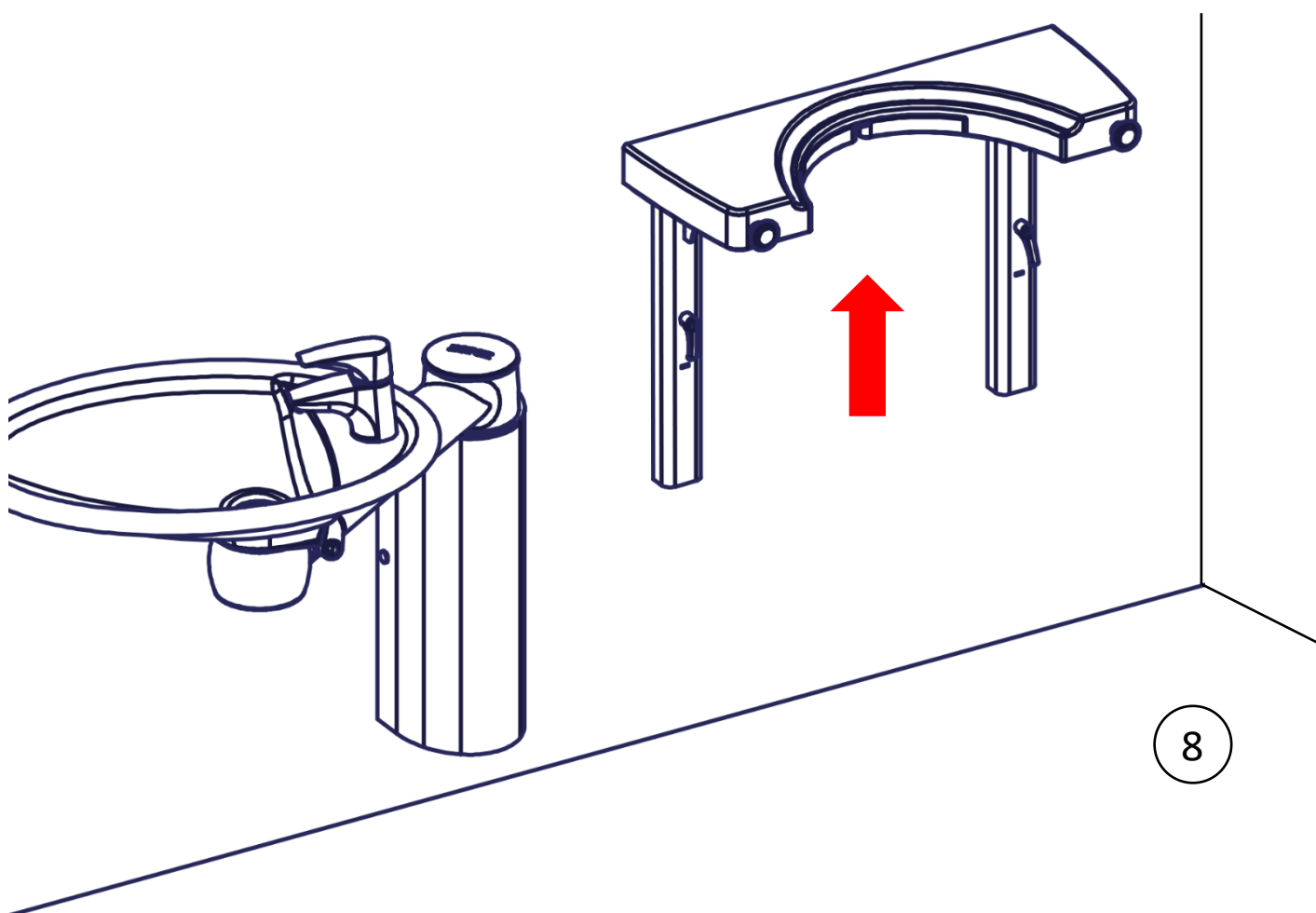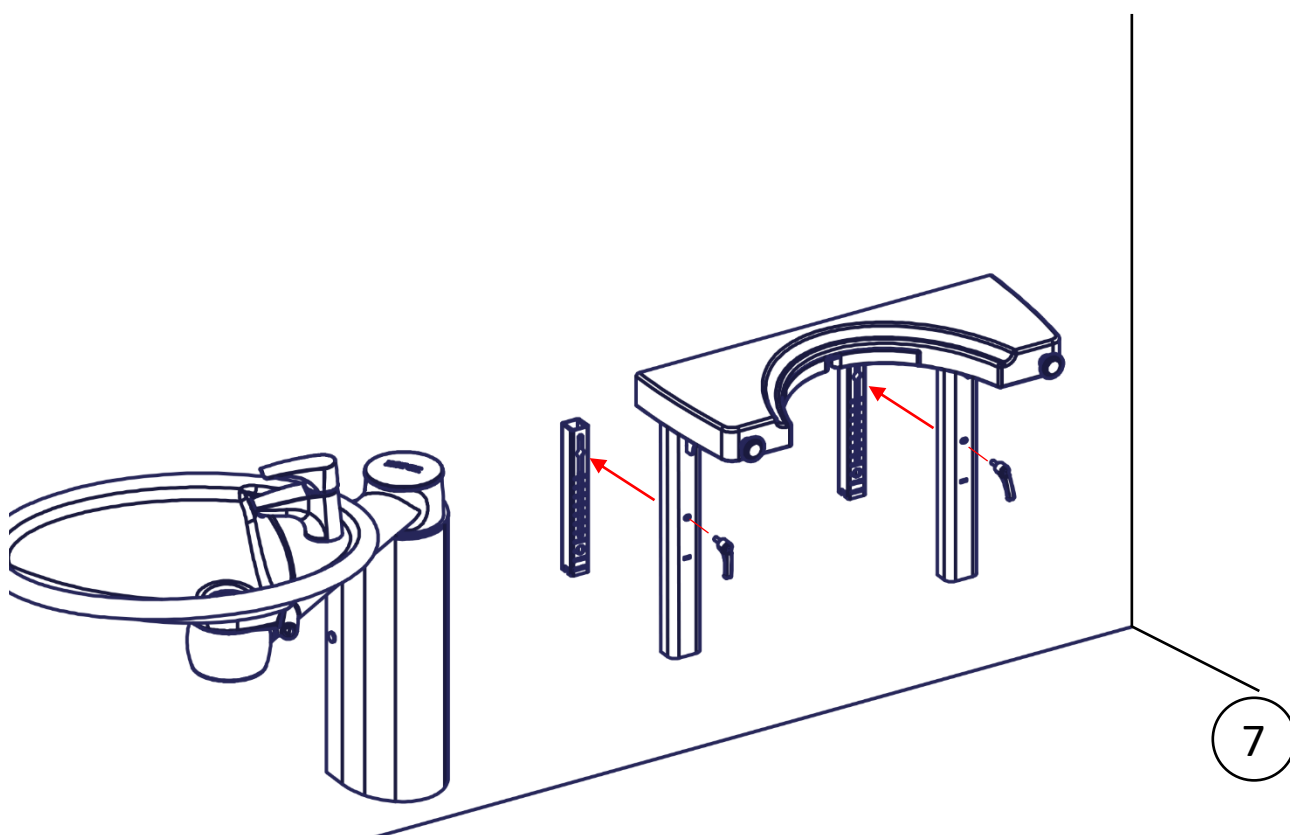

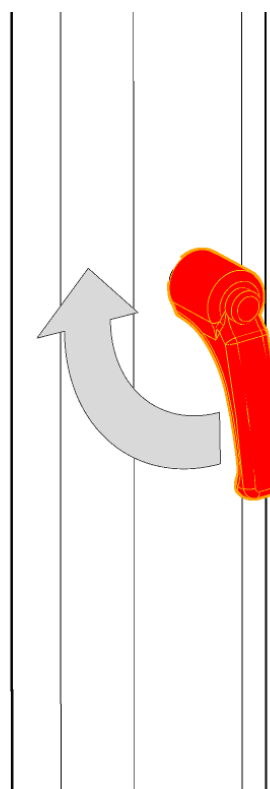


Fastspænde

9

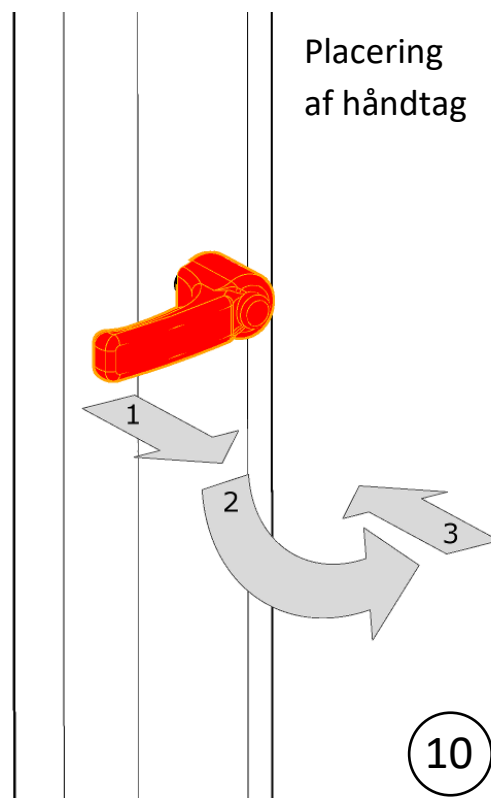


Placering  
af håndtag


10

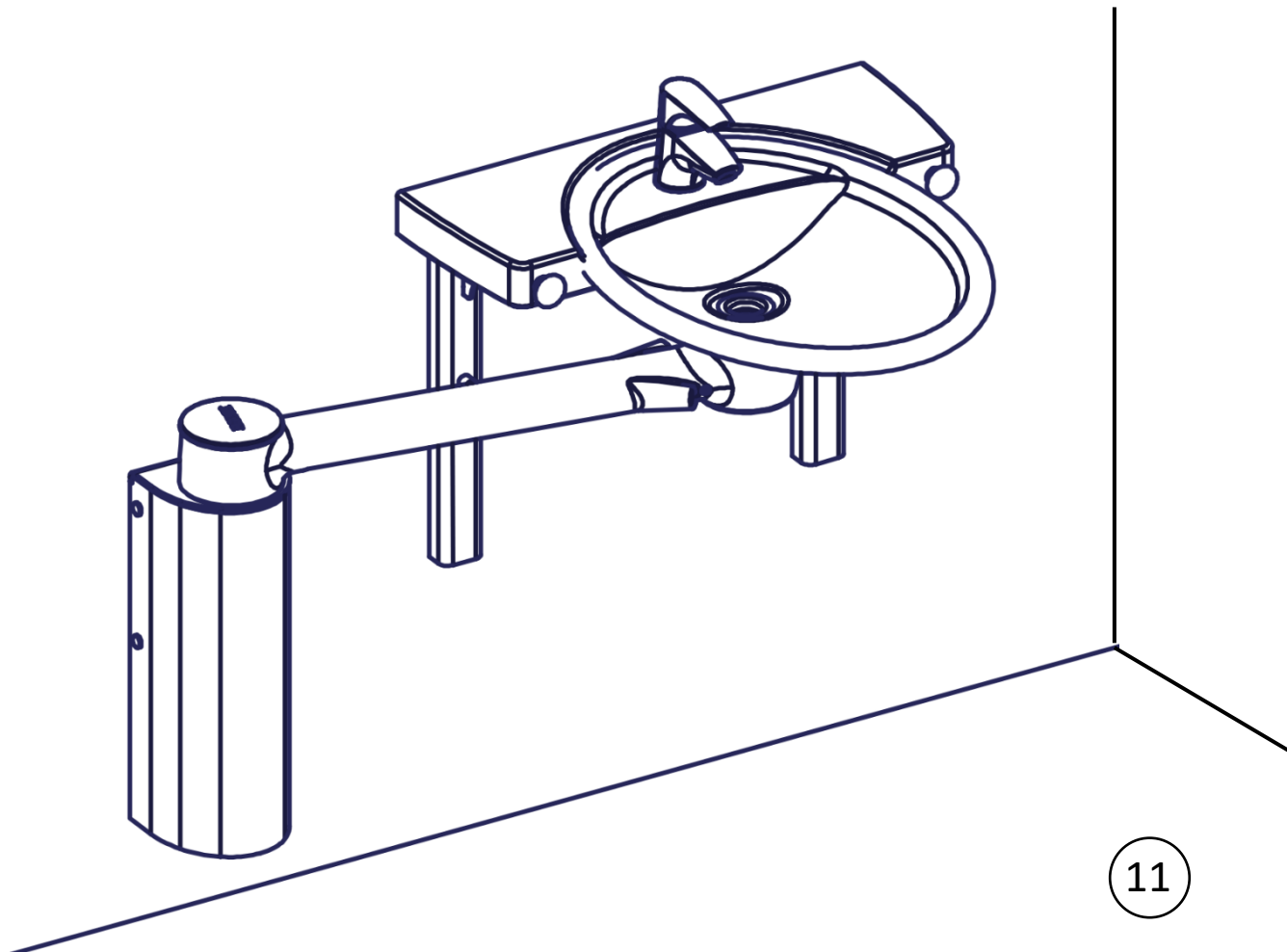

11

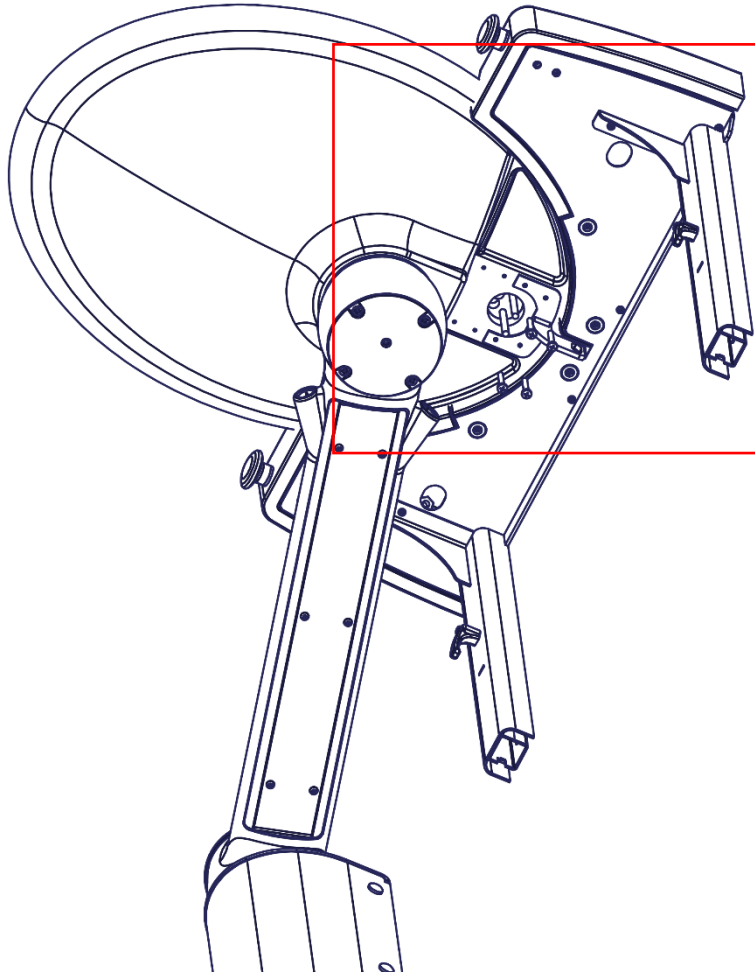

12

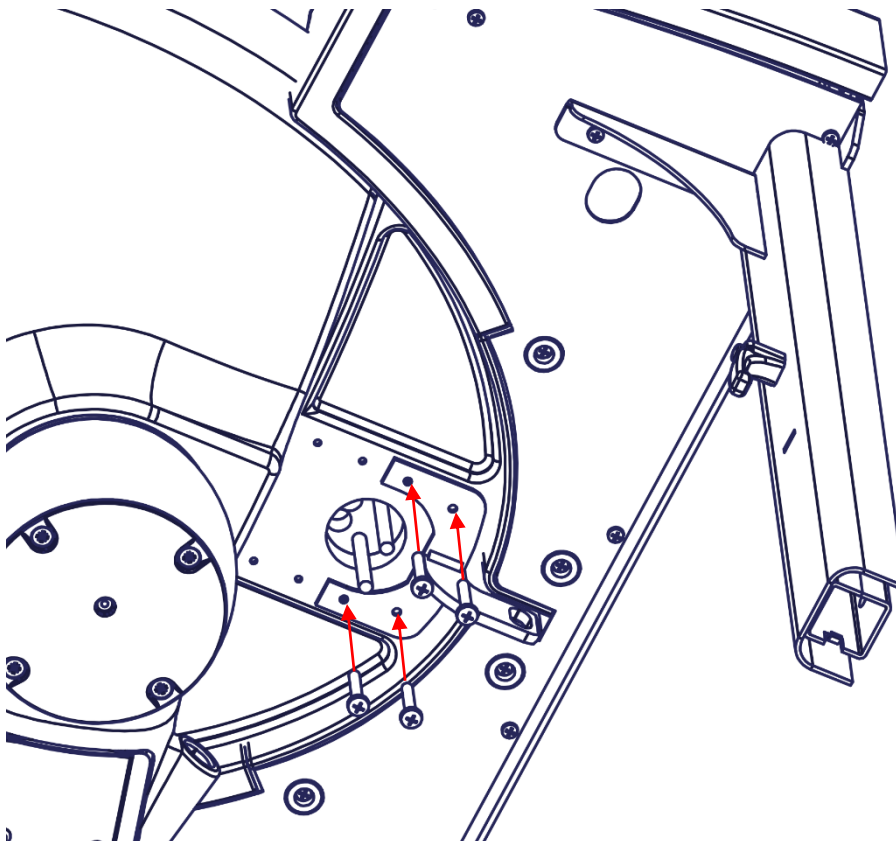

13

# Anweisungen

---

## Täglicher Gebrauch


Die Dock-in Einheit ist zur einfachen Verriegelung des Waschbeckens während des täglichen Gebrauchs entwickelt worden.

Beim Einführen des Waschbeckens in den Einschnitt wird es in der korrekten Position automatisch verriegelt. An den beiden Griffen ziehen um das Waschbecken wieder von der Verriegelungsfunktion auszulösen, wonach das Waschbecken wieder frei schwenkbar ist.



## Permanente Verriegelung

Das Waschbecken lässt sich permanent verriegeln damit es wie ein normales Waschbecken funktioniert. Dies wird verwirklicht durch einschrauben der belegten zwei M5 Schrauben, wie im Bild angewiesen. NB! Hierbei muss das Waschbecken im Dock-in eingeführt sein und beide Schrauben müssen verwendet werden.

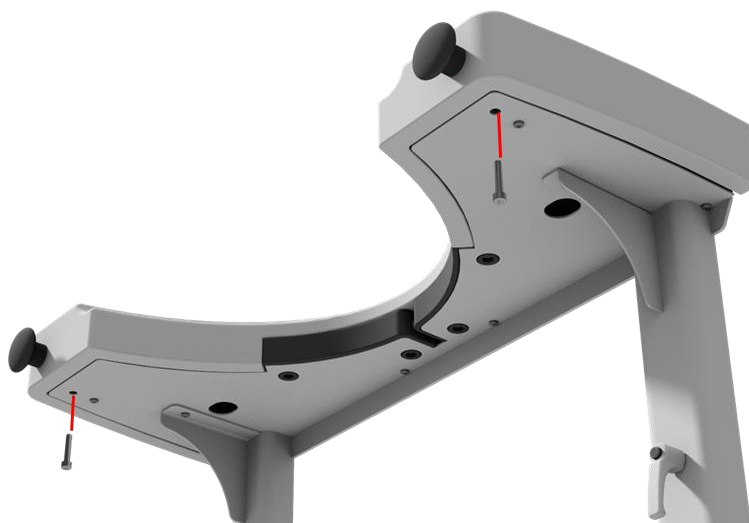


# Anweisungen

---

## Auslösung der Verriegelung

Das Waschbecken kann auch ohne feste Verriegelung eingestellt werden, wird das erwünscht. Dies wird verwirklicht durch einschrauben der einen Schraube während der Griff herausgezogen wird.

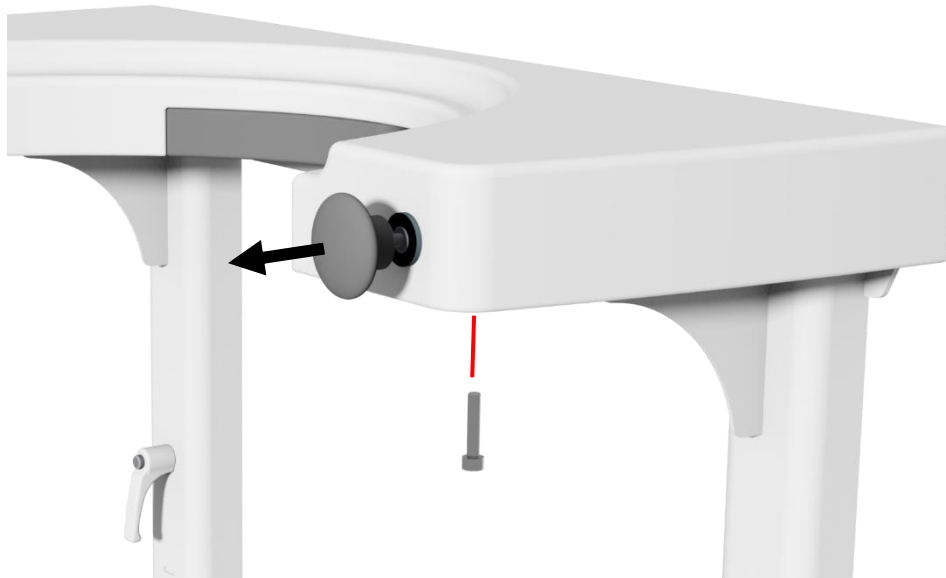



## Empfehlungen

Zur Sicherstellung der optimalen Ausnutzung der Funktionen der Ropox Dock-in Einheit und zur Vermeidung von Unfällen müssen die untenstehenden Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden.

- Nie das Waschbecken während der Zusammenkopplung mit der Dock-in Einheit belasten. Dadurch können Ungenauigkeiten entstehen, so dass das Waschbecken nicht verriegelt werden kann oder gegen die Ober/Unterkante der Dock-in Einheit stößt.
- Zum Erreichen einer langen Lebensdauer der Verriegelungsfunktion sowie zur sicheren Verriegelung des Waschbeckens empfiehlt sich langsame Einführung des Waschbeckens in die Dock-in Einheit.
- Beachten, dass die Dock-in Einheit im Hinblick auf erhöhte Stabilität entwickelt worden ist. Man kann sich somit auf das Waschbecken stützen, jedoch **nicht** darin hängen.

## Höhenverstellung

Die Dock-in Station kann leicht zusammen mit dem schwenkbaren Waschbecken höhenverstellt werden, wie auch im Bild gezeigt. Dafür sorgen das die Dock-in Station nach der Höhenverstellung im waagerechten Niveau ist um sicherzustellen das, dass Waschbecken handlich in die Dock-in Station eingeführt und freigemacht werden kann.

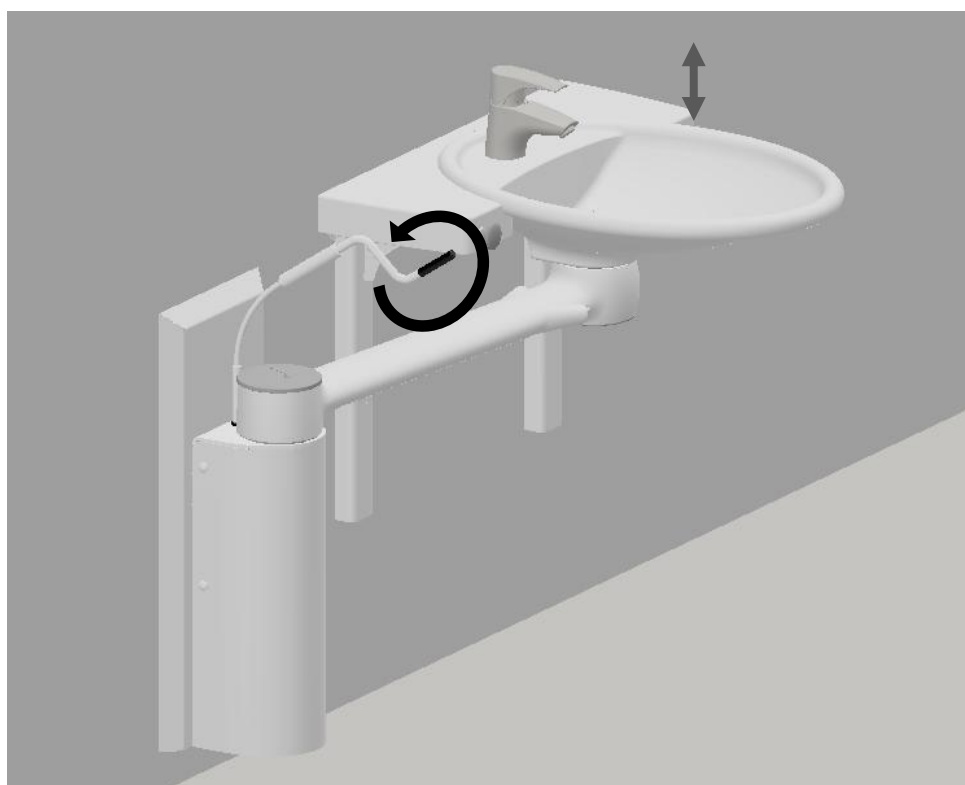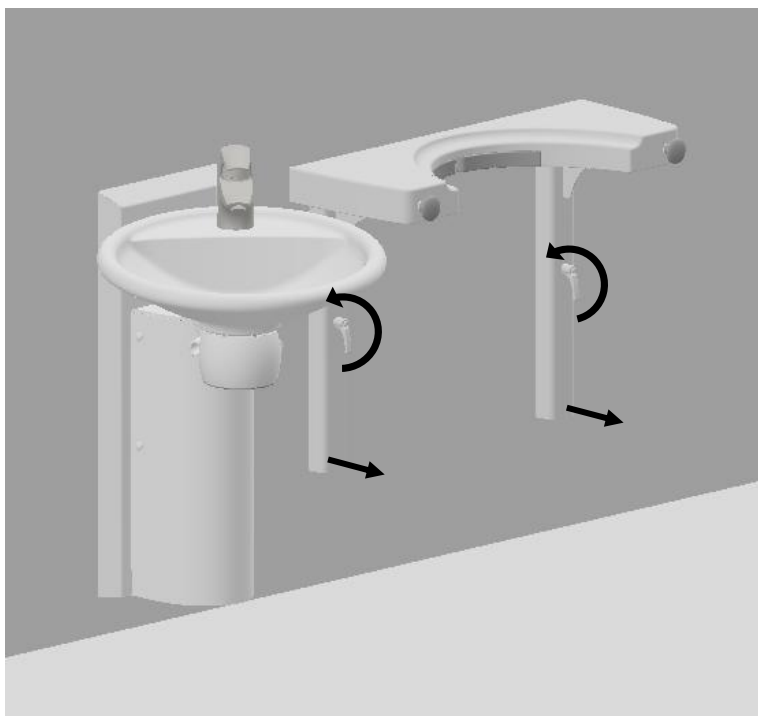

# Wartung

---

Ropox Dock-in ist wartungsfrei. Aus Sicherheitsgründen empfiehlt sich jedoch eine regelmäßige Überprüfung aller Schrauben und beweglichen Teile zur Sicherstellung, dass sie fest angezogen und die Befestigung an der Wand in Ordnung ist.

## Reinigung

Nie für die Reinigung dieses Produktes einen Hochdruckreiniger benutzen. Einfach einen weichen Lappen oder Schwamm mit Seifenwasser (pH7) von höchstens 60°C oder Haushaltsspiritus verwenden. Wird ein Spülmittel verwendet, kann die Tischplatte nach einiger Zeit fettig werden. Dies lässt sich mit Wasser und Chlor zu gleichen Teilen entfernen.

Die Dock-in Einheit regelmäßig reinigen, damit sich auf den Oberflächen kein Schmutz festsetzt.

### Wichtig:

Kein Scheuerpulver oder andere schleifende Produkte verwenden, um Risse in den Oberflächen zu vermeiden. Auch keine spitzen oder scharfen Reinigungswerkzeuge verwenden. Starke Säure oder alkalische Produkte dürfen nicht benutzt werden.



## Fehlersuche

Fehler	Mögliche Abhilfe
Das Waschbecken kann nicht verriegelt werden	Überprüfen, ob Waschbecken und Dock-in wie vorgeschrieben montiert worden sind. Sicherstellen, dass beide waagerecht und dass die Montageschrauben an der Wand befestigt sind.
Das Waschbecken ist verriegelt, kann aber nicht ausgelöst werden	Überprüfen, ob Montageschrauben im Dock-in eingeschraubt sind. Falls ja, die Schrauben lockern oder ganz entfernen.
Das Waschbecken stößt gegen Dock-in und kann somit nicht die Verriegelungsstellung erreichen	Überprüfen, ob Waschbecken und Dock-in wie vorgeschrieben montiert worden sind. Sicherstellen, dass beide waagerecht und dass die Montageschrauben an der Wand befestigt sind.

## Abfallentsorgung



Die gebrauchte Ausstattung muss gemäß nationaler Gesetzgebung entsorgt werden. Wir empfehlen Zerlegung des Produktes, damit möglichst viele Komponenten wieder verwendet werden können. Beispiel für Sortierungsgruppen: Metall und kompakter Laminat.

## Normaler Gebrauch



Temperatur: 0 °C bis 50 °C

Relative Feuchtigkeit: 5% bis 85% nicht kondensierend

## Lagerung und Transport



Zerbrechlich



Vom Wasser fernhalten




Diese Seite nach oben

# Kennzeichnung

---

## Etikett

Ropox Dock-in hat ein eigenes Etikett wie abgebildet. Dieses Etikett enthält wichtige Informationen, die bei jeder Anfrage an Lieferanten angegeben werden müssen.

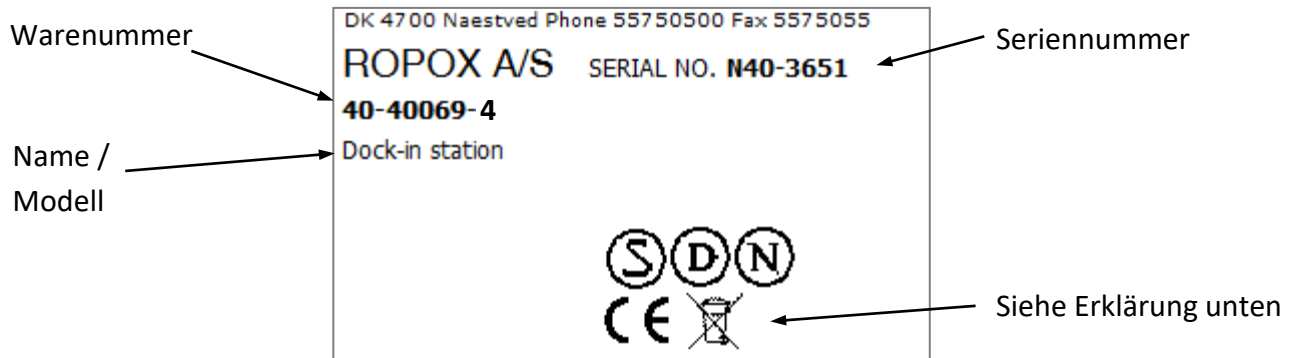

## Zeichenerklärung



Das Benutzerhandbuch vor Ingebrauchnahme durchlesen.



Abfall sortieren – wenn möglich im Hinblick auf Wiederverwendung.



CE-Kennzeichnung. Dieses Produkt entspricht den Anforderungen betreffend "General Safety and Functionality" der relevanten EU-Richtlinien und Normen.

## Übliche Ersatzteile

**40-40071-082**

**Beschlag für  
Waschbecken**



**96000177**

**Drehgriff**



# Reklamationen

---

Alle Rückfragen betreffend Reklamationen sind an den Händler zu richten, der auf dem betreffenden Markt Ropox vertritt.

Vgl. Ropox Allgemeine Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.



**Ropox A/S**

Ringstedgade 221  
DK – 4700 Naestved  
Tel.: +45 55 75 05 00  
E-mail: [info@ropox.dk](mailto:info@ropox.dk)  
[www.ropox.dk](http://www.ropox.dk)