



Adapterraahmen für Wickeltisch Medi 2

Benutzerhandbuch

Montageanleitung

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Auskünfte	3
Montageanleitung.....	5
Wartung	8
Reklamationen	9

Allgemeine Auskünfte

Produktinformation



Immer dieses Handbuch vor Montage und Ingebrauchnahme durchlesen.


Produkt : Adapterrahmen für Wickeltisch Medi 2

Hersteller : Ropox, DK-4700 Næstved, Tel. +45 55 75 05 00

Anwendungsbereich – Der Adapterrahmen kommt dort zum Einsatz, wo die Wand uneben oder schief ist, um zu vermeiden, dass der Wickeltisch bei Höhenverstellung die Wand berührt.

Warennummer

Länge des Wickeltisches	Warennummer
90 cm und 130 cm	50-50689

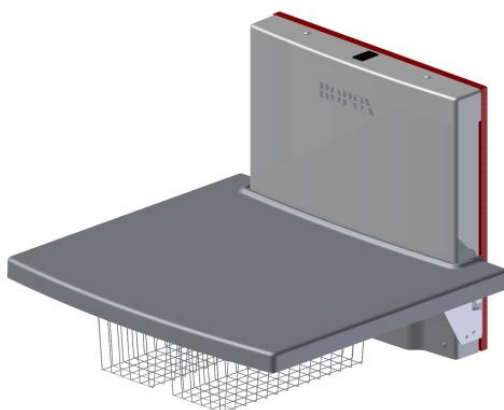

Wickeltisch Medi 2, 90 cm



Wickeltisch Medi 2, 130 cm

Allgemeine Auskünfte

Technische Daten

Material – Rahmen: Geschweißte Stahlrohre und Stahlblech St.37,
Oberflächenbehandlung: Pulverlackiert, weiß RAL 9010 matt, Chromat


Vor Ingebrauchnahme

Vor Ingebrauchnahme sicherstellen, dass die Montageanleitung befolgt wurde und dass alle Bolzen und Muttern angezogen sind.


Montageanleitung

Wichtige Auskünfte vor Montage

Maßskizzen der Wickeltische mit Adapterrahmen.

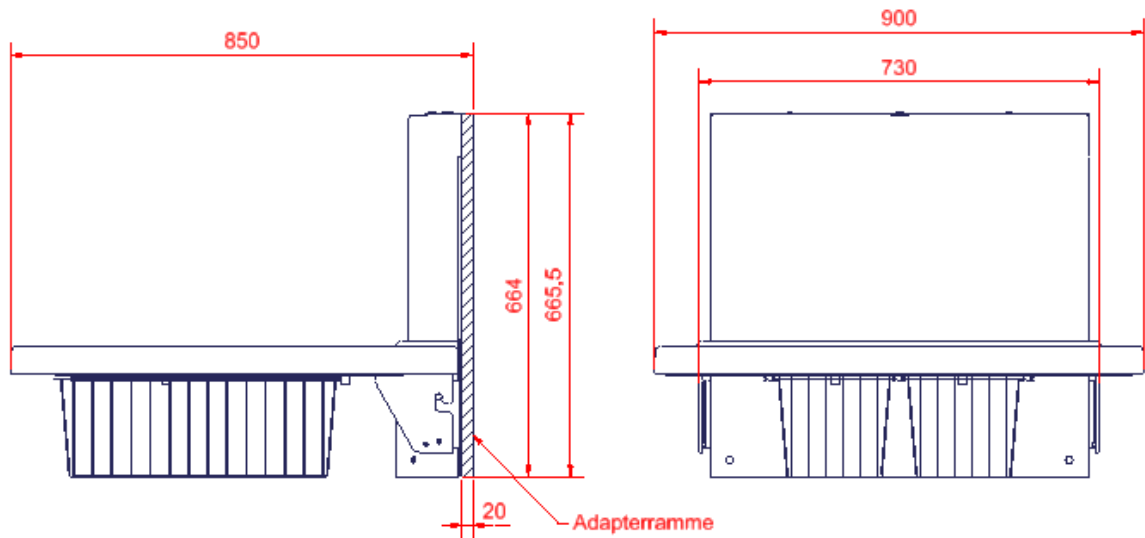

Wickeltisch Medi 2, 90 cm

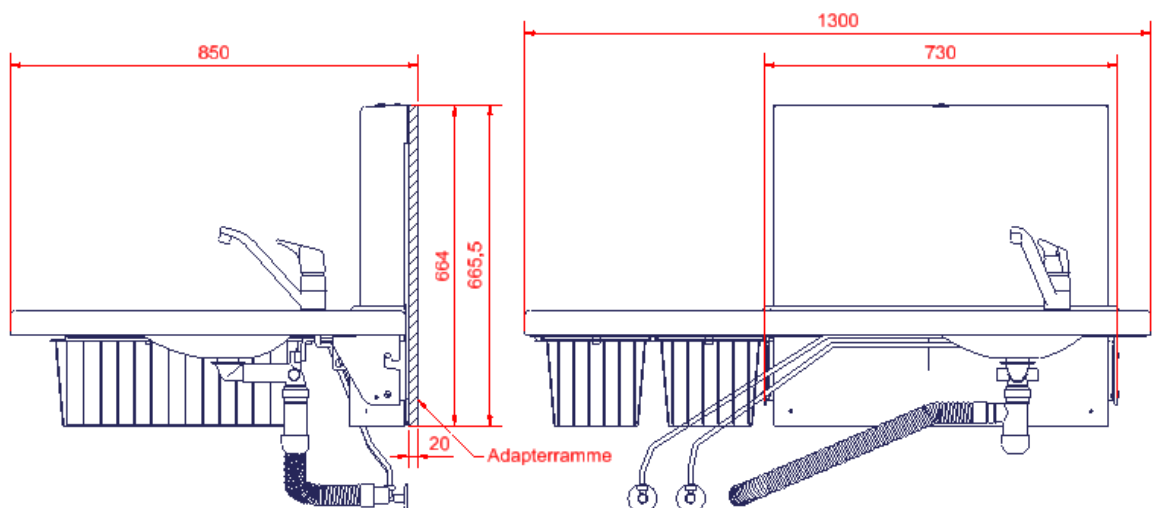


Wickeltisch Medi 2, 130 cm

Montageanleitung

Zu dieser Montageanleitung gehört:



Adapterrahmen x1

Maßskizze des Adapterrahmens:

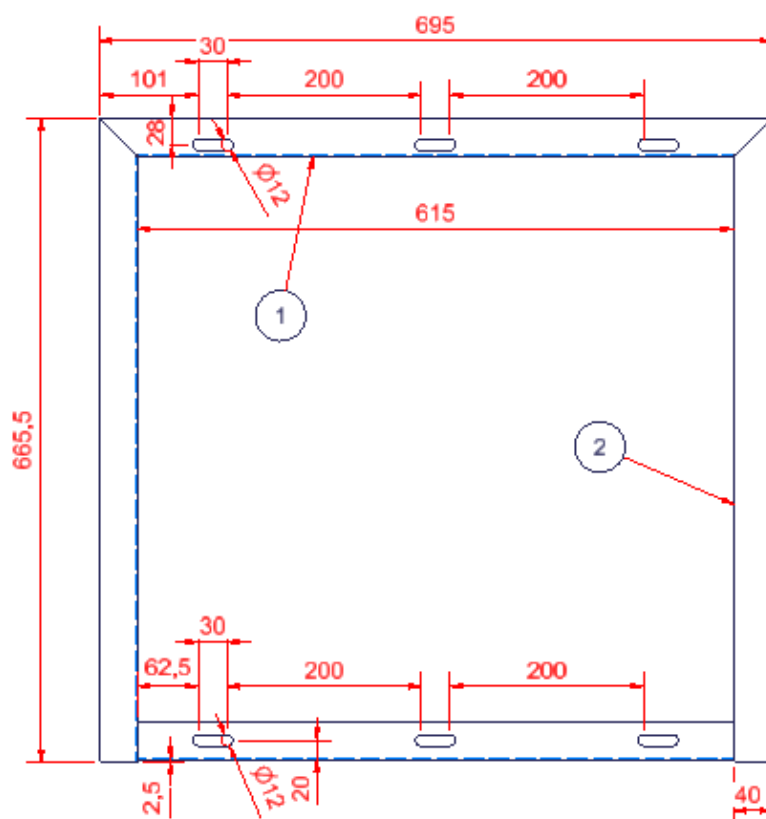

Montageanleitung

Die Montageanleitung des Wickeltisches Medi 2 befolgen. Nach Bohrung der Löcher in der Wand, den Adapterrahmen hinter dem Wickeltisch anbringen. Danach den Wickeltisch und den Adapterrahmen an der Wand mit Bolzen befestigen

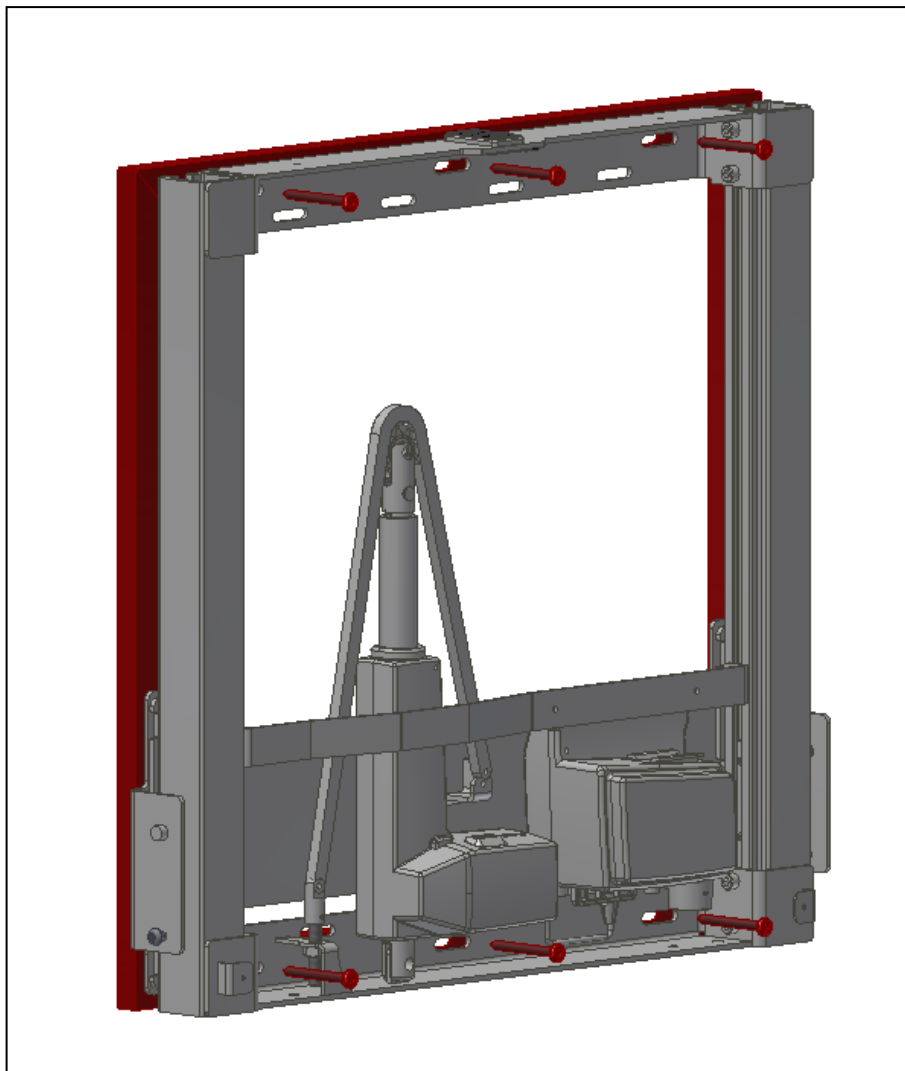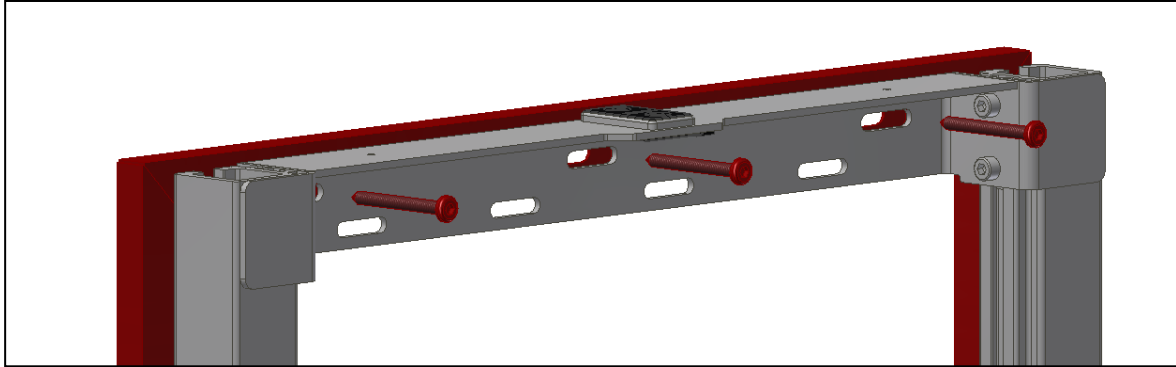



Ropox empfiehlt eine Funktionsprüfung sowie das Nachziehen aller Bolzen und Muttern einmal jährlich.

Bei Fehlern oder Mängeln möglichst bald mit Ropox Kontakt aufnehmen. Der Wickeltisch darf erst nach Abhilfe des Problems wieder verwendet werden.

!! Die Wartung des Wickeltisches darf nur von kompetentem Fachpersonal durchgeführt werden !!

Möchten Sie diese Funktionsprüfung nicht selber durchführen, kann mit Ropox der Besuch eines Servicetechnikers verabredet werden. Siehe Kontaktauskünfte am Ende dieser Anleitung.

Reklamationen

Bitte siehe Allgemeine Verkaufs- und Lieferungsbedingungen auf www.ropox.com



Ropox A/S

Ringstedgade 221

DK – 4700 Naestved

Tel.: +45 55 75 05 00

E-mail: info@ropox.dk

www.ropox.de