



Betjeningsholder til **Toiletløfter**

Brugermanual

40-40453

TF 200.02.0106_dk / 21-11-2025

Indhold

Anvendelse	3
Komponentliste.....	3
Højre eller venstre vendt	3
Montageanvisning	4

Anvendelse

Betjeningsholder til Ropox Toiletløfter er et tilbehørsbeslag, som er beregnet til at holde betjeningen til Ropox Toiletløfter på plads, så man kan aktivere den mens man sidder på toilettet. Betjeningsholderen er nem at montere, og kan holde en betjening fast med eller uden en låseskrue. Betjeningen kan fjernes fra holderen, hvis man har behov for at aktivere toiletløfteren på afstand.

Komponentliste




1x Betjeningsholder
40-40453

Inkl.
INSEX bolt M4x16
95010416




Højre eller venstre vendt

Betjeningsholderen bliver leveret til montage på venstre toiletstøtte, men kan vendes rundt, så den passer til den højre toiletstøtte i stedet. Dette gøres ved at løsne skruen i bøsningen, og dreje delen med plastikgrebet rundt. Herefter spændes den fast igen med skruen. Der bruges en 2mm unbrakonøgle (medfølger ikke).

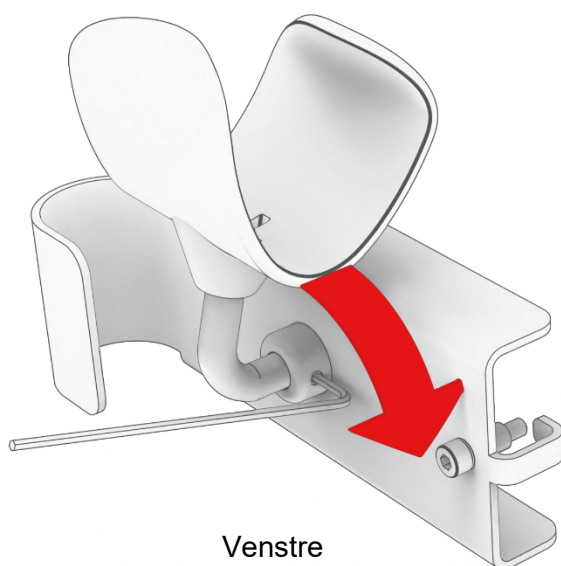


Venstre

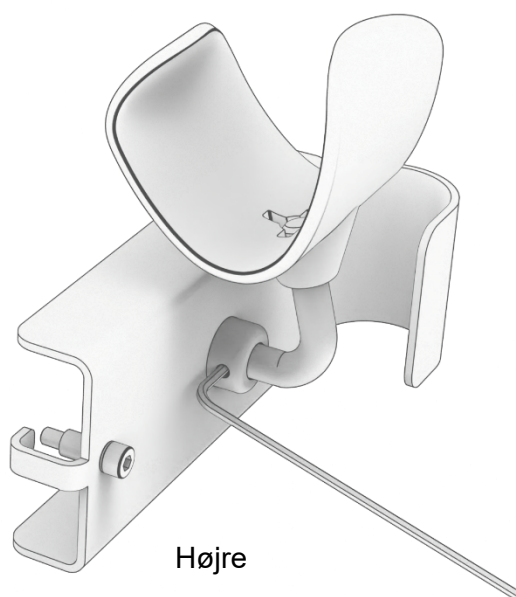


Højre

Montageanvisning


- a) Find ud af, hvor på toiletstøtten, at betjeningsholderen sidder bedst for brugeren.
Betjeningsholderen kan sidde langs hele længden af gummigrebet på toiletstøtten.

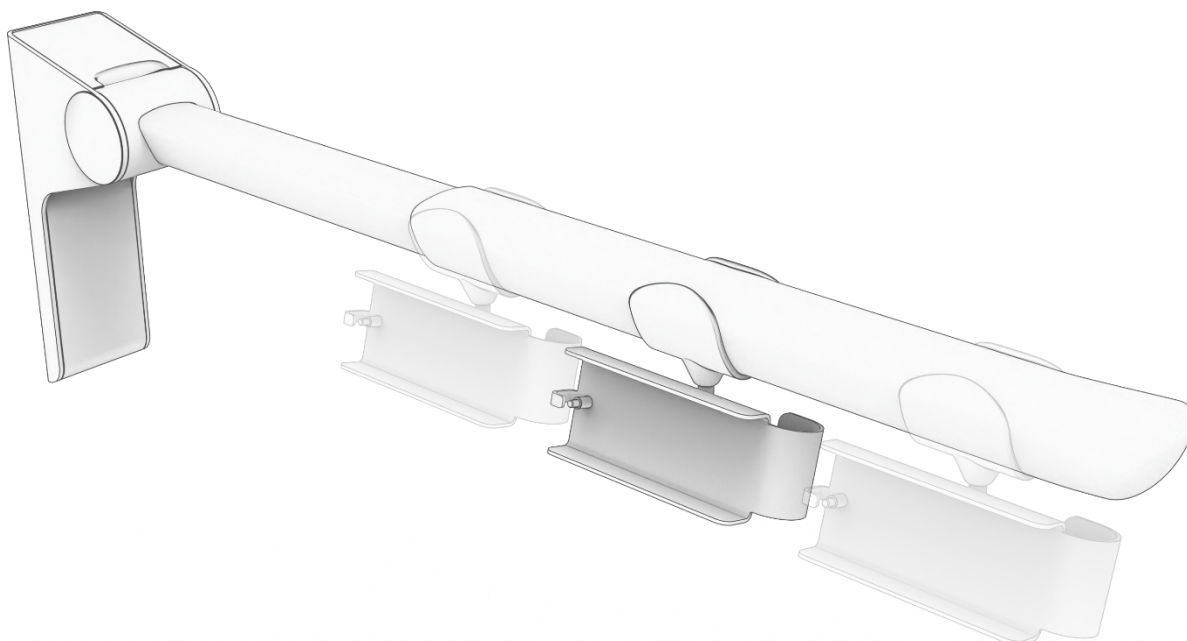


- b) Fjern beskyttelsespapiret fra tapen på plastikgrebet, og sæt betjeningsholderen fast.

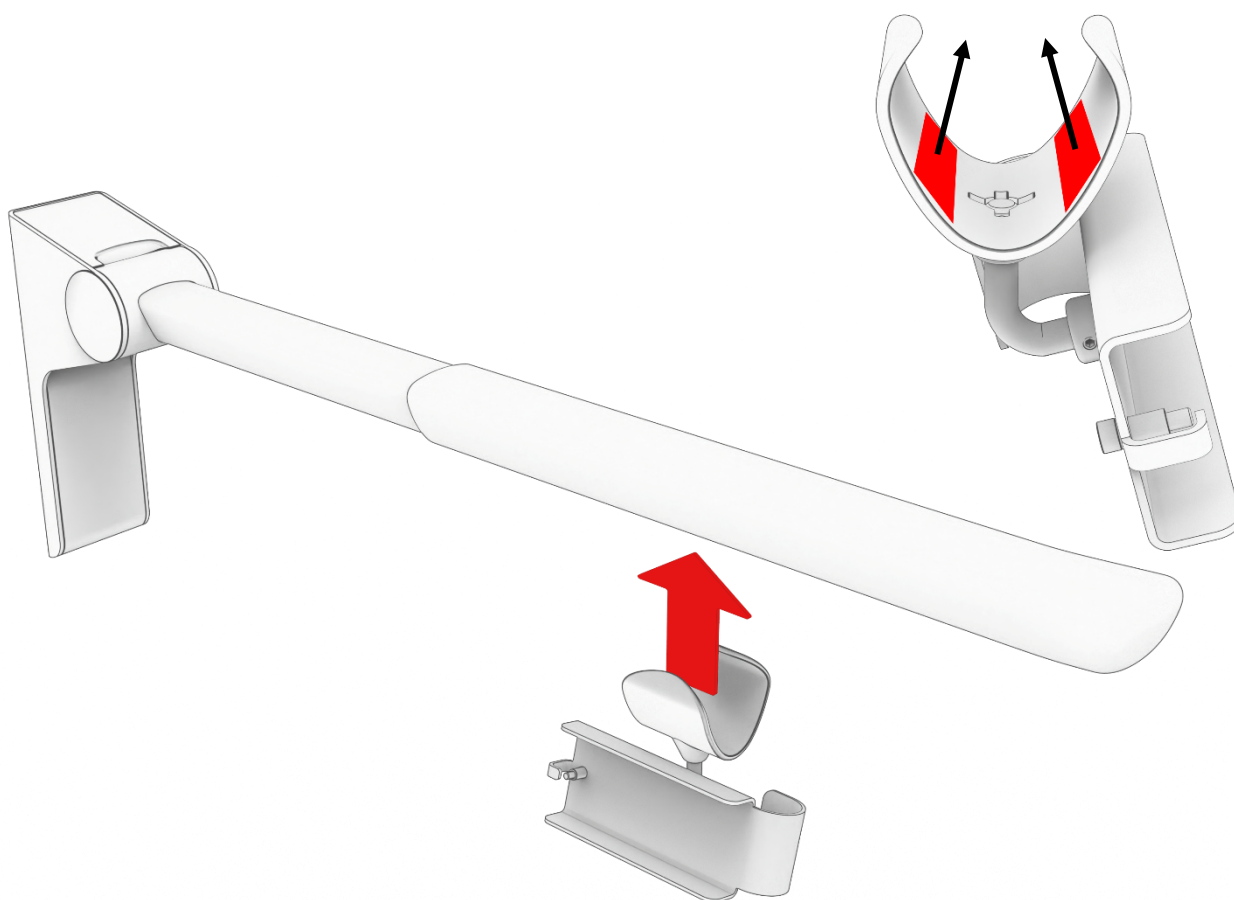

- c) Skru låseskruen ud af betjeningsholderen, så betjeningen kan komme på. Denne er spændt med håndkraft. Smid ikke skruen væk endnu!

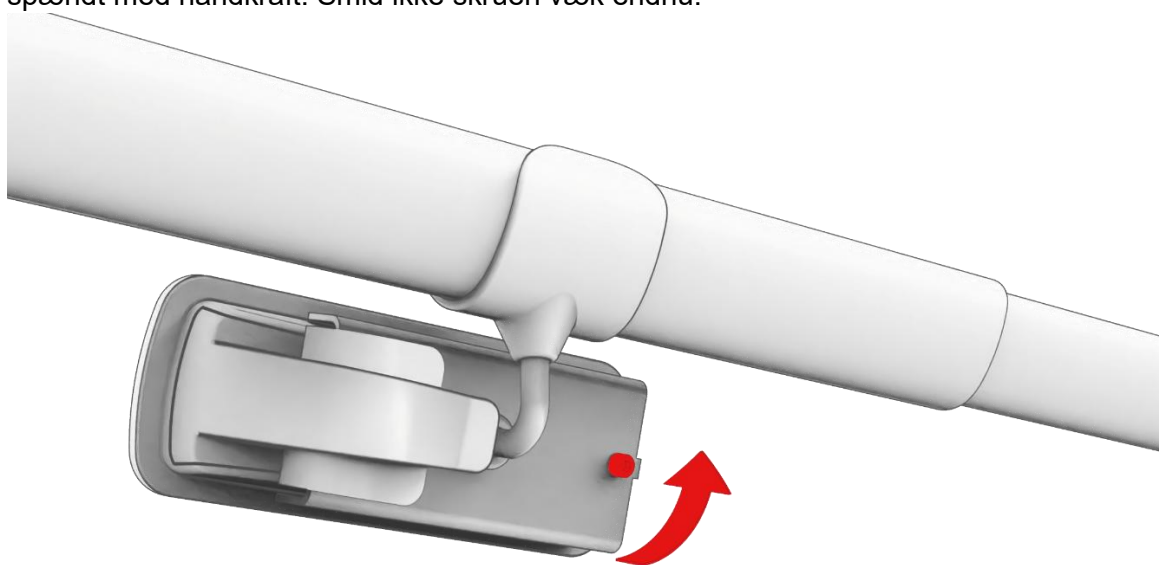

- d) Betjeningen kan nu tages af og sættes på betjeningsholderen efter behov.

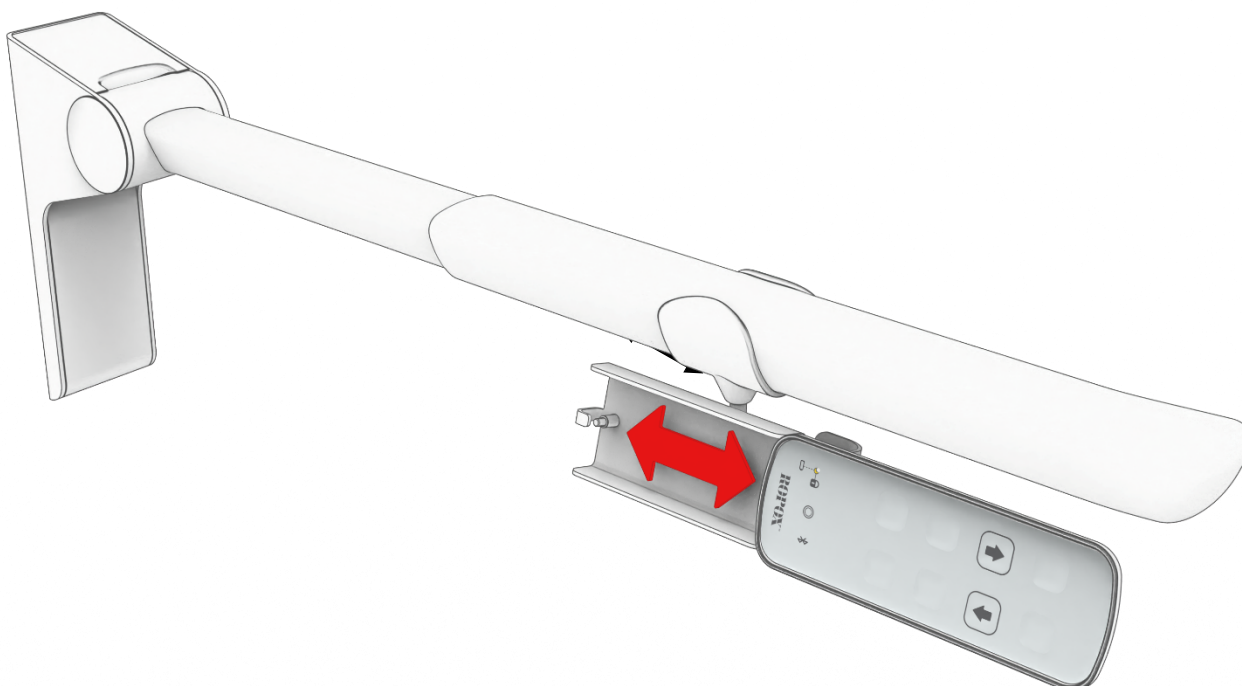

- e) Hvis der er behov for det, kan betjeningen låses fast til betjeningsholderen. Det gøres ved at sætte betjeningen på holderen, og skrue låseskrue fast i hullet.

