

ROPOX™

BETTER WAYS TO BETTER DAYS

- A PART OF AddLife®



Fast betjening til **Toiletløfter**

Brugermanual


40-45070

Montageanvisning

a. Placer dækkappen på gulvet tæt på løfteenheden. Visse dele af denne montering kan være nemmere, hvis løfteenheden først er kørt i top. Gør dette, hvis det er muligt.




b. Monter betjeningsafdækning i de for-borede huller i toppen af kappen med de medfølgende M3 skruer + møtrikker.

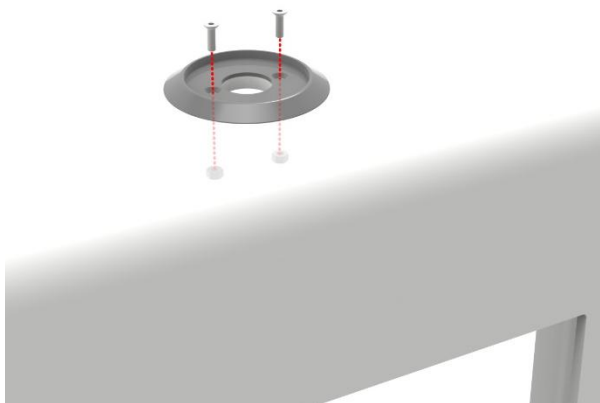



c. Fjern folien fra den dobbeltklæbende tape bag på tryk-betjeningen og indfør kablet fra oven. Orienter trykknappen, så pile og logo sidder lige ift. kappens for- og bagkant og tryk betjeningen fast i betjeningsafdækningen.



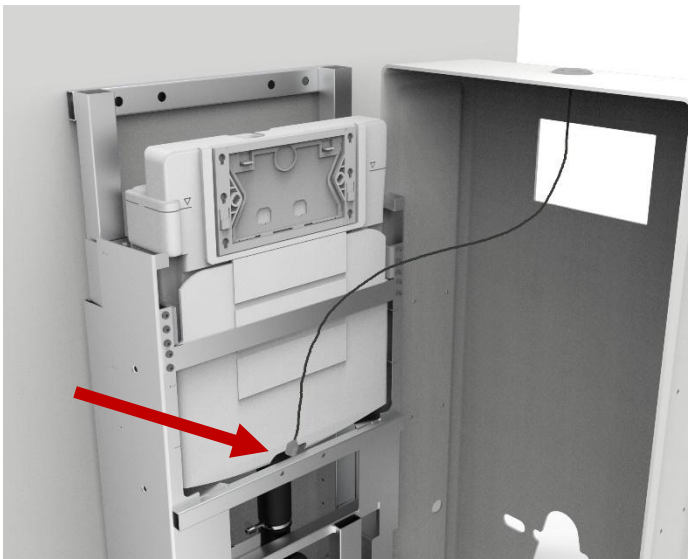

d. Før kablet ned langs forsiden af toiletløfteren og ind bag ved afstivningen i bunden af cisternen.

e. Afmonter kontrolboksen og tilslut stikket i porten for håndbetjening. Remonter kontrolboksen i holderen igen.

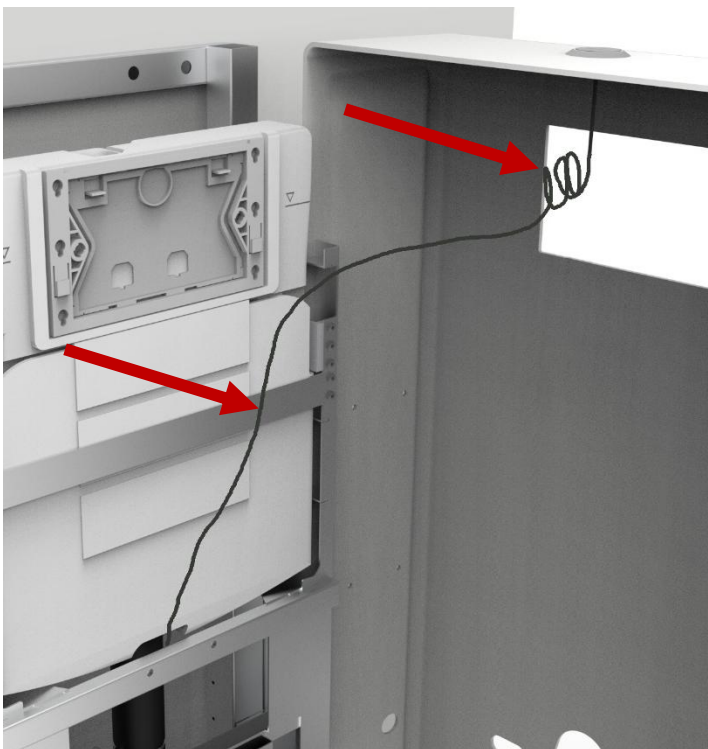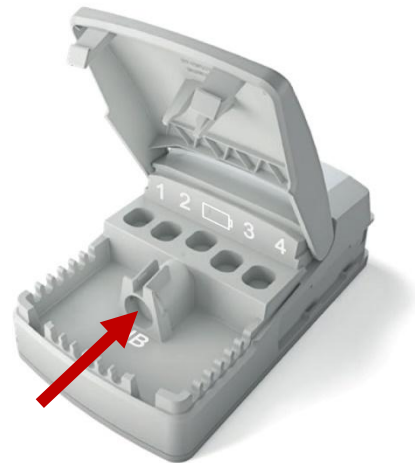

f. Strip betjeningskablet fast til mavebæltet foran cisternen. Rul den overflødige mængde kabel sammen og strips det til en samlet sløjfe så tæt på toppen af dækkappen som muligt.

g. Test at trykknappen fungerer. Hvis ikke den gør, tjek da alle forbindelser og at produktet modtager strøm. Monter herefter dækkappen som anvist i brugermanualen for toiletløfteren afsnit 4.1.5