


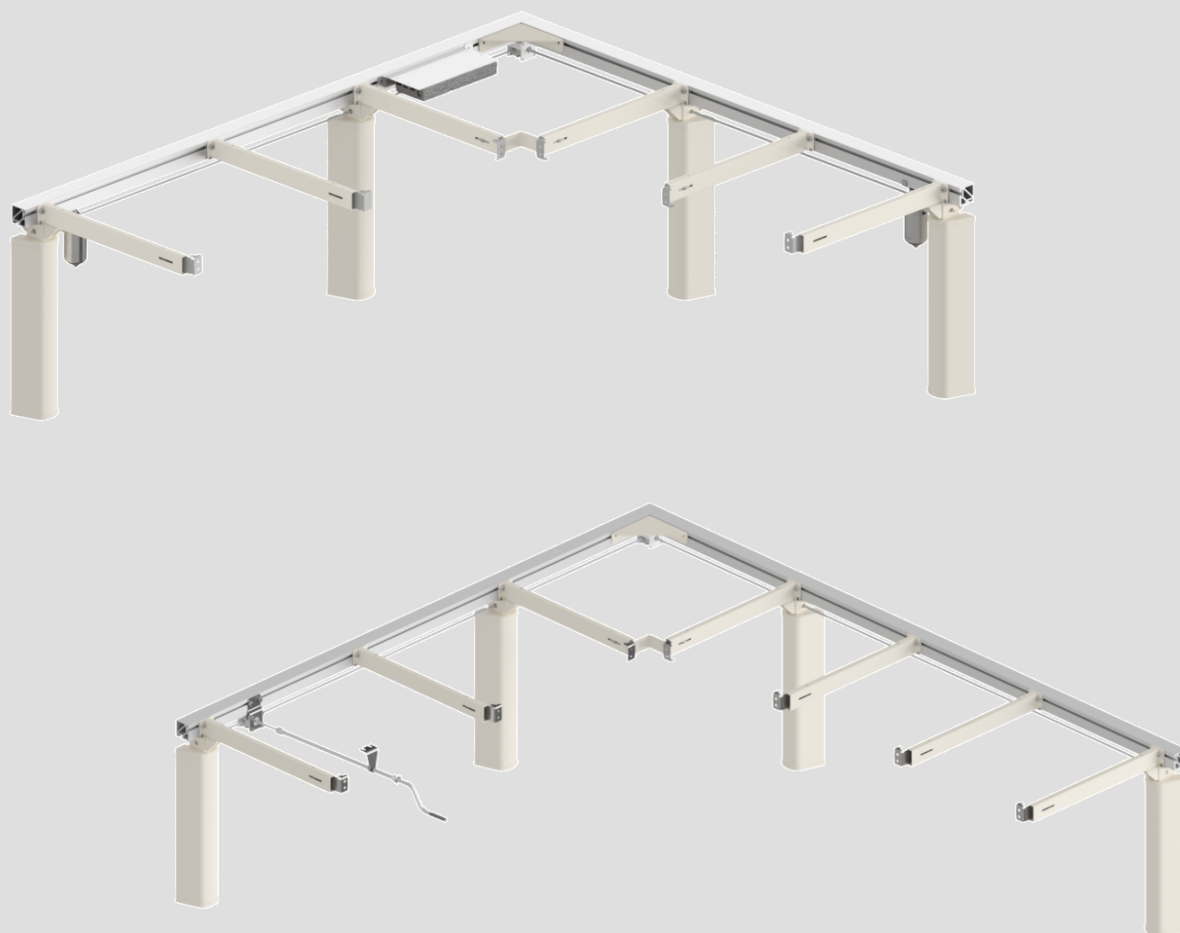

Flexi Corner manuel og elektrisk

Montagevejledning, Tillæg

1. Introduktion


Enhver projektering, montering og normal brug, må kun udføres såfremt FlexiElectric/FlexiManual manualen benyttes sammen med denne manual

Alle øvrige informationer herunder anvendelse samt tekniske data findes i Flexi manualen


Producent:

Ropox A/S, DK-4700 Næstved, Tlf.: +45 55 75 05 00
E-mail: info@ropox.dk, www.ropox.dk

- Det første ben skydes på den ene alu-bjælke, og 6-kant akslen føres igennem hullet i benet. Skruerne spændes løst.

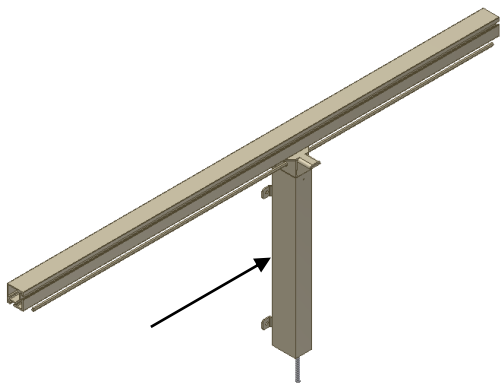


- Knægten skydes ind i alu-bjælken og SKAL placeres over benet. Skruerne spændes løst.

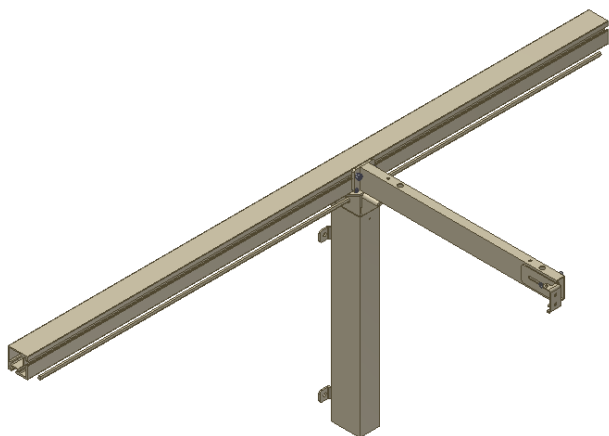


Elektrisk

- Møtrikken på motorbeslaget skydes ind i alu-bjælken på undersiden og 6 kant akslen føres igennem motoren. Skruerne spændes løst.

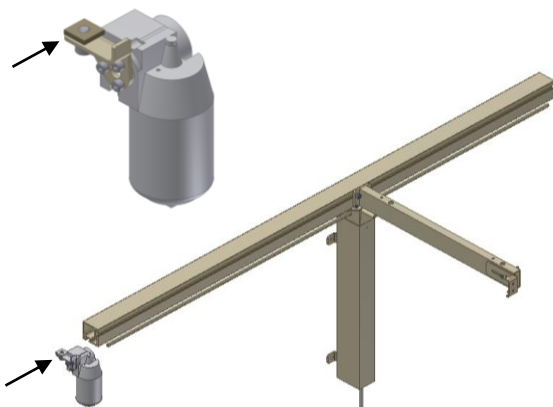

Elektrisk


- Motoren placeres ved siden af benet, og skruen spændes løst.

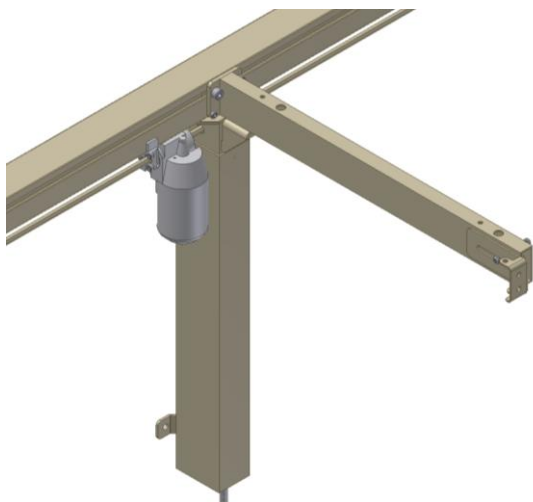

Manuel




- Møtrikken på beslaget for frontudtaget skydes ind i alu-bjælken på forsiden, og 6-kant akslen føres igennem gearhuset. Skruerne spændes løst.

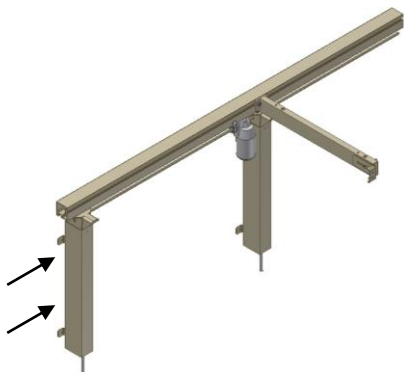


- Det næste ben skydes ind i alu-bjælken. Skruerne spændes løst.




- Endnu en knægt placeres over det nye ben. Hvis der skal anvendes ekstra knægte mellem de to viste, skal disse skydes ind forinden. Skruerne spændes løst.

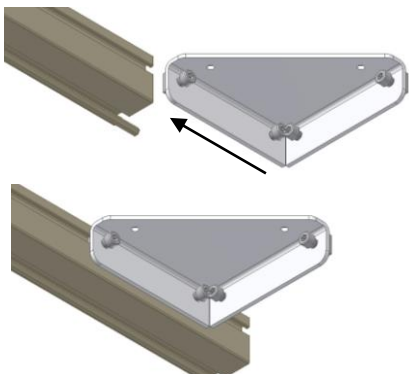


- Vinkelbeslagets to møtrikker skydes ind i alu-bjælken. !! Skruerne spændes løst!!

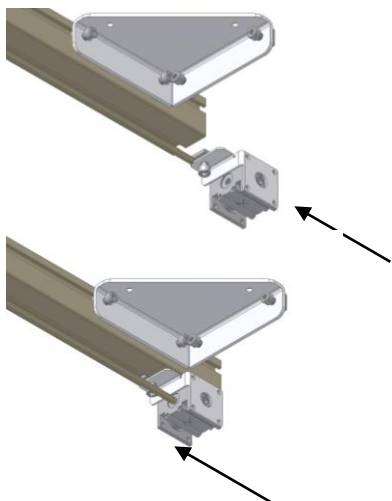

- Vinkel-gearhusets møtrik skydes ind i alu-bjælken.
Vigtigt!! Vær opmærksom på, at gearet vender som på billederne!! 6-kant akslen føres ind i gearhuset.
Skruerne spændes løst.

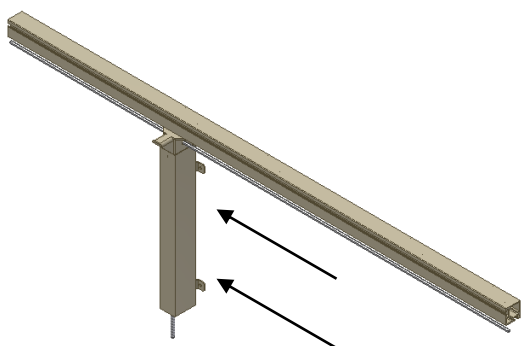


- Nu samles den anden side ud fra samme princip.
Vent med at spænde noget, til hele stellet er samlet.
Ben placeres.

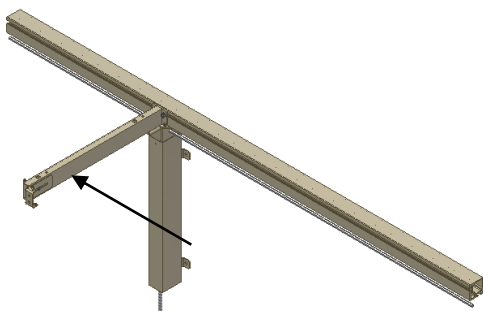


- Knægt placeres.


Elektrisk

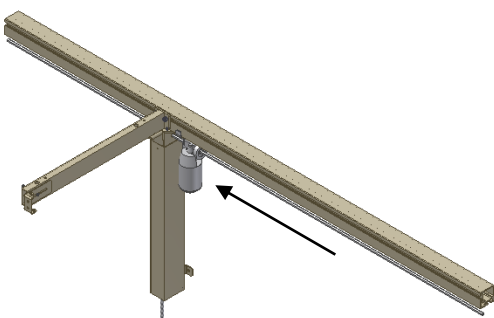


- Motor placeres.

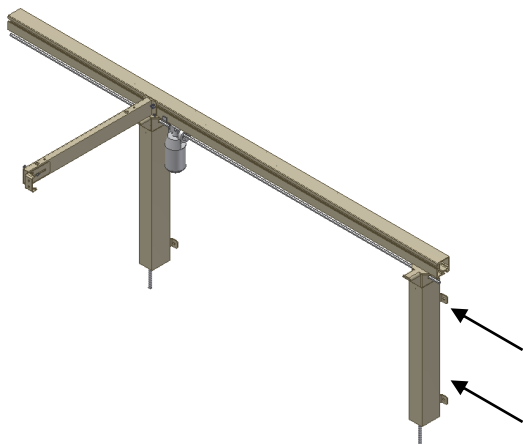


- Ben placeres.

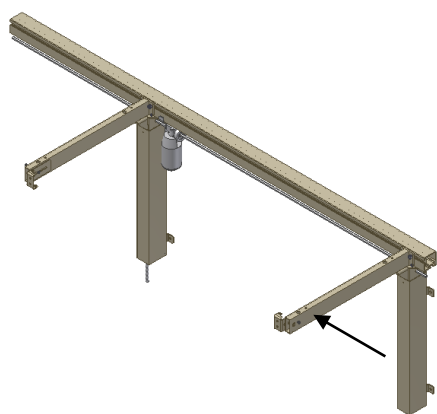


- Yderknægt placeres.

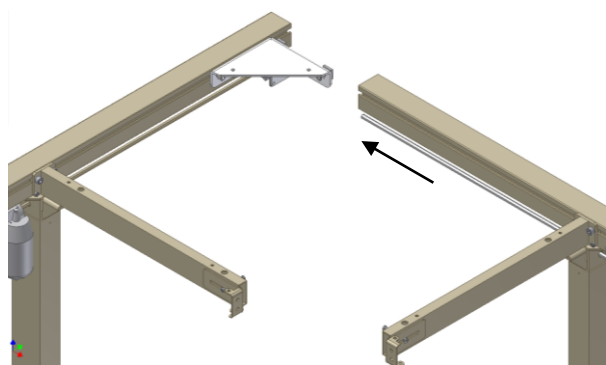


- De to stel samles nu i vinkelbeslaget. Sørg for at begge 6-kant aksler er helt i bund i gearhuset.

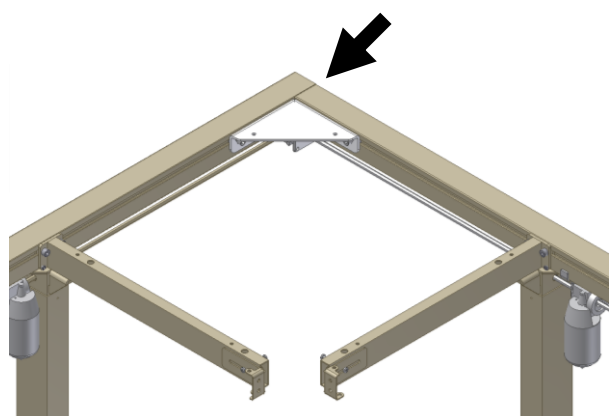

- Alu-profilerne placeres, så de flugter i hjørnet


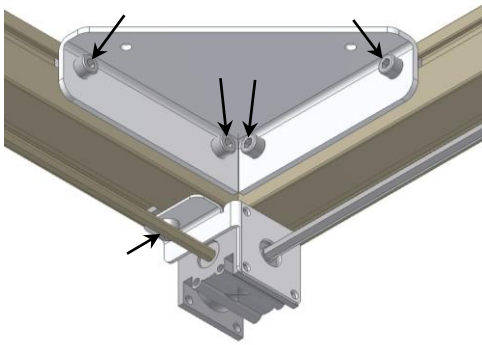


- De 4 skruer i vinkelbeslaget spændes samt den ene skrue i gearhusets beslag.

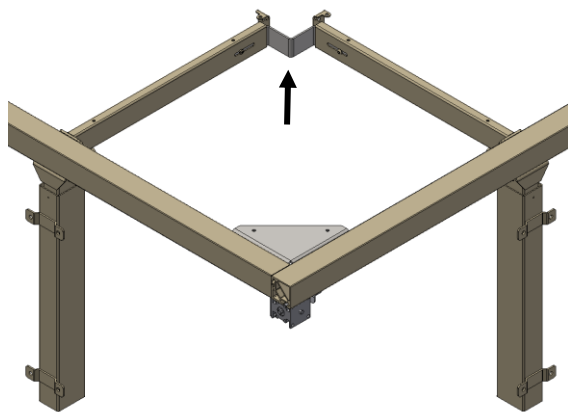

- Samlebeslaget til knægtene monteres på de to knægte i stallets hjørne. Flyt benene fra side til side indtil knægtene passer til beslaget som billedet viser. De to skruer spændes ind i knægten.


- Standardmål for placering af ben i hjørnet er vist. Disse kan justeres op til +30 mm.

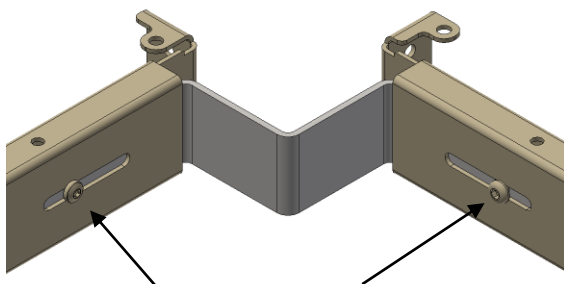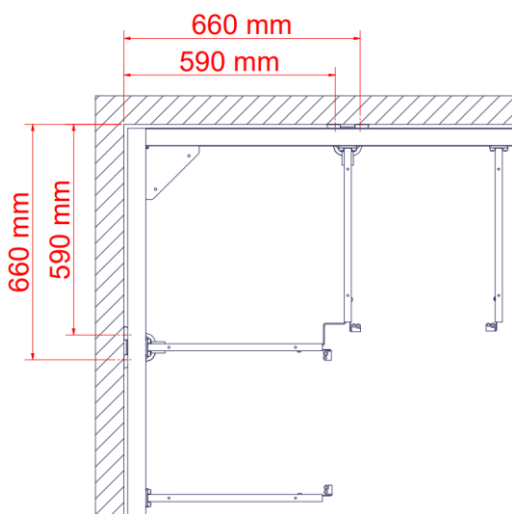

- De 2 skruer fastspændes.



- Når alle ben og knægte er rettet ind og placeret i den ønsket position, spændes alle skruer!

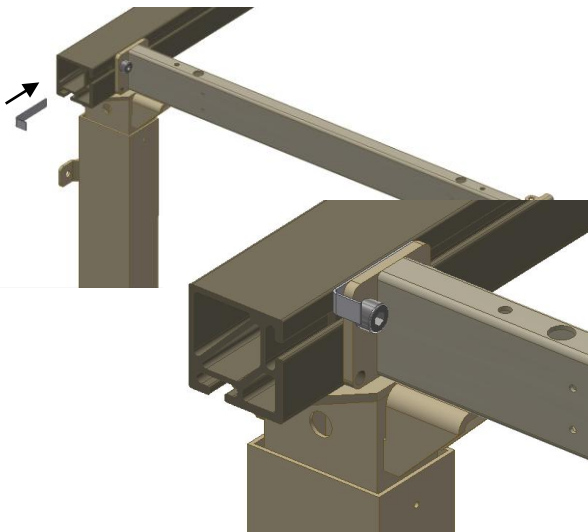

- Hvis knægten ikke er i vatter men peger opad, kan det afhjælpes med at montere medfølgende vinkel imellem knægte og aluprofilet!

Inden ibrugtagning følges anvisningerne i Flexi manualen!



ROPOX A/S

Ringstedgade 221
DK – 4700 Næstved
Tel.: +45 55 75 05 00
E-mail: info@ropox.dk
www.ropox.dk