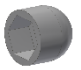

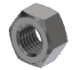


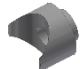

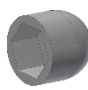
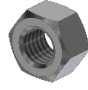


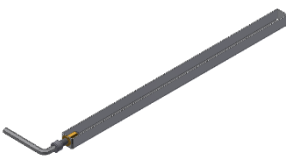


Nachträgliche Montage von Schutzgitter für Vario und Mobilio

Montage des Schutzgitters

Komponentenliste

4x  M8	2x  M8x45	2x  M8
4x  M8	2x 	2x 
2x 	2x  M12	2x  M12
1x 	1-2x (Vario) 	1x (Vario) 

Montage des Schutzgitters

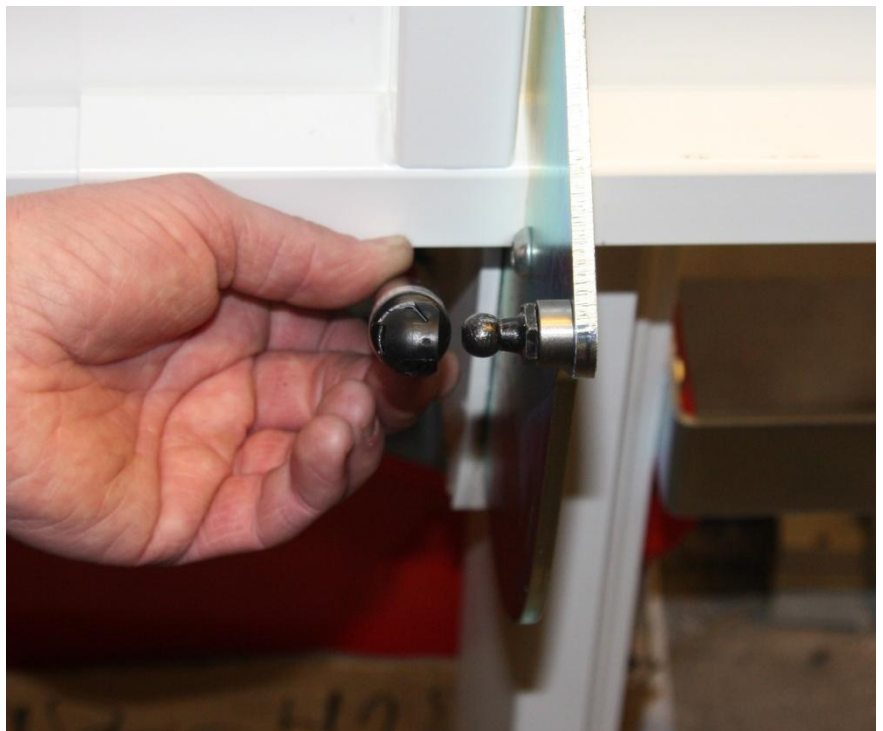
Vario

Zuerst die Gasfedern auswechseln. Die Gasfeder durch Lockern der kleinen Federplatte oben an der Feder demontieren. Nicht ganz entfernen, nur ein wenig lockern, so dass die Gasfeder mit einem großen Schraubenzieher herausgenommen werden kann.



Vario

Die Gasfeder ist vom Kugelgelenk entfernt worden.



Vario

Am anderen Ende der Gasfed er die kleine Federplatte lockern, so dass die Gasfeder völlig weggezogen werden kann.



Vario

Die neue Gasfeder an einem Ende aufdrücken.



Vario

Hilfswerkzeug an der Gasfeder anbringen und Bolzen M10x40 einschrauben.



Vario

Den Bolzen so anziehen, dass die Gasfeder zusammengedrückt wird. So anziehen, dass sie am Kugelgelenk gedrückt werden kann.



