
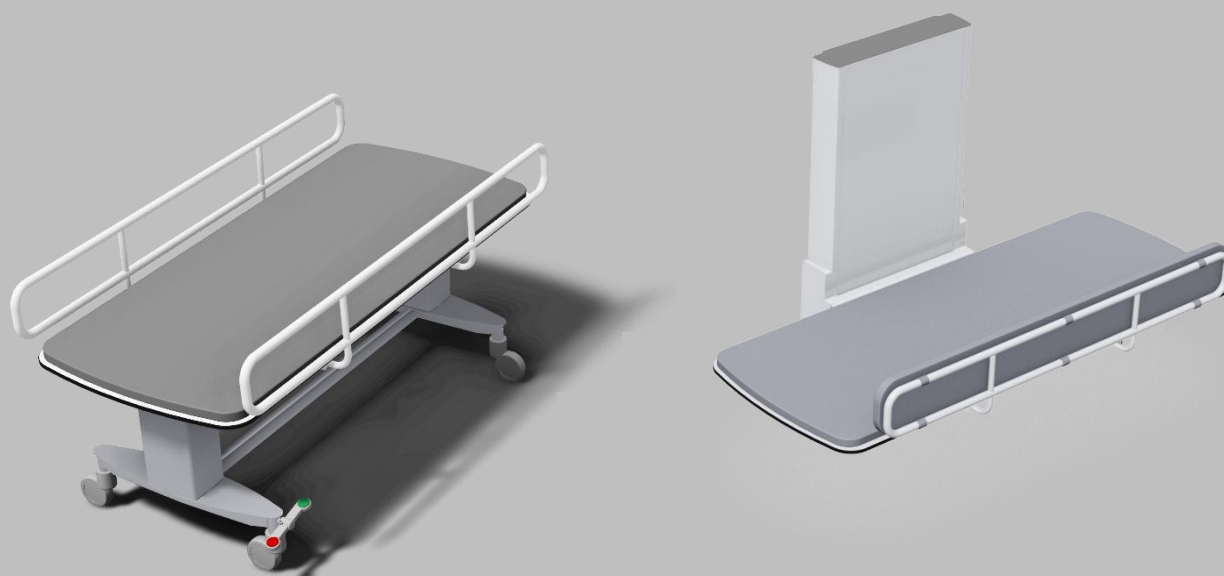


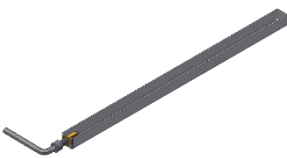

Eftermontering af sengehest på Vario og Mobilio

Montage af sengehest

Komponentliste

4x  M8	2x  M8x45	2x  M8
4x  M8	2x  M8	2x  M8
2x  M12	2x  M12	2x  M12
1x 	1-2x (Vario) 	1x (Vario) 

Montering af sengehest


Vario

Start med at udskifte gasfjedrene, hvis der følger nye med. Hvis der kun følger en med, er det den med laveste kraft (N) der skal skiftes. Afmonter gasfjeder ved at løsne lille fjeder plade i toppen af gasfjeder. Den skal ikke helt af kun løsnes lidt og så kan gasfjeder vippes ud med en stor skruetrækker.



Vario

Her er gasfjeder vippet ud af kugleled.

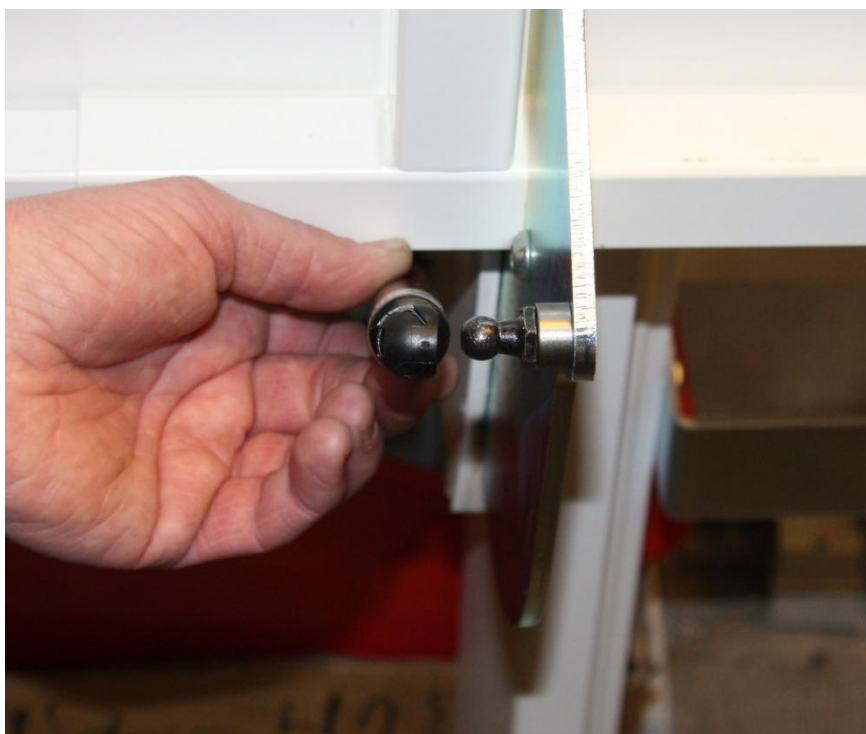

Vario

I modsatte ende af gasfjeder løsnes den lille fjeder plade også lidt, så gasfjeder kan trækkes helt af.



Vario

Ny gasfjeder trykkes på i den ene ende.



Vario

Hjælpe værktøj sættes uden på gasfjeder og bolt M10x40 skrues i.



Vario

Spænd bolten så gasfjeder bliver trykket sammen. Den skal spændes så den lige er til at trykke på kuglehovedet.



