
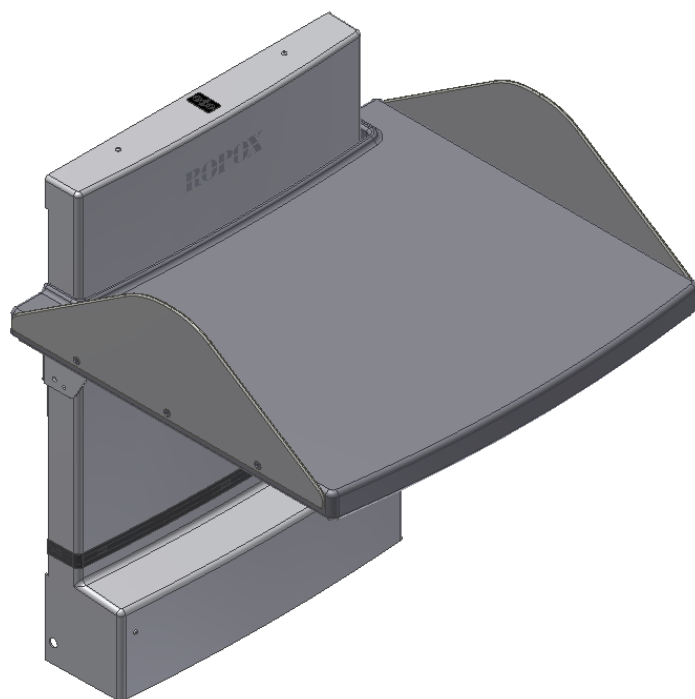


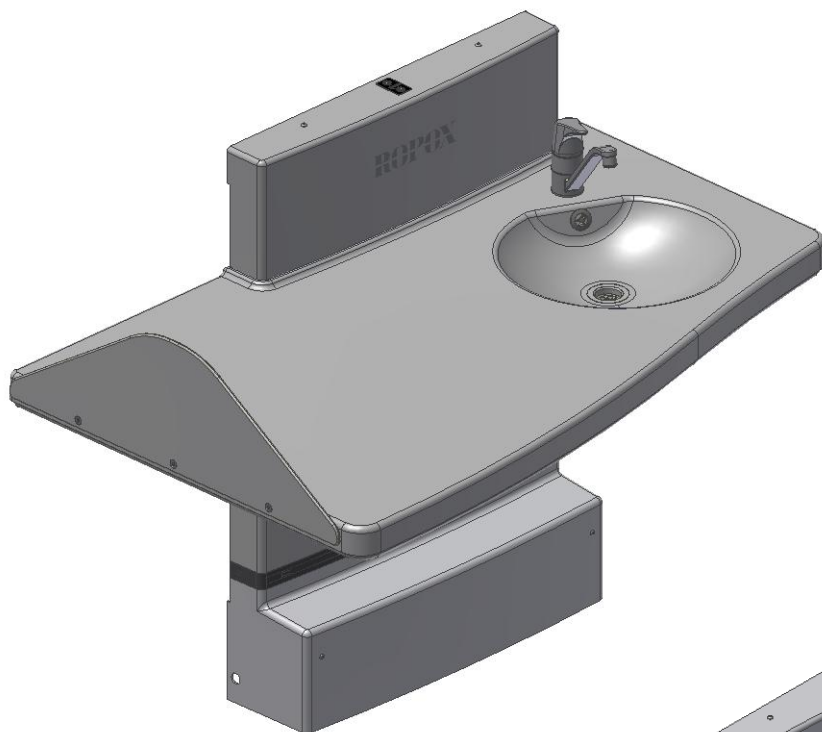

Ropox Sideafdækning, fast

Brugermanual

Montagevejledning

Denne manual skal altid ledsage produktet

Produktinformation	3
Varenummer:	3
Tekniske data	4
Montagevejledning	5
Vedligeholdelse	8
Rengøring.....	8
Reklamationer	9



Det er vigtigt at læse denne manual inden montage og ibrugtagning.



Produkt : Ropox Sideafdækninger, faste

Producent : Ropox, DK-4700 Næstved, Tel. +45 55 75 05 00

Anvendelsesområde – Ropox Sideafdækninger anvendes sammen med Ropox Pusleborde (Medi og Maxi) og sikre barnet på bordet, samt at der ikke kan komme ting eller personer i klemme ved højdejustering af puslebordet.

Varenummer:

Størrelse af sideafdækning:	Varenr.
75,4 cm x 23,4 cm	50-50688

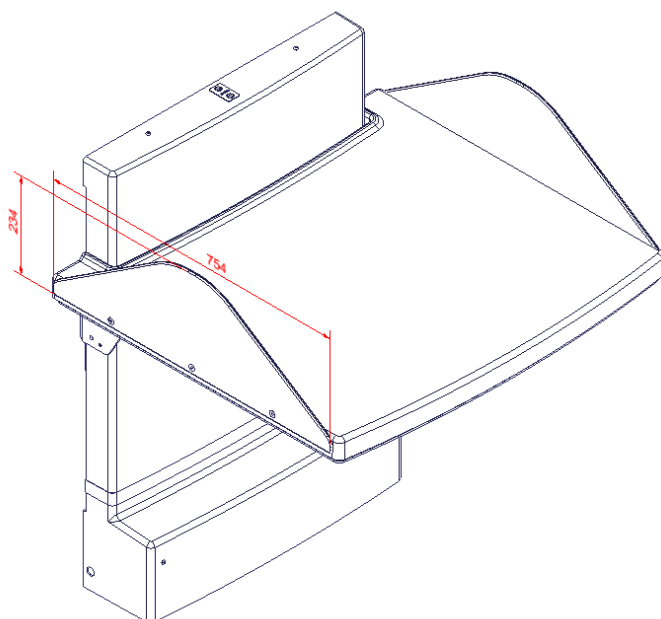
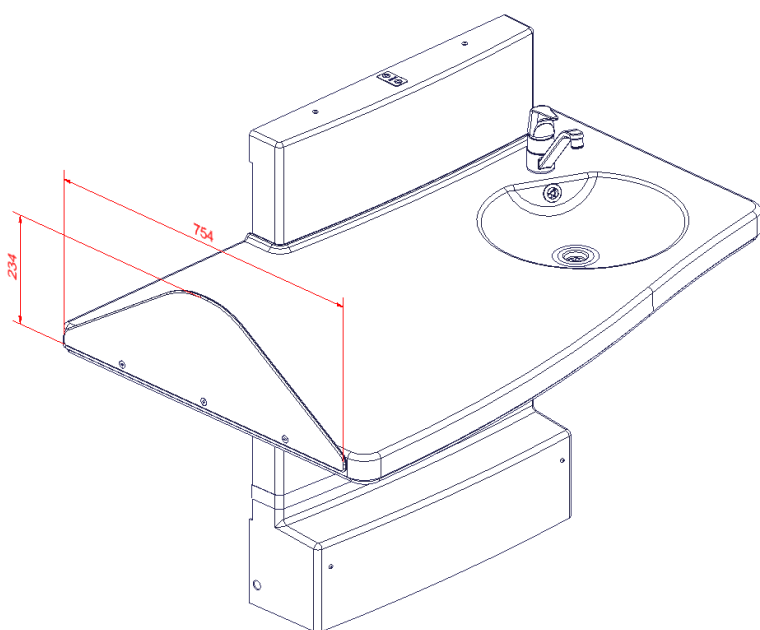


Generelle oplysninger

Tekniske data


Materiale – beslag: Hvid pom

Materiale - plade: Hvid 8 mm kompakt-laminat, med sort kant

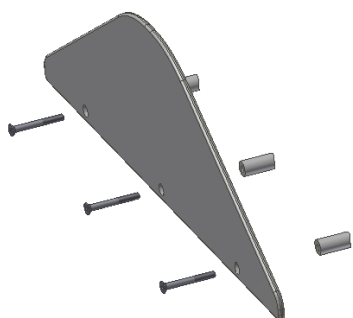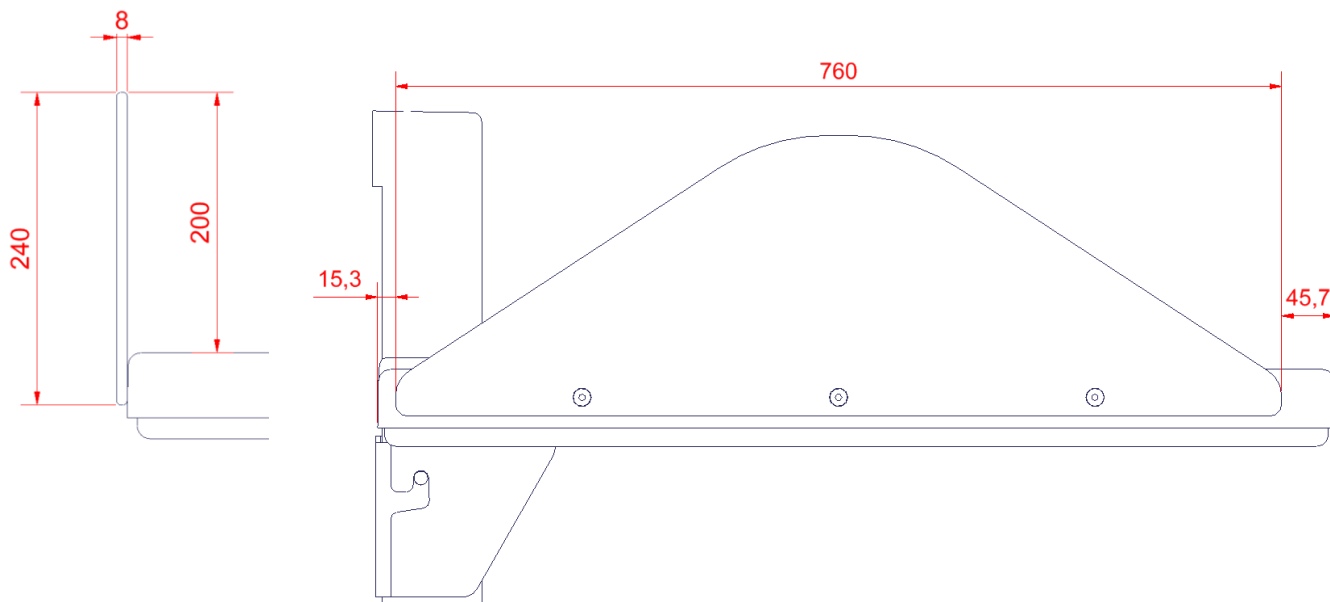


Til denne montagevejledning medfølger:


Bøsning	50*50670-143	x3
Plade	50*50670-142	x1
Bolt	95020880	x3

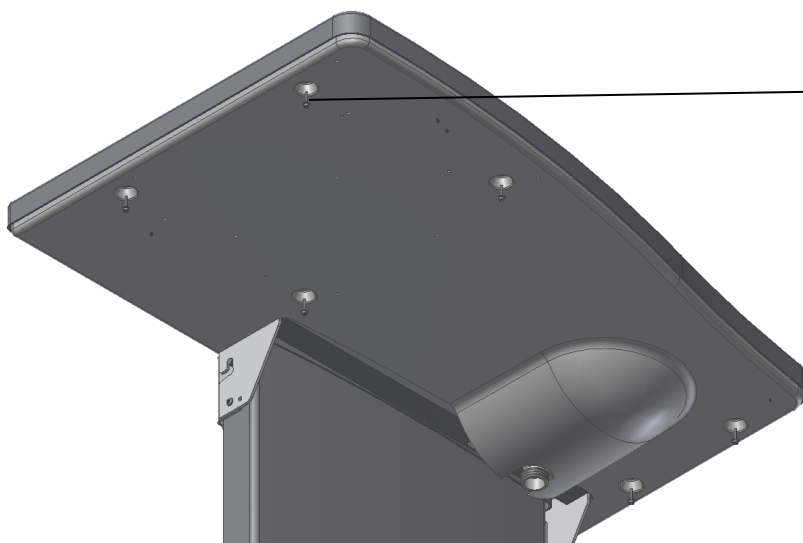




1: Afmonter de 6 skruer, som holder bundpladen fast til bordpladen.

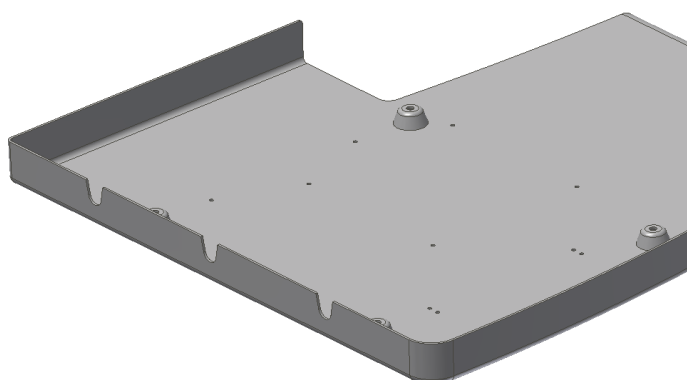


2: Der udskæres 3 indhak i bundpladen ud fra følgende mål

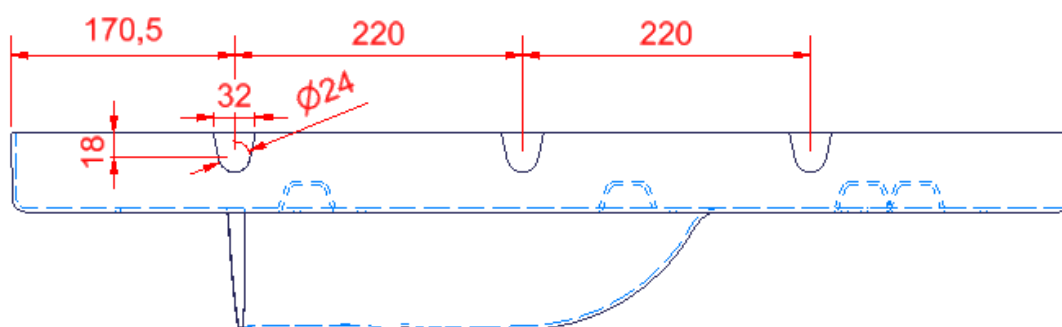


3: Der bores 3 huller i bordpladen ud fra følgende mål

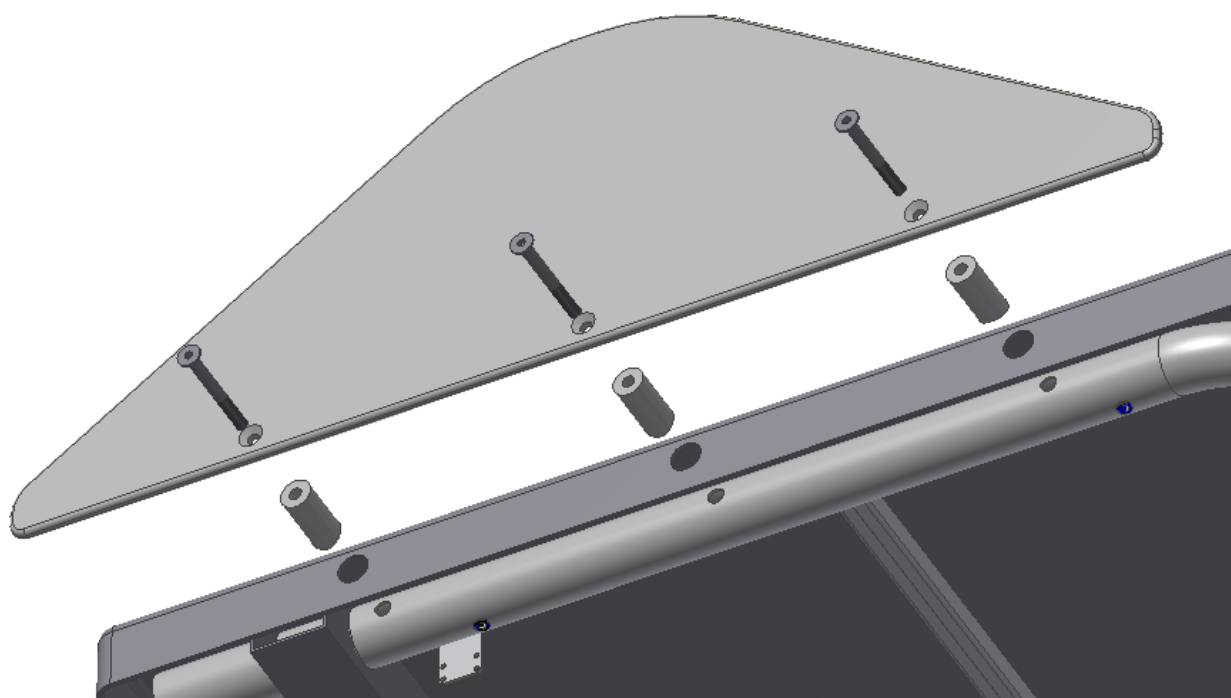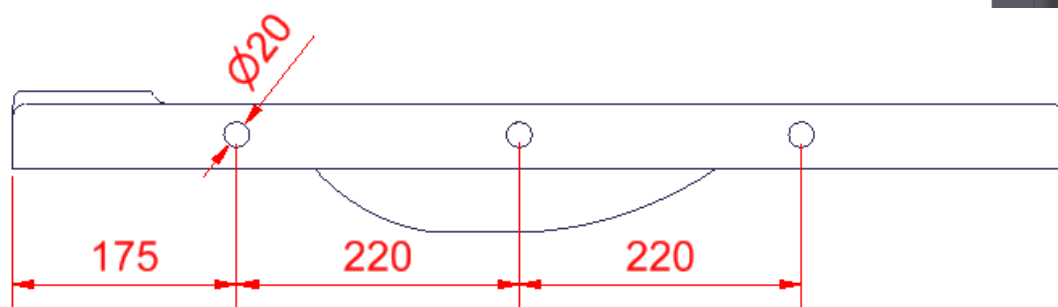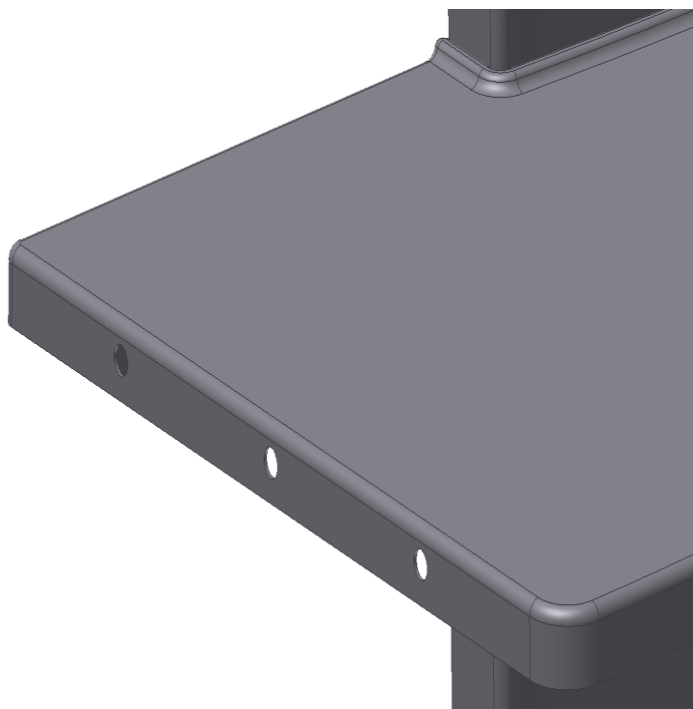

4: Sideafdækningen skrues fast i overrammen igennem de 3 boret huller.

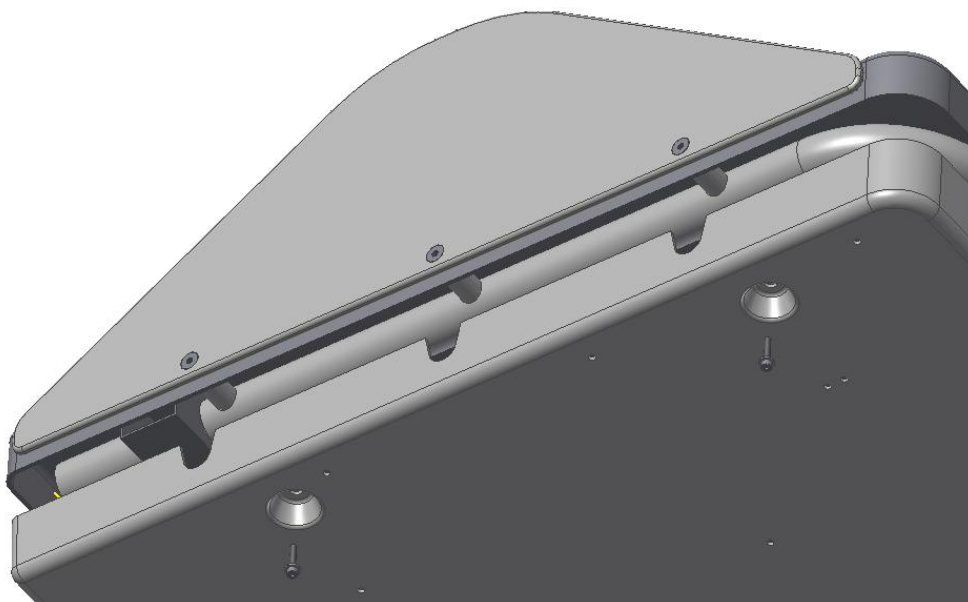

5: Bundpladen monteres igen med de 6 montageskruer.

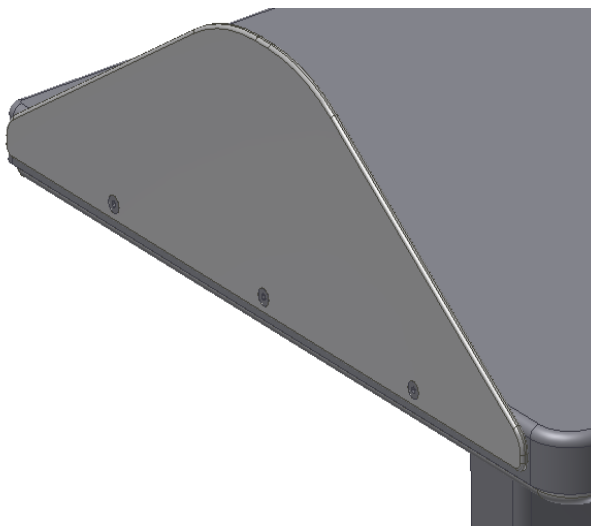

6: Sideafdækningen er nu færdigmonteret og puslebordet kan tages i brug

Ropox Sideafdækningsplader er vedligeholdelsesfrit. Af sikkerhedsmæssige hensyn anbefales det dog jævnligt at checke alle montageskruer for at sikre, at fastspændingen på væggen er i orden og sikker.

Rengøring

Ved rengøring anvendes blot en blød klud eller svamp med almindeligt maks. 60°C varmt sæbevand (pH 7) eller husholdningssprit.

Vigtigt:

Benyt ikke skurepulver eller andre slibende midler, da de vil ridse overfladerne. Benyt heller ikke spidse eller skarpe rengøringsredskaber. Stærk syre eller alkaliske produkter må ikke anvendes.

Se venligst Generelle Salgs- og Leveringsbetingelser på www.ropox.dk



Ropox A/S

Ringstedgade 221
DK – 4700 Næstved
Tel.: +45 55 75 05 00
E-mail: info@ropox.dk
www.ropox.dk