



Svancare Bidet Elegant til **Toiletløfter** Montagevejledning

40-44276

TF 200.02.0025 / Dato 21-11-2025

Indhold

1. Komponentliste.....	3
2. Installationsanvisning.....	4
2.1 Tilpas yderkappen.....	4
2.2 Monter stikdåsen på rammen	4
2.3 Forbind nippeler til t-stykket, og t-stykket til vandudtaget.....	5
2.4 Før bidet-slangen ud gennem rammen, som vist	5
2.5 Tilpas gevindstænger, og sæt yderkappen på.....	6
2.6 Strømtikket til bidet'et føres ind i rammen, og sættes i stikkontakt.....	6
2.7 Slang og ledninger føres ind igennem bidet'et, som vist	7
2.8 Afkort ferrule og skyllerør	7
2.9 Monter pakning ved skyllerør, og monter skyllerør og ferrule i bidet.....	8
2.10 Fastspænd bidet på toiletløfter	8
2.11 Forbind strømkabel og vand til bidet-sæde.....	9
2.12 Åben vand i væg og i filter, og monter bidet-sæde på kummen	9
2.13 Monter trykknop på cisterne, og test bidet'et.....	10

1. Komponentliste

	1x Svancare Bidet Elegant 40-44276
	1x T-stykke 1/2"
	2x Nippel 1/2"
	1x 1m slange 1/2"
	1x Stikdåse m. 2+ stik
	1x Klæbesokkel
	1x Strips



Ikke suppleret af Ropox


2. Installationsanvisning

2.1 Tilpas yderkappen



2.2 Monter stikdåsen på rammen


Enten med klæbesokkel, eller ved at bore to huller, og føre strips igennem.

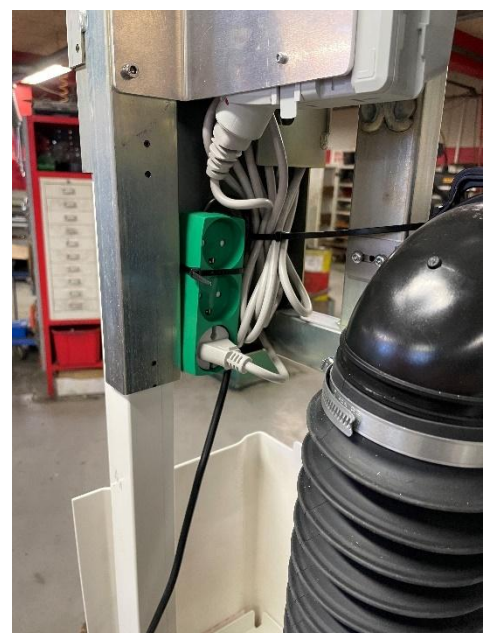

2.3 Forbind nippeler til t-stykket, og t-stykket til vandudtaget

Forbind cisterneslangen, og bidet-slangen til t-stykket

Sørg for, at vandet er lukket!

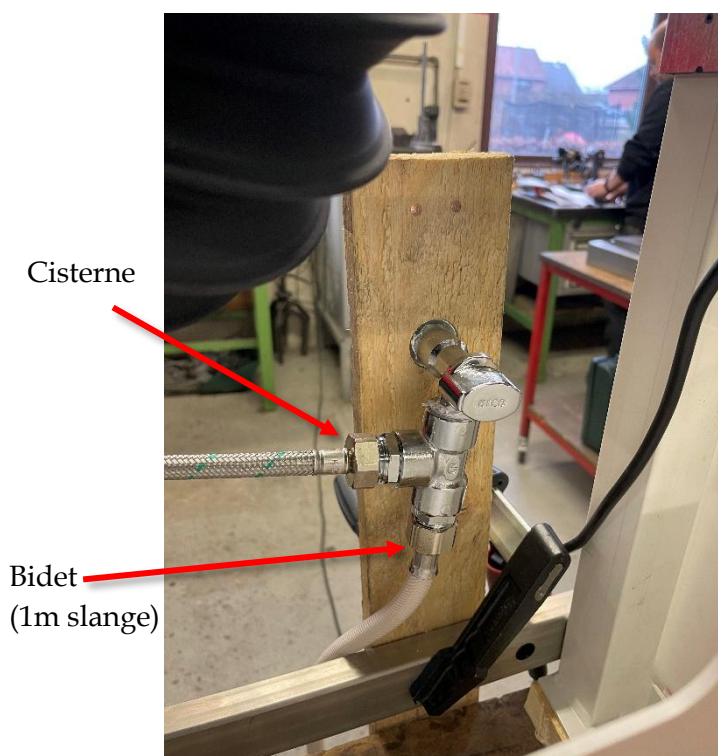


2.4 Før bidet-slangen ud gennem rammen, som vist



2.5 Tilpas gevindstænger, og sæt yderkappen på

Gevindstænger tilpasses til 70mm, og monteres i midterste hul

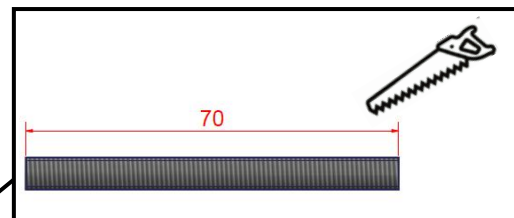

2.6 Strømsstikket til bidet'et føres ind i rammen, og sættes i stikkontakt

Bidet-vandslangen forbindes til det medfølgende filter. Luk vandet på filteret. Herefter åbnes vandet i væggen.




2.7 Slinger og ledninger føres ind igennem bidet'et, som vist




2.8 Afkort ferrule og skyllerør

Ferrule skal være 70mm, og skyllerør 48mm

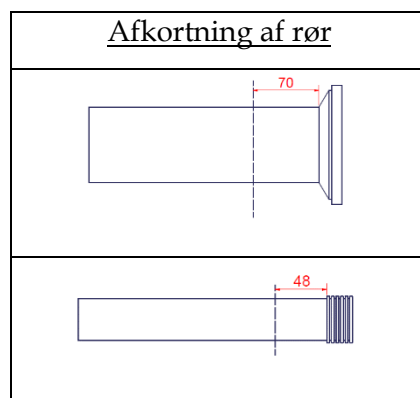


2.9 Monter pakning ved skyllerør, og monter skyllerør og ferrule i bidet

Sæt nu bidet fast på toiletløfteren

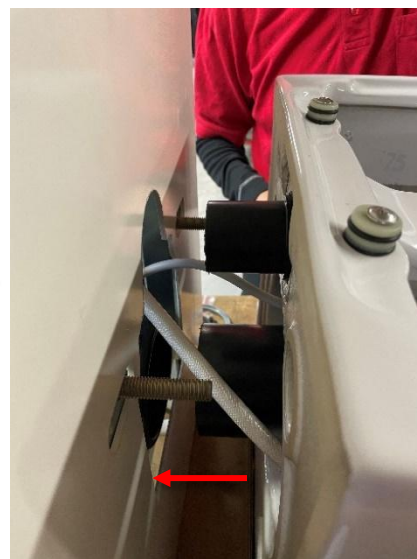

2.10 Fastspænd bidet på toiletløfter

Med vedlagt pakning, skive og møtrik

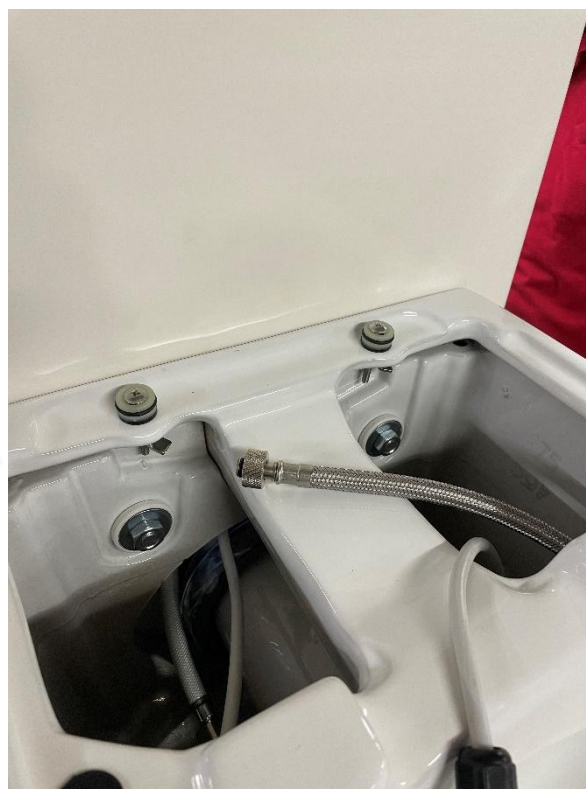

2.11 Forbind strømkabel og vand til bidet-sæde



*Åben for vandet i
filteret!*



2.12 Åben vand i væg og i filter, og monter bidet-sæde på kummen Med vedlagte skruer, skiver og dæknapper



2.13 Monter trykknop på cisterne, og test bidet'et

Både el og vand

