



QR-code
naar
montagevide

Ropox Verti-Inside

Gebruikershandleiding

Montage-instructies

Servicehandleiding

Bewaar deze handleiding altijd bij het product!

Inhoud

1. INLEIDING.....	3
2. CONFORMITEIT MET EU-RICHTLIJNEN.....	3
3. TOEPASSING	3
4. TECHNISCHE GEGEVENS.....	4
5. MAATSCHETS VAN VERTI-INSIDE	5
5.1 Constructie zie afmetingen op de volgende pagina	5
5.2 Kastmaten	6
5.3 Werking van Verti-Inside	8
5.4 Bedradingsschema.....	8
6. MONTAGE-INSTRUCTIES	9
6.1 Montage van accessoires	17
7. PRESTATIETEST	18
8. LIJST VAN ONDERDELEN, VERTI-INSIDE	19
9. OPTIES, VERTI-INSIDE	21
10. PLAATSING VAN LED-RAILS.	23
11. KABELS VOOR LED-RAILS.	25
12. VEILIGHEID IN GEBRUIK	26
13. REINIGING/ONDERHOUD	27
13.1 Reinigen van frame	27
13.2 Onderhoud.....	27
13.3 Serviceschema, bediening en onderhoud	28
14. FOUTEN OPSPOREN.....	28
14.1 Het frame kan niet in hoogte worden versteld (verstellen is erg moeilijk)	28
15. LABEL.....	29
.....	29
16. KLACHTEN	30

1. Inleiding

Verti-Inside is een bovenkastunit voor elektrische hoogteverstelling van bovenkastjes. Verti-Inside is ideaal voor rolstoelgebruikers of personen die niet bij de bovenste planken van de bovenkasten kunnen.



Deze handleiding moet **ALTIJD** bij het product worden geleverd en moet worden gelezen door en beschikbaar zijn voor de gebruiker.



Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.

De gebruikers moeten deze instructies volgen. Het is zeer belangrijk dat u de instructies leest en begrijpt voordat u het product gebruikt.

Deze instructies moeten altijd beschikbaar zijn voor de gebruiker en moeten het product vergezellen in geval van een nieuwe locatie.



Gebruik het systeem **NIET** voordat u hoofdstuk 12 “Veiligheid bij gebruik” hebt gelezen en nadat u hoofdstuk 7 “Prestatietest” hebt voltooid. Zorg ervoor dat **ALLE** kabels en aansluitingen te allen tijde toegankelijk zijn voor onderhoud en service!!! Dit product is elektrisch in hoogte verstelbaar en het risico op beknelling kan bestaan. Het gebruik moet altijd worden uitgevoerd of gecontroleerd door een volwassene, die het belang van hoofdstuk 12 “Veiligheid bij gebruik” heeft gelezen en begrepen.

Correct gebruik, bediening en inspectie zijn doorslaggevende factoren voor effectieve en veilige prestaties.

2. Conformiteit met EU-richtlijnen

Dit product heeft een CE-markering volgens de huidige Machinerichtlijn en is daarom in overeenstemming met de fundamentele veiligheidseisen.

Als deze frames worden geassembleerd of anderszins gecombineerd met andere elektrische componenten, wordt de assemblage beschouwd als een nieuwe eenheid, die moet worden onderworpen aan een risicobeoordeling om CE-markering te verkrijgen.

3. Toepassing

Verti-Inside is ontworpen om een optimale werkhoogte voor de gebruiker te verkrijgen. Verti-Inside is ontworpen om de hoogte van bovenkasten aan te passen. Verti-Inside mag **NIET** worden gebruikt als hefeenheid of personenlift.

Het product moet binnenshuis worden gebruikt, bij normale kamertemperatuur en vochtigheid zoals vermeld in Sectie 4. Verti-Inside is niet ontworpen voor gebruik in vochtige ruimtes.



De besturingseenheid heeft beschermingsgraad IP32/II en moet altijd worden geïnstalleerd in overeenstemming met de Deense hoogspanningsvoorschriften of overeenkomstige nationale of internationale normen.

4. Technische gegevens




Productnaam:	Ropox Verti-Inside
Artikelnummers:	Artikelnummer: Wit Ral 9010: Verti-Inside breedte 40cm, diepte 26,5cm: 30-40404 Verti-Inside breedte 50cm, diepte 26,5cm: 30-40405 Verti-Inside breedte 60cm, diepte 26,5cm: 30-40406 Verti-Inside breedte 70cm, diepte 26,5cm: 30-40407 Verti-Inside breedte 80cm, diepte 26,5cm: 30-40408 Verti-Inside breedte 90cm, diepte 26,5cm: 30-40409 Verti-Inside breedte 100cm, diepte 26,5cm: 30-40410 Wit Ral 9010: Verti-Inside breedte 40cm, diepte 31cm: 30-40414 Verti-Inside breedte 50cm, diepte 31cm: 30-40415 Verti-Inside breedte 60cm, diepte 31cm: 30-40416 Verti-Inside breedte 70cm, diepte 31cm: 30-40417 Verti-Inside breedte 80cm, diepte 31cm: 30-40418 Verti-Inside breedte 90cm, diepte 31cm: 30-40419 Verti-Inside breedte 100cm, diepte 31cm: 30-40420 Grijs Ral 7016: Verti-Inside breedte 60cm, diepte 31cm: 30-40490 Verti-Inside breedte 90cm, diepte 31cm: 30-40491 Verti-Inside breedte 100cm, diepte 31cm: 30-40492
Materiaal:	Gelaste stalen buizen St. 37 en diverse kunststof onderdelen
Oppervlaktebehandeling:	Blauw chromaat, poedercoating
Stroomvoorziening:	220-230V~ / 50-60Hz, 5,0A
Stand-by primair:	<0,3W
Regelspanning:	24VDC
Cyclusduur max:	Max. 2 min. actief dan 18 min. pauze
Max. belasting:	80kg gelijkmatig verdeeld
Snelheid/tijd om te tillen:	Ca. 33 mm/sec. – Ca. 15 sec.
Beweging	495 mm
Temperatuur:	5-45°C
Luchtvochtigheid:	5-85% (niet-condenserend)
Klachten:	Zie Klachten op pagina 28
Fabrikant:	Ropox A/S, DK-4700 Næstved, Tel.: +45 55 75 05 00 e-mail: info@ropox.dk - www.ropox.dk

5. Maatschets van Verti-Inside





Het is belangrijk dat de kabels naar de besturingseenheid flexibel zijn en vrij kunnen bewegen binnen het hoogtebereik van de eenheid.

Diepte 265 mm of 310 mm

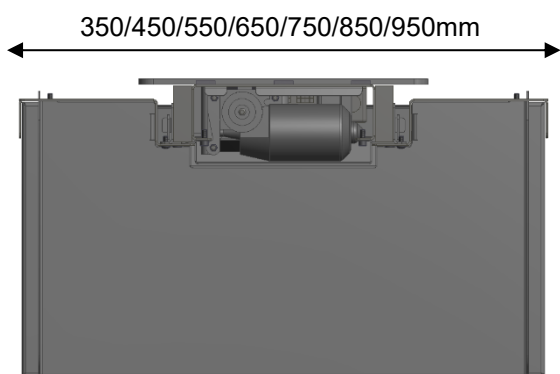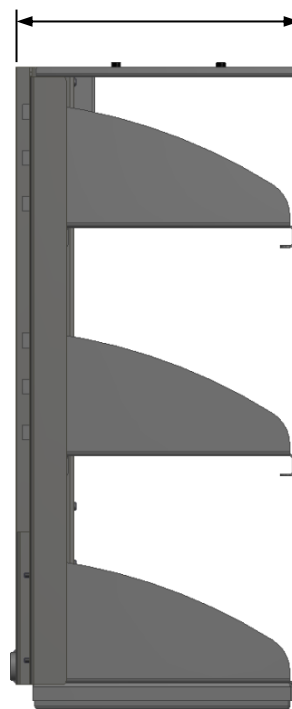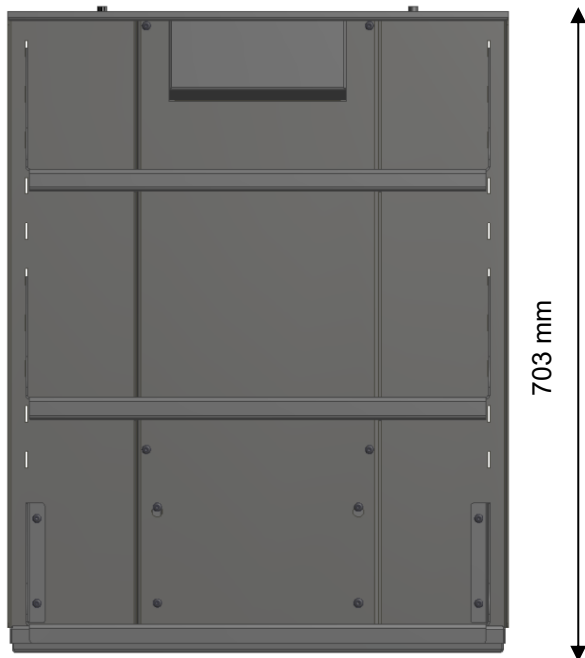

Beweging: 495 mm

De kast wordt aan de muur bevestigd met min. 530mm tussen de onderkant van de kast en andere installaties voor gebruik van de volledige beweging van de eenheid

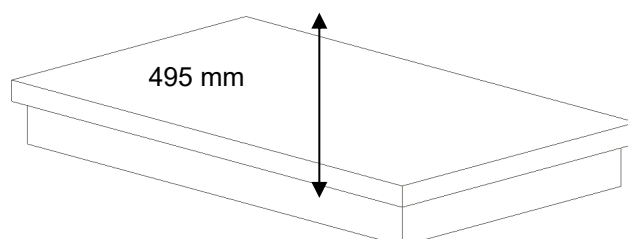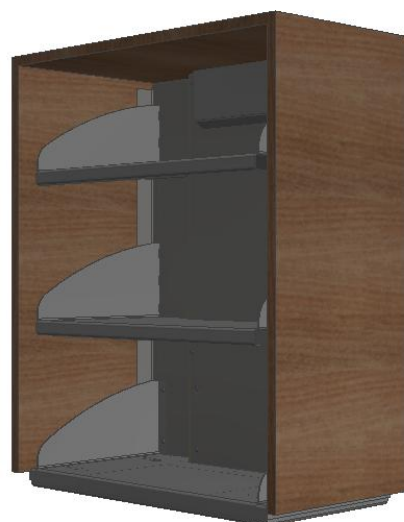

5.1 Constructie zie afmetingen op de volgende pagina

 Minimaal oppervlak voor het versterken van de muur. Het materiaal van de muur moet geschikt zijn om in te schroeven.

 Ruimte voor elektrische installatie.

 Ruimte voor leidingen.

Kasthoogte van 70,4cm of meer. Voor kasthoogtes boven 70,4 cm wordt een vaste plank in het bovenste deel van de kast geplaatst (zie afbeelding).

Voor de montage van de bedieningsschakelaar moet de bedieningskabel van de kast naar de voorkant van het werkblad worden getrokken. We raden aan om een lege doorvoer in de muur te installeren om de kabel doorheen te leiden (ø3,5cm).

Als een hoge kast in de onmiddellijke nabijheid van Verti-Inside staat, kan de kabel door de kast worden geleid om de doorvoer in de muur te vermijden.

Max. belasting 80kg gelijkmatig verdeeld over de drie legplanken voor kasten tot 100cm breed, volgens DS/EN 12182, gebaseerd op 8 schroeven/bouten.


Minimum draagvermogen per schroef/bout:

10,5kg

De installateur moet altijd rekening houden met het materiaal, de staat en de sterkte van de muur en schroeven en pluggen gebruiken die geschikt zijn voor het specifieke muurtype.

5.2 Kastmaten



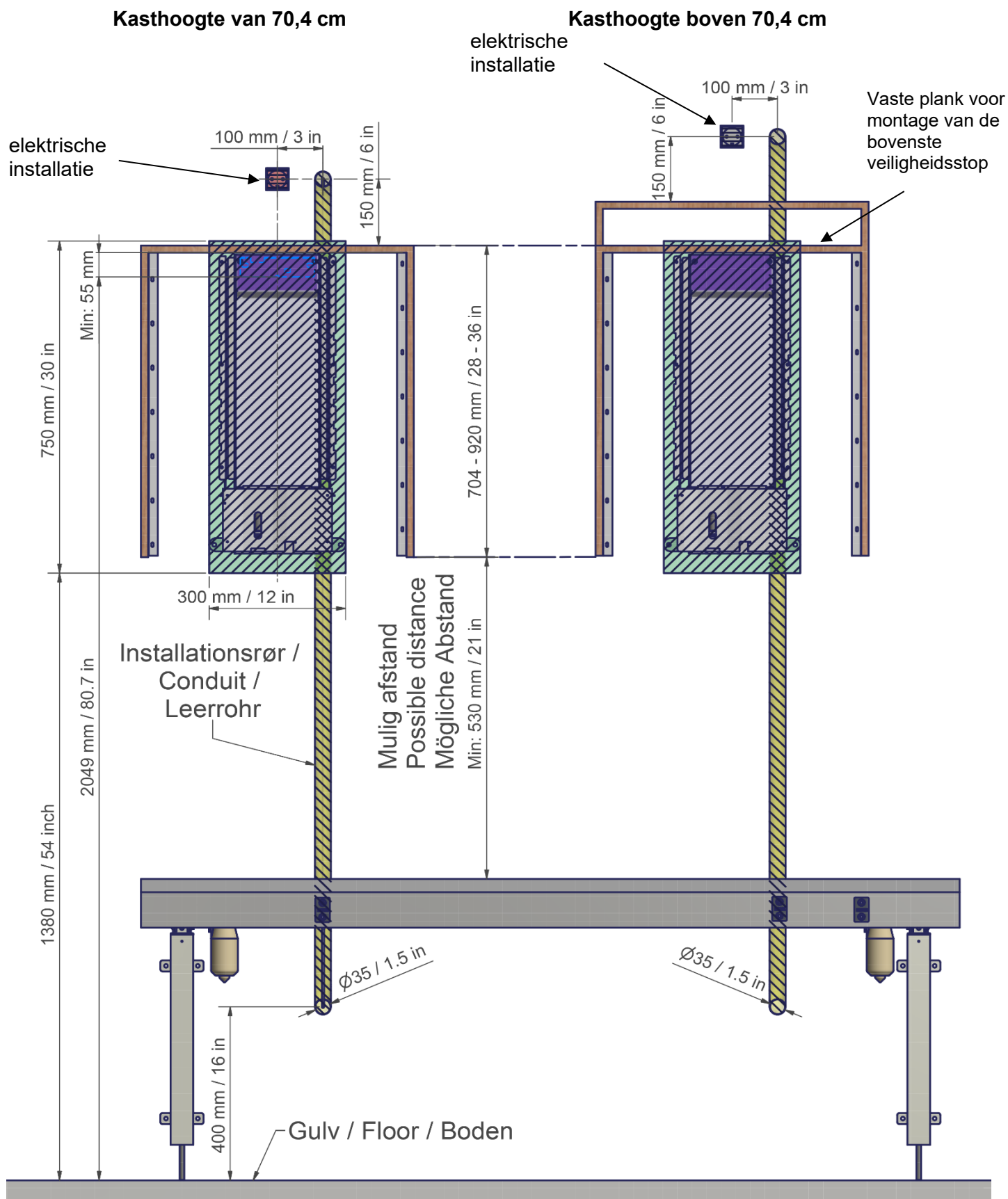

5.3 Werking van Verti-Inside


De hoogte van de kast wordt ingesteld met de bedieningsschakelaar die is aangesloten op de besturingseenheid.

De kast wordt naar boven veresteld door op het OMHOOG-symbool van de bedieningsschakelaar te drukken en naar beneden door op het OMLAAG-symbool van de bedieningsschakelaar te drukken.

Zodra u de bedieningsschakelaar loslaat, wordt de beweging van het toestel gestopt.



5.4 Bedradingsschema

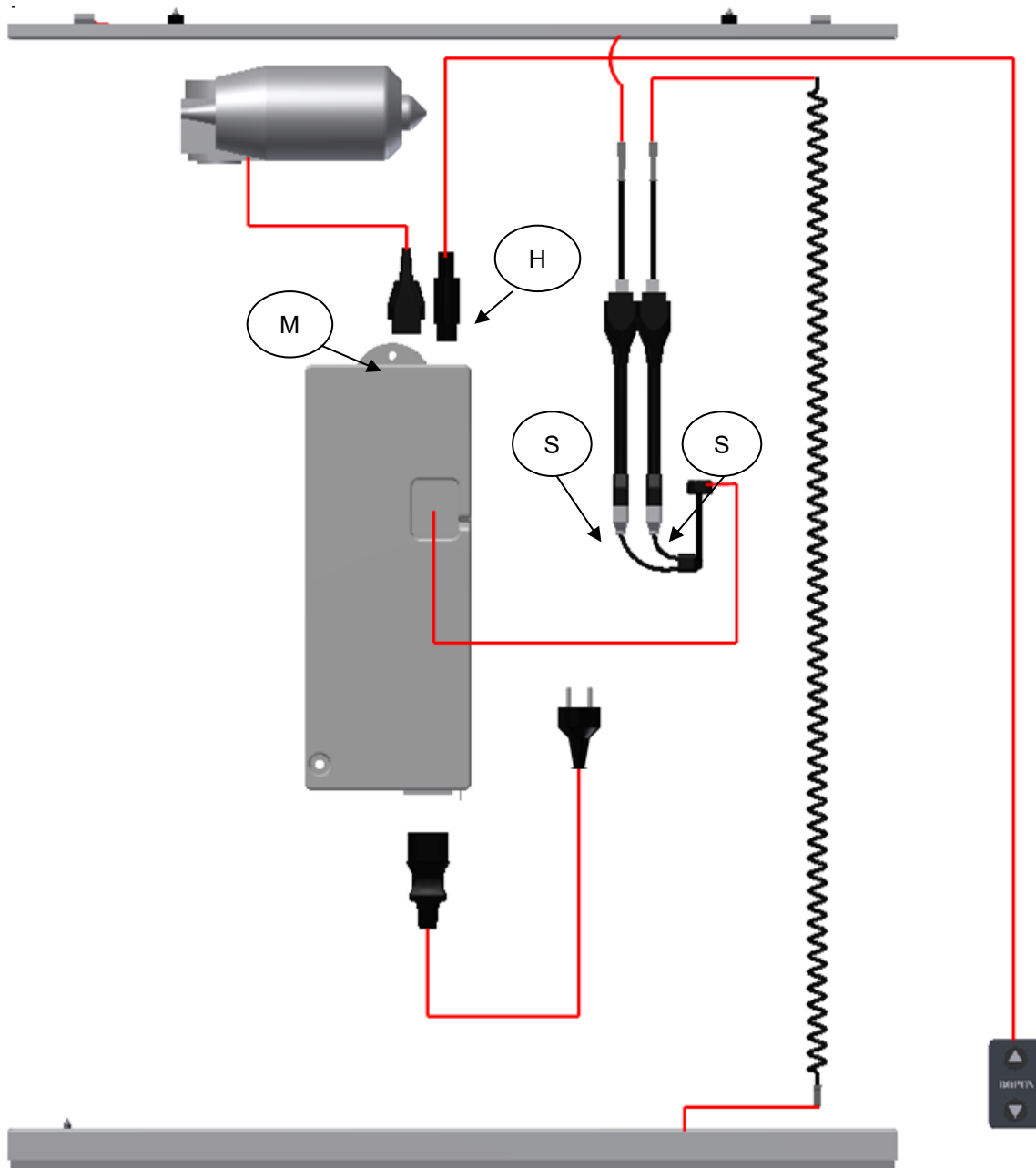

6. Montage-instructies

Montage moet altijd worden uitgevoerd door bevoegd personeel.

Controleer voordat u met de installatie begint of alle onderdelen die in de lijst met onderdelen worden genoemd, zijn geleverd.


Zie lijst van onderdelen in hoofdstuk 8.

1



Verwijder de achterkant en onderkant van de kast.
Let op!
De achterkant kan op zijn plaats blijven als deze met bouten aan de muur is bevestigd.

2

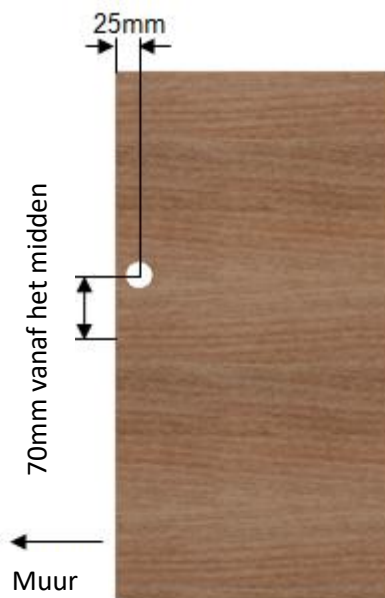

Boor 1 x Ø40mm gat in de bovenkant van de kast voor kabels

Markeer de bovenste veiligheidsstop (zie 9)

3



Bevestiging 2 x 30-40400-021
gelijk met achterkant kast

4




Kast aan de muur bevestigen

14 x Ø3.5mm x12
houtschroef



5


Bevestig ophangbeugel 30-40400-019 aan de muur

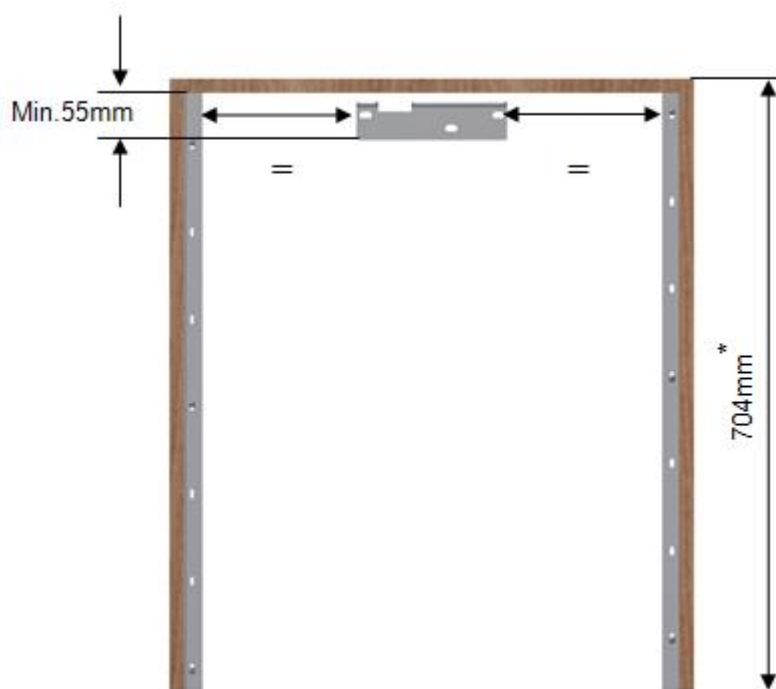

*
Bij installatie van de Verti-
Inside in een kasthoogte van
704 mm zal de veiligheidsstop
20mm lager zijn dan de kast.



6

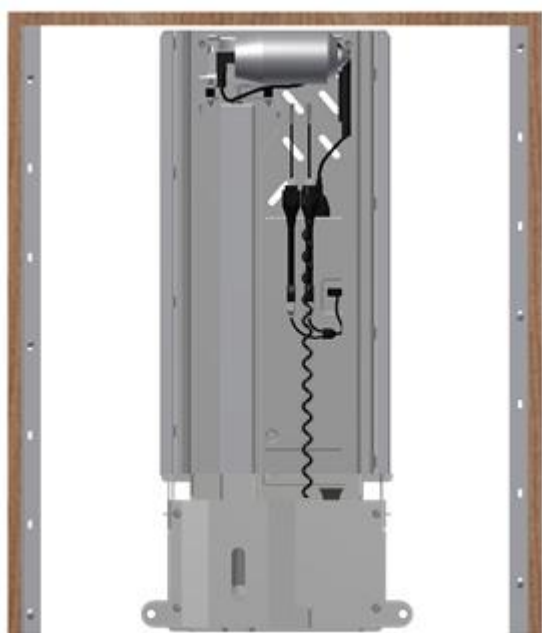


Til hefinrichting 30-40400-042 in de kast en
haak hem vast aan de ophangbeugel.

7




Boor gaten in de muur. Bevestig
hefinrichting 30-40400-042 met 7
schroeven. Gebruik schroeven en
pluggen die passen bij de
constructie en materialen van de
muur

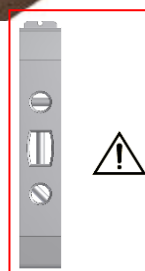


8




1. Sluit de bedieningsschakelaar aan op HS
Gebruik indien nodig een verlengsnoer:
93000162
Trek de kabel achter de motor en door het
gat boven in de kast.
2. Trek het netsnoer achter de motor en door
het gat boven in de kast, sluit het aan en
schakel de stroom in.
3. Sluit de motorkabel 96000814 aan op M1

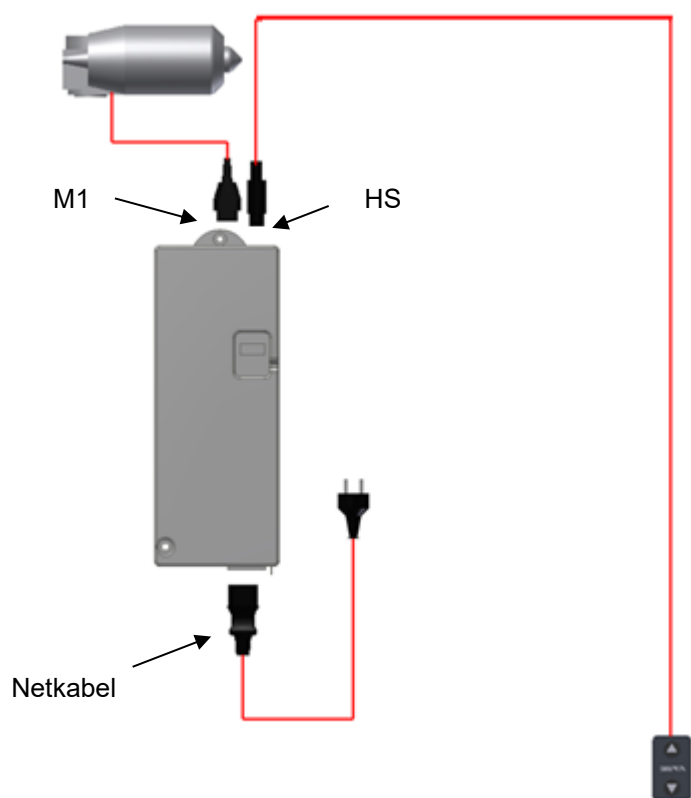

Montage van de bovenste veiligheidsstop

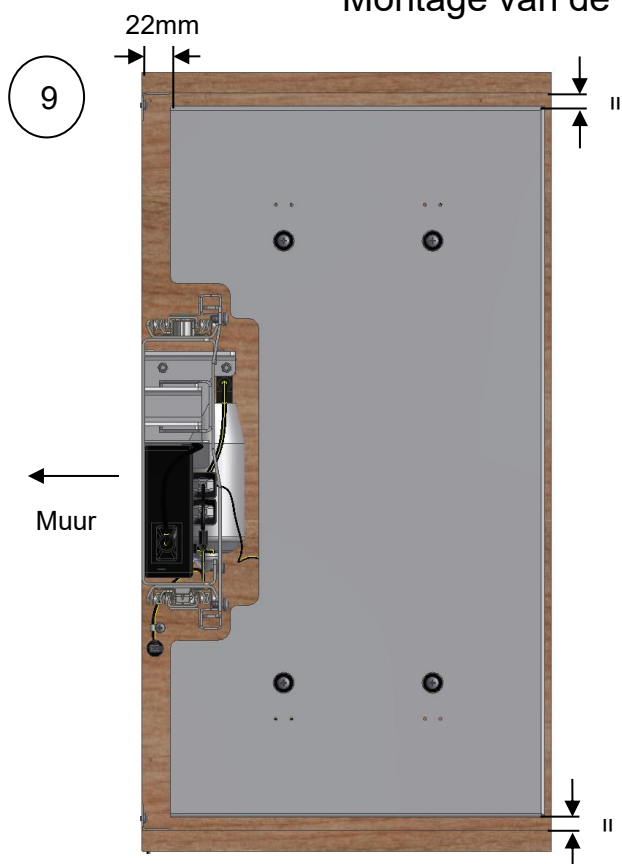

Monteer de bovenste veiligheidsstop boven op de kast. (Illustratie toont kast van onderaf gezien)

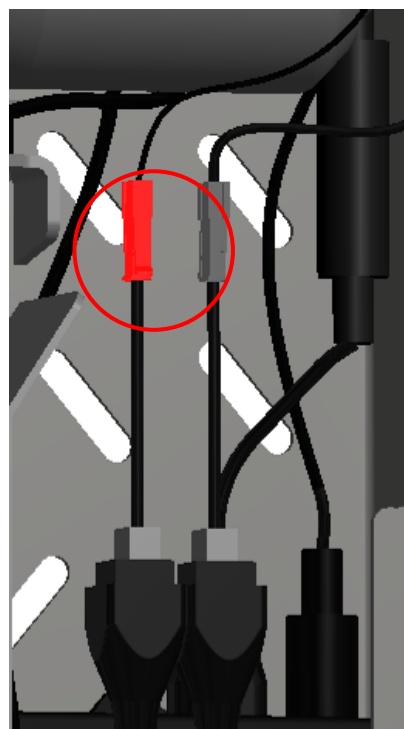

Sluit de veiligheidsstop aan op de besturingseenheid met de gemarkeerde kabel: S1.
(Zie aansluitschema pagina 8)



4 x
houtschroef
Ø5x20




4 x 96121409,
plastic bus




11

Afdekplaat monteren 30-40400-085


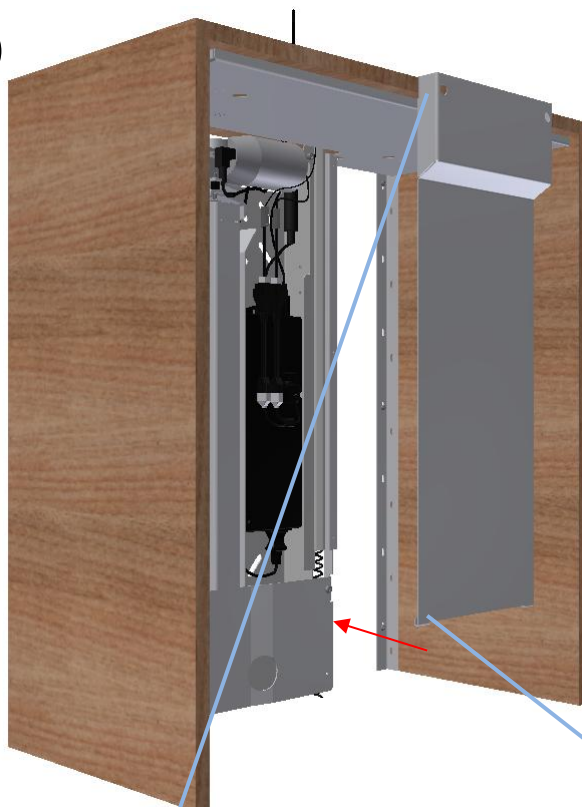


De bovenkant van de afdekplaat heeft "sleutelgaten" waarin de voormonteerde bouten van de hefinrichting passen

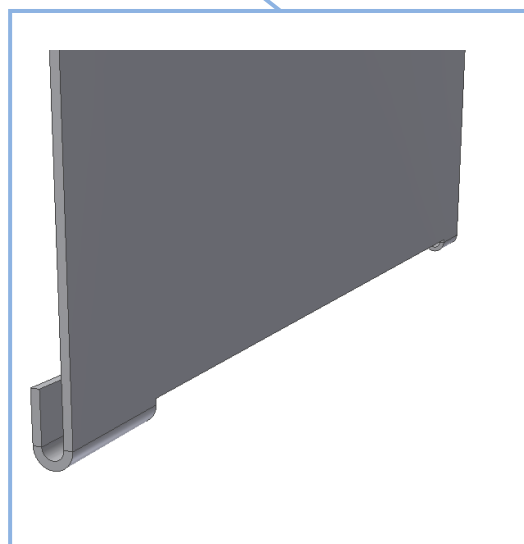

De onderkant van de afdekplaat heeft een flens die om de hefinrichting past. Wanneer het "sleutelgat" en de flens "vastgrijpen", duwt u de plaat omhoog en draait u de bouten vast.


12

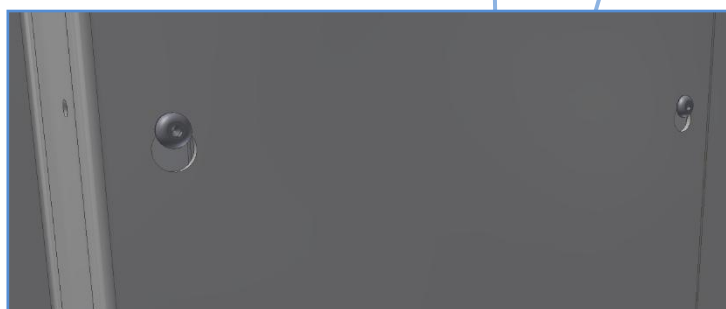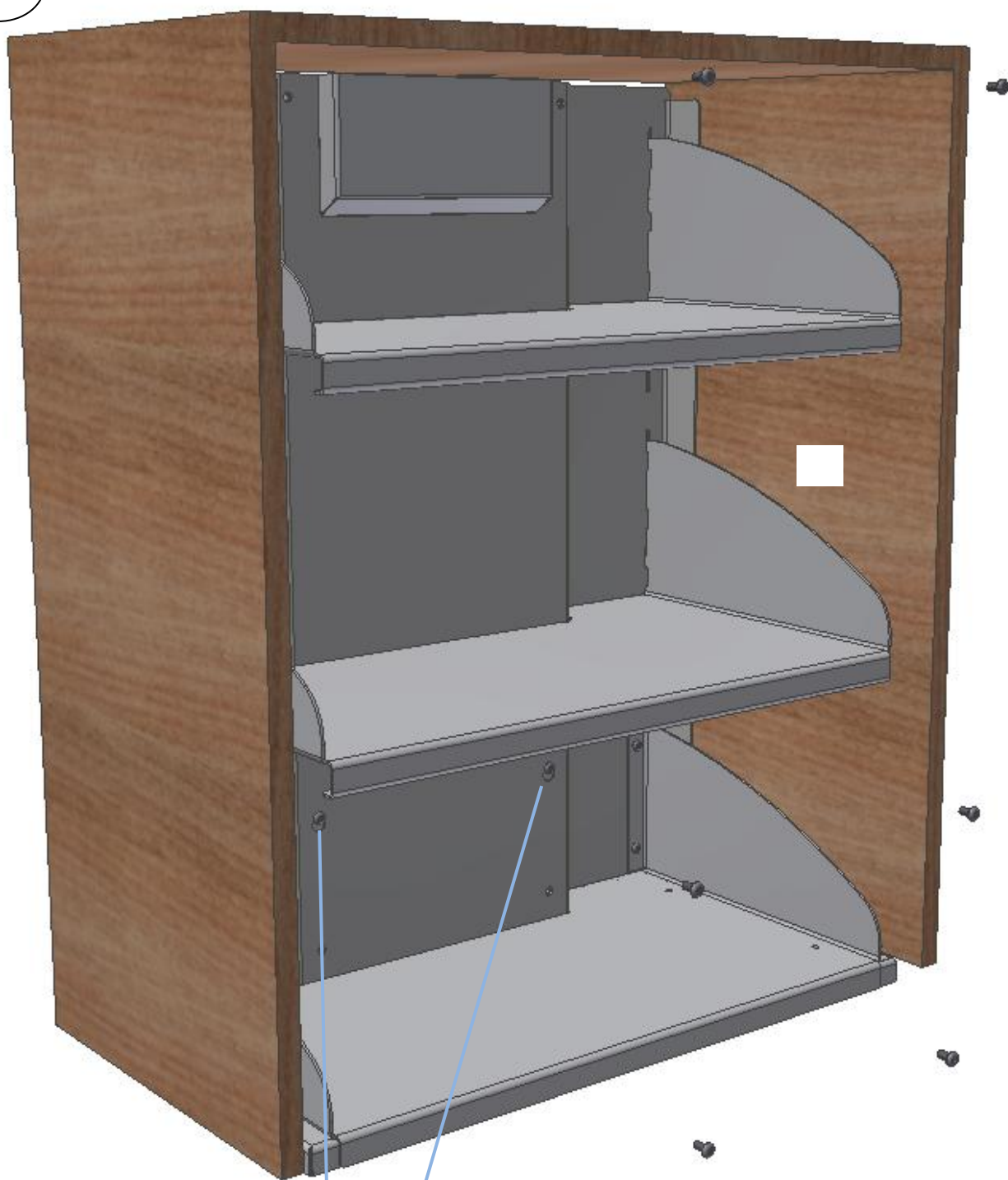

Til de voorplaat in de kast en haak hem vast aan de voormonteerde bouten van de hefinrichting. Monteer nu de resterende 6 bouten


6 x M6x10



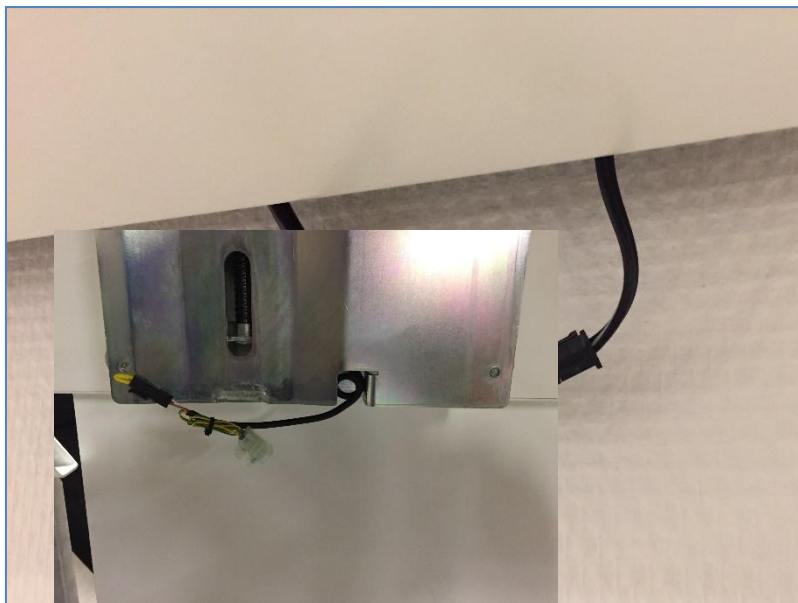

Veiligheidsstop en spiraalkabel aansluiten



14

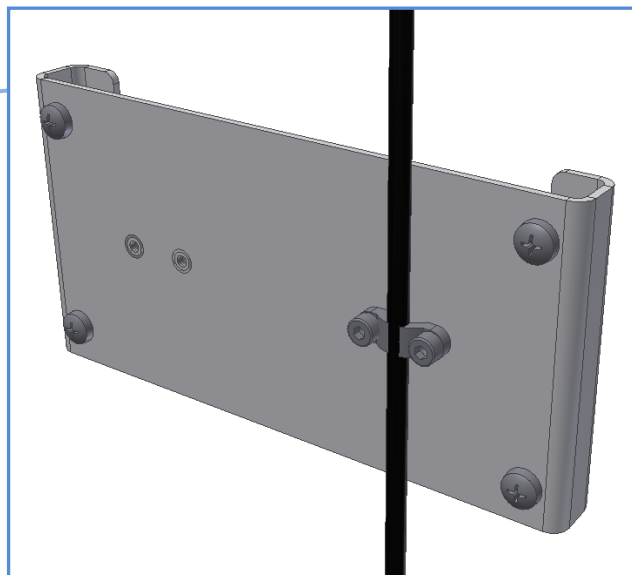

Monteer kabelontlasting voor netsnoer aan de muur



Plaats de bedieningsschakelaar naar wens van de klant en sluit hem aan met een kabel: 97000245.
Gebruik indien nodig een verlengsnoer: 93000162

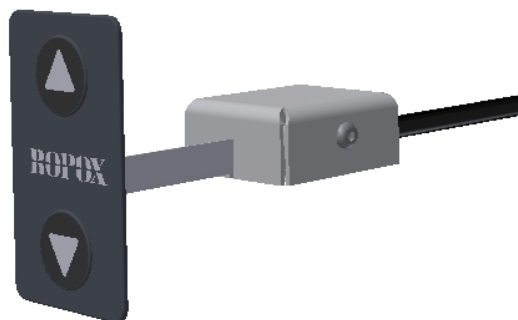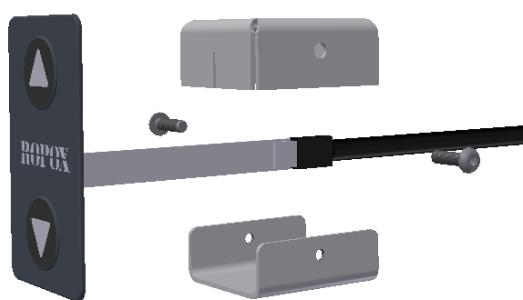

Afscherming 97701-841 en 97701-842 voor bedieningsschakelaar monteren

2 x M3x8



6.1 Montage van accessoires

6.1.1 Bluetooth-adapter voor Ropox Connect App monteren



6.1.1.1 Bepaal de plaats van de adapter en pak vervolgens de Bluetooth adapter en de splitkabel



6.1.1.2 Steek de splitskabel in de stekker "HS" in de besturingskast. Plaats vervolgens de adapter aan het ene uiteinde van de split kabel en de knop die bij het product werd meegeleverd, in het andere

6.1.1.3 Als de adapter moet worden bevestigd, moet dit nu gebeuren

6.1.2 De Ropox Connect App downloaden

Als optie voor de bediening van bepaalde Ropox producten is het mogelijk om de gratis Ropox Connect App te downloaden, waarmee het product draadloos kan worden bediend. Met de Ropox Connect App kan het product naar boven of beneden worden bediend en kunnen hoogte-instellingen worden opgeslagen, zodat gebruikers eenvoudig van stahoogte naar zithoogte kunnen gaan. Voor een uitgebreide uitleg van functies, toegankelijkheidsinstellingen en meer, zie de bijgevoegde handleiding, TF 200.0054.

Volg de onderstaande instructies om de Ropox Connect App te downloaden:

De Ropox Connect App downloaden

Voor iOS

1. Scan de QR-code of open de app: App Store.
2. Druk in de App Store op 'Zoeken'.
3. Zoek naar "Ropox Connect".
4. Zoek de Ropox Connect App en druk op 'Get'.



7. Prestatietest

Na installatie en voor gebruik moeten alle functies van de module worden getest. Daarna moet minstens één keer per jaar een prestatietest worden uitgevoerd door bevoegd personeel.

1. Controleer of de montage-instructies in acht zijn genomen.
2. Controleer of alle bouten en schroeven zijn vastgedraaid.
3. Controleer of alle kabels correct zijn aangesloten en of de stekkers helemaal ingedrukt zijn.
4. Het apparaat mag niet belast worden.
5. Er mogen geen voorwerpen zijn die verhinderen dat het frame vrij kan bewegen binnen het bereik van de hoogteverstelling.

Opstartprocedure

1. Sluit de stroomkabel aan en schakel de voeding in
2. Sluit de motorkabels aan op M1
3. Sluit de bedieningsschakelaar aan op HS
4. Druk op OMHOOG op de bedieningsschakelaar, beweeg het frame naar de bovenste positie en controleer of de beweging gelijkmatig en soepel is. Het frame is nu gereset.
5. Druk op OMLAAG op de bedieningsschakelaar, beweeg het frame naar de onderste positie en controleer of de beweging gelijkmatig en soepel is.

De veiligheidsstops moeten worden getest:

Onderste veiligheidsstop: Druk op de OMLAAG knop en laat de kast 2-5 cm naar beneden bewegen om de veiligheidsstop te activeren. Het apparaat moet nu de neerwaartse beweging stoppen, 1-2cm omhoog bewegen en stoppen.



Bovenste veiligheidsstop: Druk op de OMHOOG-knop en laat de kast 2-5 cm omhoog bewegen om de veiligheidsstop te activeren. Het apparaat moet nu de opwaartse beweging stoppen, 1-2cm naar beneden bewegen en stoppen.

Als al deze tests met succes zijn uitgevoerd, is het apparaat klaar voor gebruik.

Zie "Veiligheid bij gebruik" hoofdstuk 11.

8. Lijst van onderdelen, Verti-Inside

Artikelnummer	Naam	Nummer	Illustratie
30-40400-453 30-40400-019 30-40601-144 96000169 95010416	Verti-InsideElectric Hefeenheid Ophangbeugel Ontlasting voor netkabel Kabelklemmen 24mm M4x16 bout, cilinderkop	1 (één) 1 (één) 1 (één) 1 (één) 2 (twee)	
30-40400-085	Afdekplaat	1 (één)	
	Netsnoer 300cm	1 (één)	
30-67840 93000162	Bedieningsschakelaar standaard, (3x6 cm) 1 (één) incl. 150cm kabel Verlengsnoer voor bedieningsschakelaar 3,5m	1 (één)	
98002087	Spiraalkabel mannelijk/vrouwelijk	1 (één)	
30-40400-113 (40cm) 30-40400-114 (50cm) 30-40400-352 (60cm) 30-40400-462 (60cm) Grijs 30-40400-403 (70cm) 30-40400-405 (80cm) 30-40400-407 (90cm) 30-40400-472 (90cm) Grijs 30-40400-409 (100cm) 30-40400-477 (100cm) Grijs	Voorplaat	1 (één)	
30-40204-3 (40cm) 30-40205-3 (50cm) 30-40206-3 (60cm) 30-40207-3 (70cm) 30-40208-3 (80cm) 30-40209-3 (90cm) 30-40210-3 (100cm)	Veiligheidsstop bodem, voor 26,5cm kast	1 (één)	
30-40214-3 (40cm) 30-40215-3 (50cm) 30-40216-3 (60cm) 30-40216-0 (60cm) Grijs 30-40217-3 (70cm) 30-40218-3 (80cm) 30-40219-3 (90cm) 30-40219-0 (90cm) Grijs 30-40220-3 (100cm) 30-40220-0 (100cm) Grijs	Veiligheidsstop bodem, voor kast van 31cm	1 (één)	

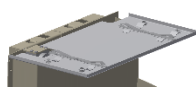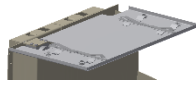30-40304-1 (40cm) 30-40305-1 (50cm) 30-40306-1 (60cm) 30-40307-1 (70cm) 30-40308-1 (80cm) 30-40309-1 (90cm) 30-40310-1 (100cm)	Veiligheidsstop bovenkant, voor kast van 26,5cm	1 (één)	
30-40314-1 (40cm) 30-40315-1 (50cm) 30-40316-1 (60cm) 30-40316-0 (60cm) Grijs 30-40317-1 (70cm) 30-40318-1 (80cm) 30-40319-1 (90cm) 30-40319-0 (90cm) Grijs 30-40320-1 (100cm) 30-40320-0 (100cm) Grijs	Veiligheidsstop bovenkant, voor kast van 31cm	1 (één)	
95122516	Spaanplaatschroef 3,5x16	14 (veertien)	
95010008	M6x10 bout, knoopkop	8 (acht)	
95020616	M6x16 verzonken bout	4 (vier)	
96121409	Bus	4 (vier)	
30-40601-097	Afstandsring	4 (vier)	
97701-841	Afscherming voor bedieningsschakelaar deel 1	1 (één)	
97701-842	Afscherming voor bedieningsschakelaar deel 2	1 (één)	

9. Opties, Verti-Inside

Splitkabel voor bedieningsschakelaar 96000629:

Te gebruiken als er meer dan één bedieningsschakelaar nodig is

1 (één)



Bedieningsschakelaar, groot drukkussen (14x7 cm) 30-67841:

Drukkussen gehandicapten incl. 150 cm kabel

1 (één)



Bedieningsschakelaar 40-14701-9:

Bedieningsschakelaar met spiraalkabel

1 (één)

Smartbox 30-69002-1:

Optie voor veiligheidsstopplaat

Moet worden besteld als de Diagonal boven een FlexiElectric wordt gemonteerd

1 st.




Ropox connect app 30-90591:

Afstandsbediening met app



LED-rails voor keukenkasten.

30-42620-1

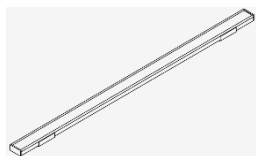

Veiligheidsstop L=40-50cm
LED-rail L=320mm

30-42621-1



Veiligheidsstop L=60-70cm
LED-rail L=520mm

30-42622-1




Veiligheidsstop L=80-100cm
LED-rail L=720mm

30-42623-1




Veiligheidsstop L=110-120cm
LED-rail L=1020mm

30-42624-1

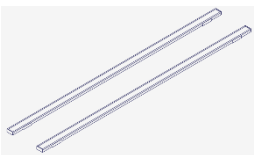


Veiligheidsstop L=130-140cm
LED-rail 2 stuks L=520mm

30-42625-1

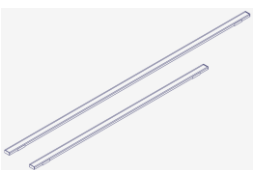

Veiligheidsstop L=150cm
LED-rail L=520mm & L=720mm

30-42626-1

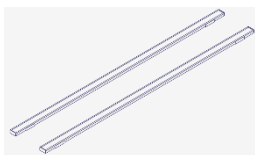

Veiligheidsstop L=160-180cm
LED-rail 2 stuks L=720mm


inbegrepen:

- Voeding
- Controller
- Bediening
- Montagemateriaal




10. Plaatsing van LED-rails.

Voor Verti-Inside met een diepte van 26,5 cm

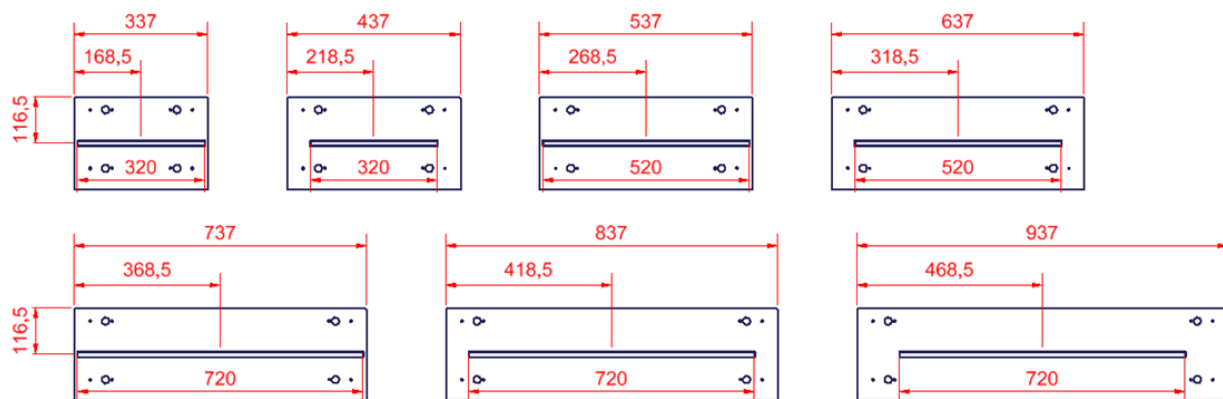

Voor Verti-Inside met een diepte van 31 cm

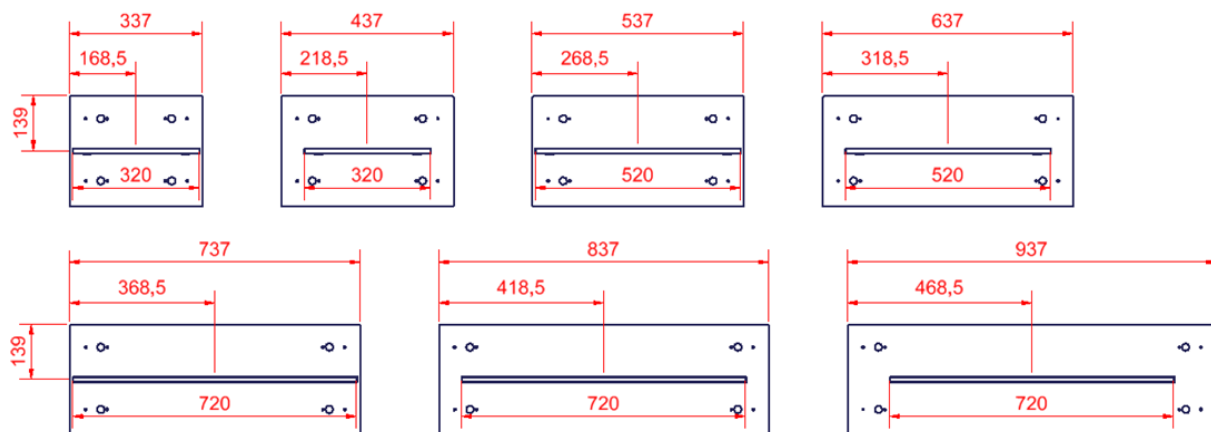


Accessoires:

Extra LED-rails voor montage op bovenkasten.


Max. 3 m LED-rail/voeding.

30-42630-1

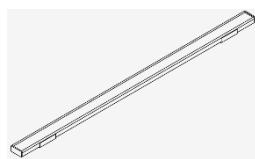


LED-rail L=320mm

30-42631-1

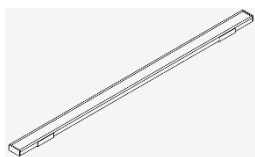


LED-rail L=520mm

30-42632-1

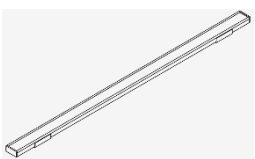

LED-rail L=720mm

30-42633-1

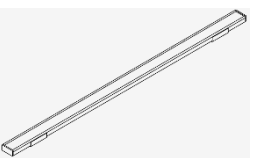

LED-rail L=1020mm

Reserveonderdelen:

30-42627-1



Voeding

30-42628-1



Controller

30-42629-1



Bediening

30-42634-1



Lasdoos


30-30002-1



230 V-kabel, Schuko

11. Kabels voor LED-rails.


Spiraalkabel mannelijk/vrouwelijk is voorbereid voor montage van lamp.
Zie voor gedetailleerde instructies de handleiding die bij de LED rail wordt meegeleverd.

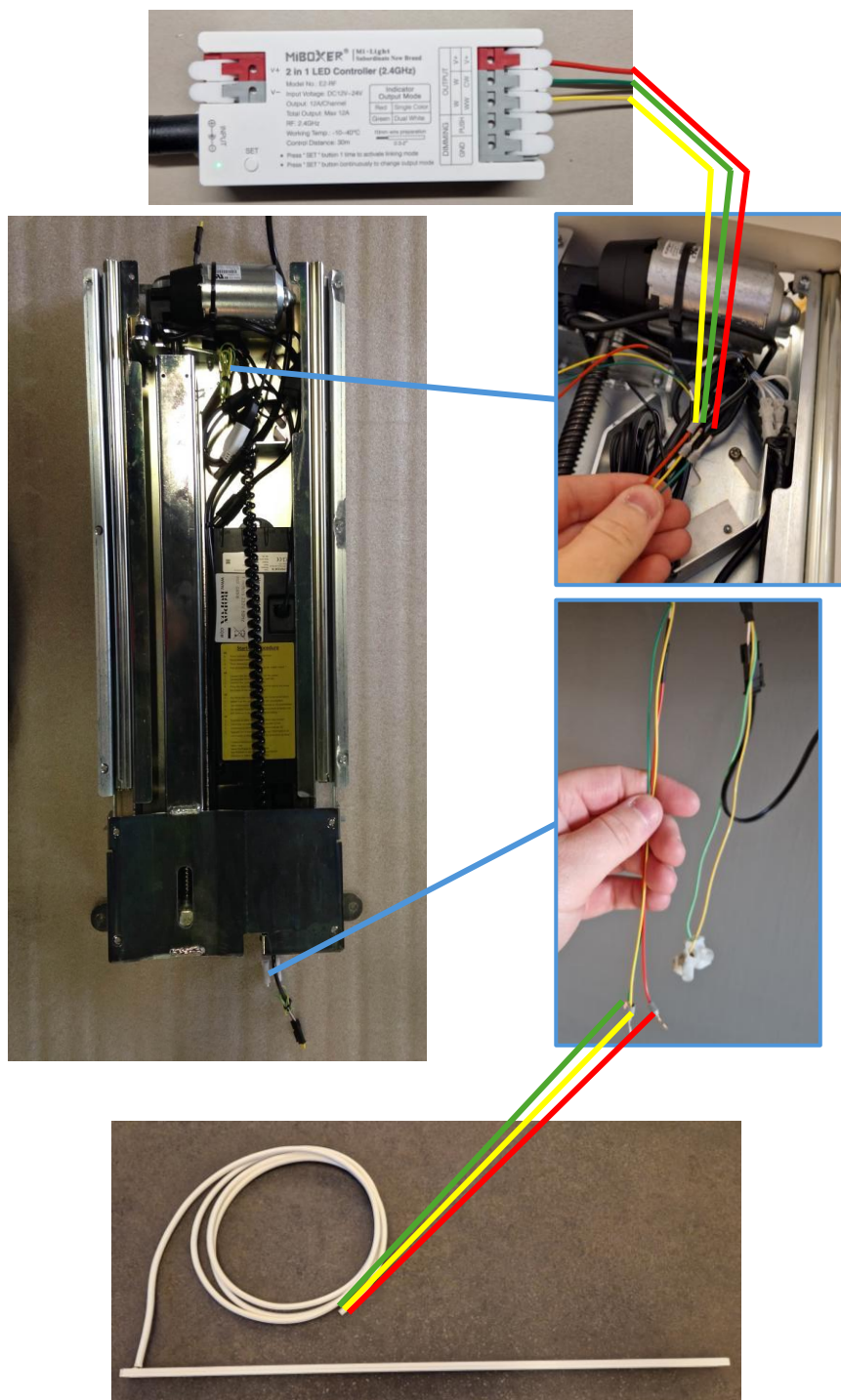


12. Veiligheid in gebruik

- Verti-Inside mag alleen worden gebruikt door personen die deze instructies hebben gelezen en begrepen.
- Verti-Inside is een elektrisch verstelbaar frame. Zelfs als er veiligheidsstops zijn gemonteerd, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat er zich tijdens het gebruik geen personen, dieren of voorwerpen onder het apparaat bevinden.
- Verti-Inside is een kastmodule en mag niet gebruikt worden als hefunit of personenlift.
- Gebruik de eenheid altijd op een manier die het risico op schade aan personen of eigendommen uitsluit. De persoon die de eenheid bedient is verantwoordelijk voor het voorkomen van schade of letsel.
- Kinderen en personen met een verminderd waarnemingsvermogen mogen de eenheid alleen onder toezicht bedienen.
- Als het product wordt gebruikt op openbaar toegankelijke plaatsen waar kinderen of personen met een beperkt waarnemingsvermogen in de buurt van de eenheid kunnen komen, moet de persoon die de eenheid bedient aandacht besteden aan de aanwezigheid om gevaarlijke situaties te voorkomen.
- Zorg ervoor dat er boven en onder de eenheid voldoende vrije ruimte is om de hoogte te kunnen verstellen.
- Gebruik de eenheid niet in geval van defecten of schade.
- Overbelast de eenheid niet en zorg voor een juiste verdeling van de belasting.
- Gebruik de eenheid niet in een explosieve omgeving.
- Verwijder bij inspecties, onderhoud of reparaties altijd de lading van de eenheid.
- Wijzigingen die de prestaties of het ontwerp van de eenheid kunnen beïnvloeden, zijn niet toegestaan.
- Installatie, onderhoud en reparaties moeten worden uitgevoerd door bevoegd personeel.
- Als de eenheid niet volgens deze instructies is gemonteerd, kan het recht op reclamatie komen te vervallen.
- Gebruik voor vervanging alleen originele reserveonderdelen van Ropox. Als er andere reserveonderdelen worden gebruikt, kan het recht op reclamatie komen te vervallen.

Zorg ervoor dat de eenheid niet ongelijkmatig wordt belast. De belasting moet gelijkmatig verdeeld zijn te zitten tussen plank en kastdeur tijdens hoogteverstelling met gesloten kastdeur

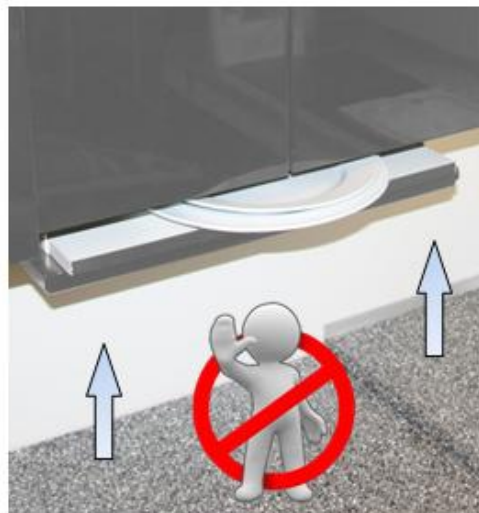

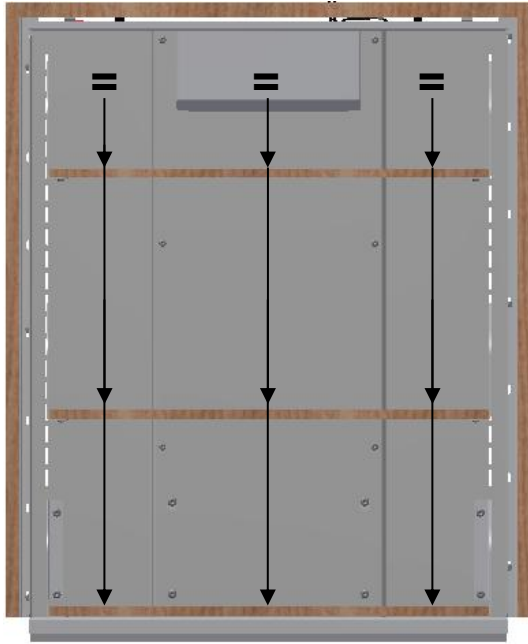

13. Reiniging/onderhoud

13.1 Reinigen van frame



WAARSCHUWING

De netspanning mag NIET worden aangesloten tijdens het reinigen en de elektrische onderdelen mogen NIET worden afgespoeld met water.



Neem het frame af met een uitgewrongen doek met lauw water en een mild schoonmaakmiddel. Niet gebruiken Poets- of schuurmiddelen of slijpdoeken, -borstels of -sponzen.

Droog het frame na het schoonmaken.

13.2 Onderhoud

Inspecties, onderhoud en reparaties moeten worden uitgevoerd door competent personeel.

Het frame is onderhoudsvrij. Bewegende onderdelen zijn levenslang gesmeerd. Omwille van de veiligheid en betrouwbaarheid raden we aan het frame één keer per jaar te inspecteren:

- Controleer of alle bouten stevig vastzitten.
- Controleer of het frame vrij en zonder problemen van beneden naar boven beweegt.
- **Het frame resetten:** Druk op de knop OMHOOG en stel het frame in op de bovenste positie. Druk nogmaals op de knop OMHOOG en houd deze 5 seconden ingedrukt om de besturingseenheid te resetten. Controleer of de beweging soepel en gelijkmatig is. Controleer of het netsnoer vrij kan bewegen.
- Controleer of alle kabels correct zijn gemonteerd en onbeschadigd zijn.

Vul na elke inspectie het onderhoudsschema in.

Gebruik voor vervanging alleen originele reserveonderdelen van Ropox. Als er andere reserveonderdelen worden gebruikt, kan het recht op reclamatie komen te vervallen.

13.3 Serviceschema, bediening en onderhoud

Service en onderhoud Serienummer
Datum: _____
Handtekening: _____
Opmeringen: _____

Service en onderhoud Serienummer
Datum: _____
Handtekening: _____
Opmeringen: _____

Service en onderhoud Serienummer
Datum: _____
Handtekening: _____
Opmeringen: _____

Service en onderhoud Serienummer
Datum: _____
Handtekening: _____
Opmeringen: _____

14. Fouten opsporen

14.1 Het frame kan niet in hoogte worden versteld (verstellen is erg moeilijk)


1. Controleer of er netspanning is aangesloten op de besturingseenheid en of de stroom is ingeschakeld.
2. Controleer de kabels en stekkerverbindingen tussen de besturingseenheid en de motoren.
3. Controleer de kabel en stekkerverbindingen tussen de besturingseenheid en de bedieningsschakelaar.
4. Controleer of de kabels voor de veiligheidsstops zijn aangesloten op de besturingseenheid en de veiligheidsstops.
5. Controleer of de veiligheidsstops niet geactiveerd zijn.

Resetprocedure

6. Als niets van het bovenstaande heeft geholpen, reset dan de unit:
 - Haal alle belasting van Verti-Inside
 - Koppel de motorkabels los
 - Koppel het netsnoer los en wacht 5 sec.
 - Netkabel aansluiten
 - Motorkabel aansluiten
 - Zet de eenheid in de bovenste positie om hem te resetten.

15. Label

Elke eenheid heeft een eigen label zoals afgebeeld. Dit label bevat belangrijke informatie die moet worden vermeld bij vragen aan de leverancier. Het bevat ook informatie over de voeding die moet worden gebruikt.

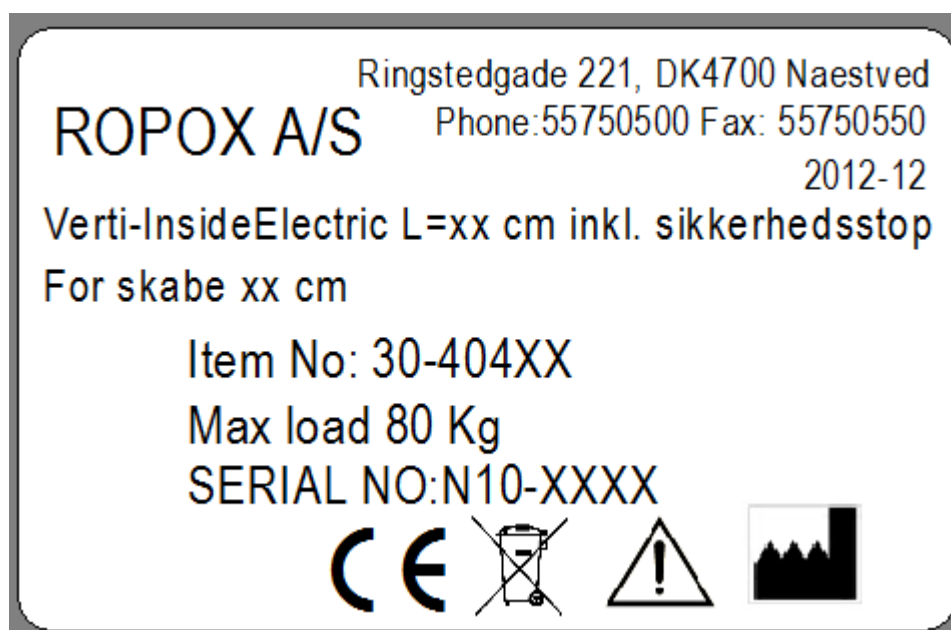

Symbolen:



Lees deze handleiding voor gebruik.



Afval moet worden gesorteerd - indien mogelijk voor recycling.



Ropox is de fabrikant van het product in kwestie.



CE-markering. Dit product voldoet aan de vereisten voor *algemene veiligheid en functionaliteit* van de huidige EU-richtlijnen en -normen.



Plaats van label

16. Klachten

Zie Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden op www.ropox.dk

Bewaar deze handleiding altijd bij het product!



ROPOX A/S

Ringstedgade 221
DK-4700 Næstved
Tel.: +45 55 75 05 00
E-mail: info@ropox.dk
www.ropox.dk