



QR-kod för
monteringsvid
eo

Ropox Verti-Inside

Bruksanvisning

Monteringsanvisningar

Servicehandbok

Förvara alltid denna mapp tillsammans med produkten!

Innehåll

1. INLEDNING	3
2. ÖVERENSSTÄMMELSE MED EU-DIREKTIV OCH BRITTISKA DIREKTIV	3
3. TILLÄMPNING	3
4. TEKNISKA DATA	4
5. MÅTTSKISS AV VERTI-INSIDE	5
5.1 Konstruktion, se mått på följande sida	5
5.2 Storlek på skåp.....	6
5.3 Drift av Verti-Inside.....	8
5.4 Kopplingsschema	8
6. MONTERINGSANVISNINGAR	9
6.1 Montering av tillbehör	17
7. FUNKTIONSTEST	18
8. LISTA ÖVER KOMPONENTER, VERTI-INSIDE.....	19
9. ALTERNATIV, VERTI-INSIDE	21
10. PLACERING AV LED-SKENOR.....	23
11. KABLAR FÖR LED-SKENOR.	25
12. SÄKERHET VID ANVÄNDNING.....	26
13. RENGÖRING/UNDERHÅLL	27
13.1 Rengöring av ram.....	27
13.2 Underhåll	27
13.3 Serviceschema, drift och underhåll	28
14. FELSÖKNING	28
14.1 Ramen kan inte justeras i höjdled (justeringen är mycket svår)	28
15. ETIKETT.....	29
16. KLAGOMÅL	30

1. Inledning

Verti-Inside är en väggskåpsenhet för elektrisk höjdjustering av väggskåp.
Verti-Inside är perfekt för rullstolsburna eller personer som inte kan nå de övre hyllplanen i väggskåpen.



Denna manual måste ALLTID medfölja produkten och läsas av och vara tillgänglig för användaren



Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) som har nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller som saknar erfarenhet och kunskap, om de inte har fått handledning eller instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
Barn bör hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.

Användarna måste följa dessa instruktioner. Det är mycket viktigt att instruktionerna har lästs och förståtts innan produkten tas i drift.

Denna bruksanvisning ska alltid finnas tillgänglig för användaren och ska medfölja produkten vid eventuell flyttning.



Använd **INTE** systemet innan du har läst avsnitt 12 "Säkerhet vid användning" och efter att du har slutfört avsnitt 7 "Funktionstest"
Se till att **ALLA** kablar och anslutningar alltid är åtkomliga för underhåll och service!!!
Denna produkt är elektriskt höjdjusterbar och risk för klämning kan uppstå.
Manövrering ska alltid utföras eller övervakas av en vuxen person, som har läst och förstått vikten av avsnitt 12 "Säkerhet vid användning".

Korrekt användning, drift och kontroll är avgörande faktorer för en effektiv och säker användning.

2. Överensstämmelse med EU-direktiv och brittiska direktiv

Denna produkt är CE-märkt enligt gällande maskindirektiv och uppfyller därmed de grundläggande säkerhetskraven.

Om dessa ramar monteras eller på annat sätt kombineras med andra elektriska komponenter, kommer monteringen att betraktas som en ny enhet, som måste genomgå en riskbedömning för att erhålla CE-märkning.

3. Tillämpning

Verti-Inside är konstruerad för att ge användaren optimal arbetshöjd. Verti-Inside är konstruerad för att justera höjden på väggskåp. Verti-Inside får INTE användas som lyftanordning eller personlyft.

Produkten måste användas inomhus, under normala rumstemperatur- och luftfuktighetsförhållanden som anges i avsnitt 4. Verti-Inside är inte avsedd för användning i fuktiga utrymmen.



Styrenheten har kapslingsklass IP32/II och måste alltid installeras i enlighet med de danska starkströmsföreskrifterna eller motsvarande nationella eller internationella standarder.



4. Tekniska data

Produktnamn:	Ropox Verti-Inside
Artikelnummer:	Artikelnummer: Vit Ral 9010: Verti-Inside bredd 40 cm, djup 26,5 cm: 30-40404 Verti-Inside bredd 50 cm, djup 26,5 cm: 30-40405 Verti-Inside bredd 60 cm, djup 26,5 cm: 30-40406 Verti-Inside bredd 70 cm, djup 26,5 cm: 30-40407 Verti-Inside bredd 80 cm, djup 26,5 cm: 30-40408 Verti-Inside bredd 90 cm, djup 26,5 cm: 30-40409 Verti-Inside bredd 100 cm, djup 26,5 cm: 30-40410 Vit Ral 9010: Verti-Inside bredd 40 cm, djup 31 cm: 30-40414 Verti-Inside bredd 50 cm, djup 31 cm: 30-40415 Verti-Inside bredd 60 cm, djup 31 cm: 30-40416 Verti-Inside bredd 70 cm, djup 31 cm: 30-40417 Verti-Inside bredd 80 cm, djup 31 cm: 30-40418 Verti-Inside bredd 90 cm, djup 31 cm: 30-40419 Verti-Inside bredd 100 cm, djup 31 cm: 30-40420 Grå Ral 7016: Verti-Inside bredd 60 cm, djup 31 cm: 30-40490 Verti-Inside bredd 90 cm, djup 31 cm: 30-40491 Verti-Inside bredd 100 cm, djup 31 cm: 30-40492
Material:	Svetsade stålrör St. 37 och olika plastkomponenter
Ytbehandling:	Blå kromat, pulverlackering
Strömkälla:	220–230 V~ / 50–60 Hz, 5,0 A
Primärt vänteläge:	< 0,3 W
Styrspänning:	24 VDC
Driftcykel max:	Max. 2 min aktiv sedan 18 min paus
Max. belastning:	80 kg jämnt fördelat
Hastighet/tid för lyft:	Cirka 33 mm/sek - Cirka 15 sek.
Rörelse	495 mm
Temperatur:	5–45 °C
Luftfuktighet:	5–85 % (ej kondenserande)
Klagomål:	Se Klagomål sid 28
Tillverkare:	Ropox A/S, DK-4700 Næstved, Tfn.: +45 55 75 05 00 E-post: info@ropox.dk - www.ropox.dk

5. Måttskiss av Verti-Inside




Det är viktigt att kablarna till styrenheten är flexibla och kan röra sig fritt inom enhetens höjdjusteringsområde.

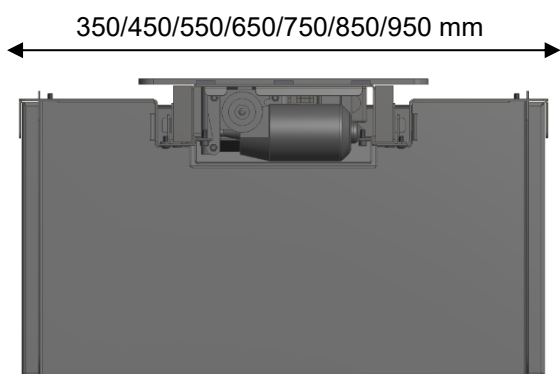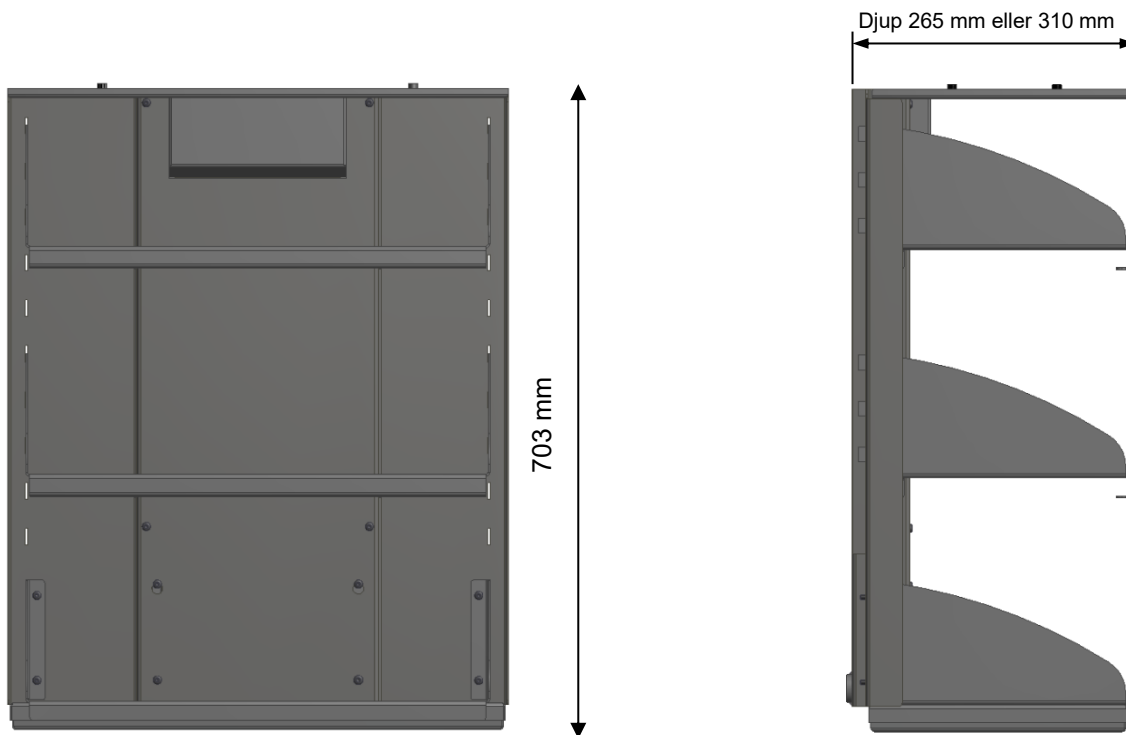

Rörelse: 495 mm

Skåpet är monterat på väggen med min. 530 mm mellan skåpets botten och andra installationer för utnyttjande av enhetens hela rörelse

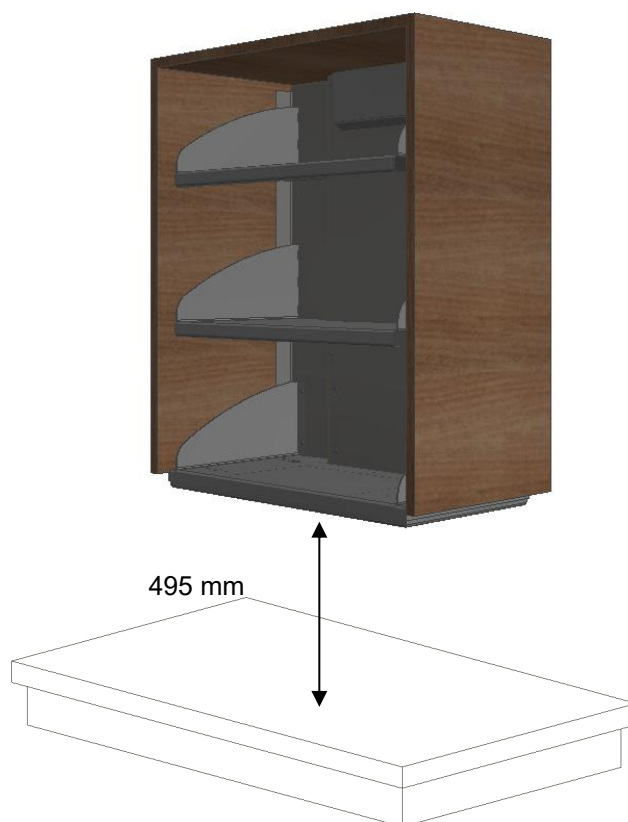

5.1 Konstruktion, se mått på följande sida

 Minsta yta för väggförstärkning. Väggmaterialet måste vara lämpligt för skruvmontering.

 Område för elinstallation.

 Område för ledning.

Skåphöjd på 70,4 cm eller mer. För skåphöjder över 70,4 cm placeras en fast hylla i skåpets övre del (se illustration).

Kabeln för drift måste dras från skåpet till bänkskivans framkant för montering av styromkopplaren. Vi rekommenderar att du installerar ett tomt rör i väggen för att få plats med kabeln (ø3,5 cm).

Om ett högskåp står i omedelbar närhet av Verti-Inside kan kabeln dras genom skåpet för att undvika tomröret i väggen.

Max. belastning 80 kg jämnt fördelat över alla tre hyllplan för skåp upp till 100 cm i bredd, enligt DS/EN 12182, baserat på 8 skruvar/bultar.

Minsta lastkapacitet per skruv/bult:

10,5 kg


Montören bör alltid ta hänsyn till väggens material, skick och hållfasthet och använda skruvar och råpluggar som är lämpliga för den specifika väggtypen.

5.2 Storlek på skåp



Skåphöjd 70,4 cm

Skåphöjd över 70,4 cm

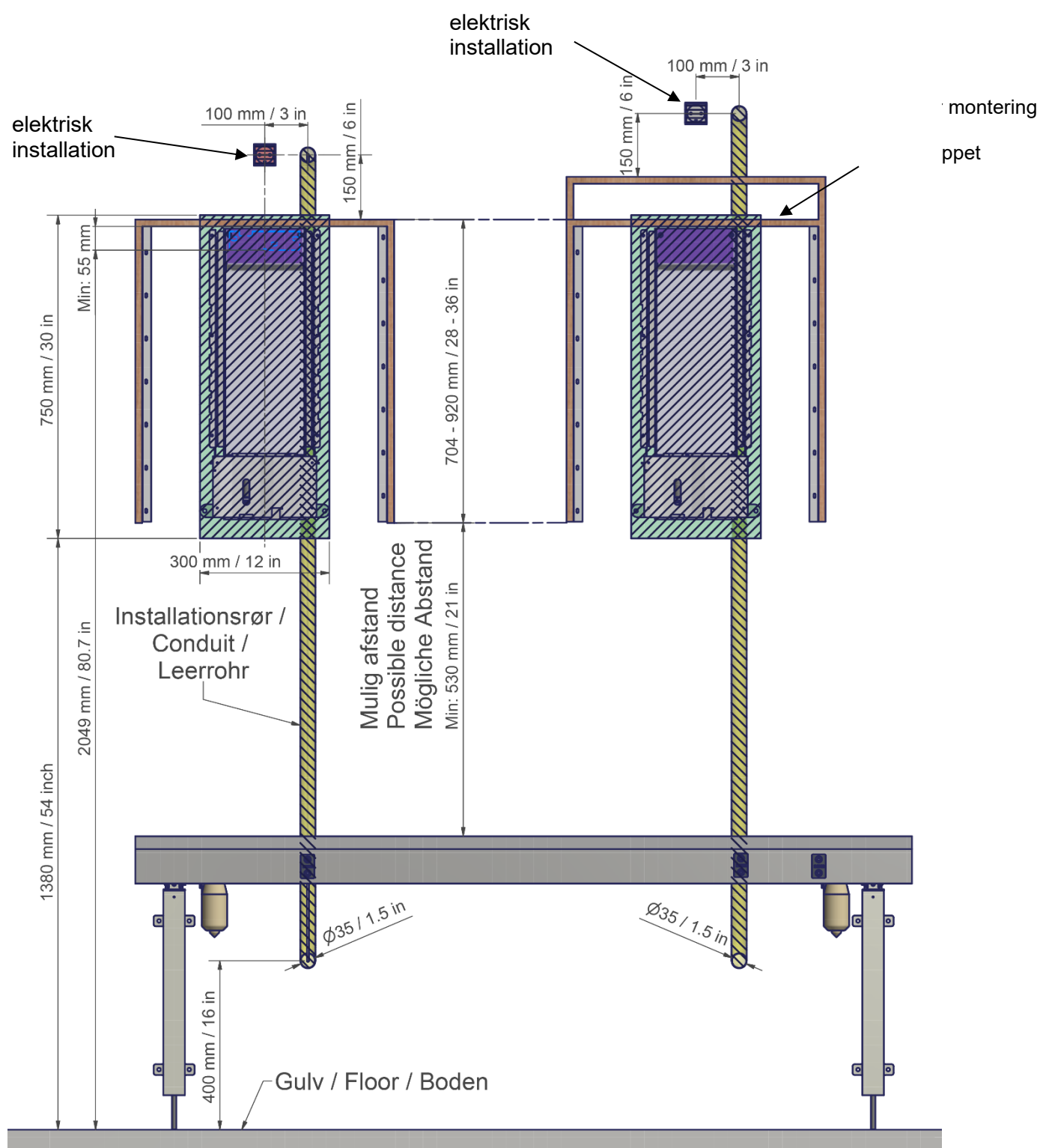

5.3 Drift av Verti-Inside


Skåpets höjd justeras med hjälp av styromkopplaren som är ansluten till styrenheten.

Skåpet justeras uppåt genom att trycka på styromkopplarens UP-symbol och nedåt genom att trycka på styromkopplarens DOWN-symbol.

Så snart du släpper taget om styromkopplaren kommer enhetens rörelse att stoppas.



5.4 Kopplingsschema

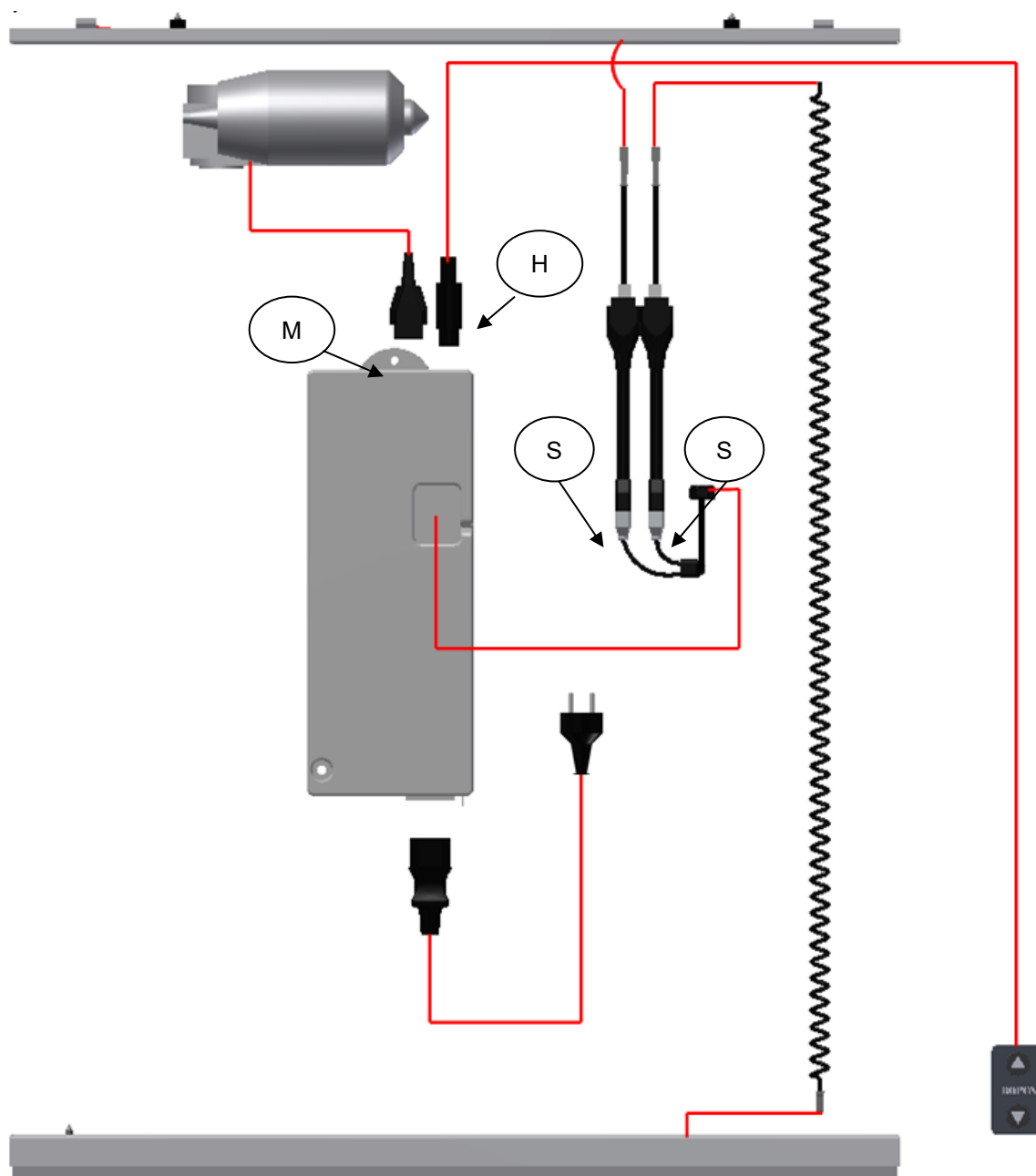

6. Monteringsanvisningar

Monteringen måste alltid utföras av behörig personal

Innan installationen påbörjas, kontrollera att alla delar som nämns i komponentlistan har levererats.


Se lista över komponenter, avsnitt 8.

1



Ta bort baksidan och botten från skåpet.
Obs!
Baksidan kan förbli på plats om den fästs i väggen med bultar

2

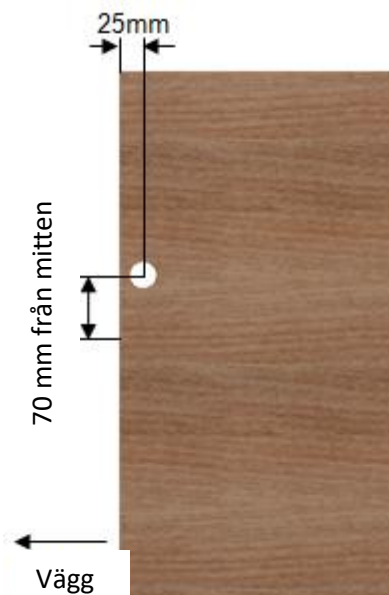

Borra 1 x Ø40 mm hål på skåpets
ovansida för kablar

Märk upp för övre säkerhetsstopp
(se 9)

3



Montering 2 x 30-40400-021
i linje med skåpets bakre kant

4




Montera skåpet på väggen

14 x Ø3,5 mm x12
träskruvar



5


Montera upphängningsarmatur 30-40400-019 på vägg

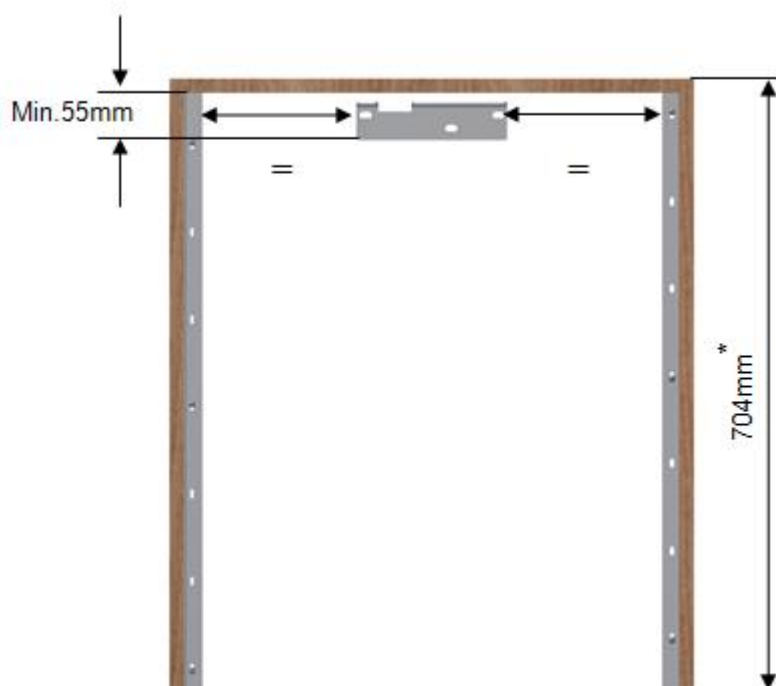

*Vid installation av verti-Inside i ett skåp med höjden 704 mm kommer säkerhetsstoppet att vara 20 mm lägre än skåpet.



6

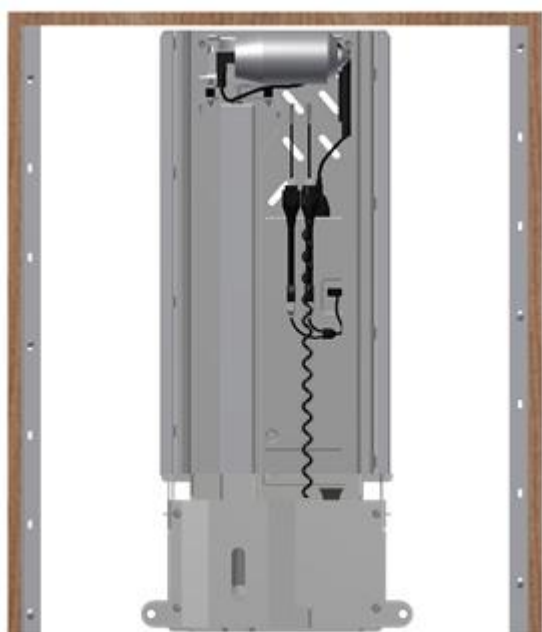


Lyft in lyftanordning 30-40400-042 i skåpet och haka fast den i upphängningsanordningen

TF 200.0069_sv / Rev 4

7




Borra hål i väggen. Fäst lyftanordningen 30-40400-042 med 7 skruvar. Använd skruvar och pluggar som passar väggens konstruktion och material

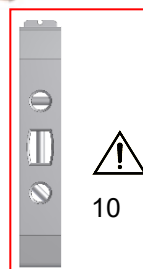


8




1. Anslut styromkopplaren till HS
Använd förlängningssladd om det behövs:
93000162
Dra kabeln bakom motorn och genom
hålet längst upp i skåpet
2. Dra nätkabeln bakom motorn och genom
hålet längst upp i skåpet, anslut och slå på
strömmen
3. Anslut motorkabeln 96000814 till M1

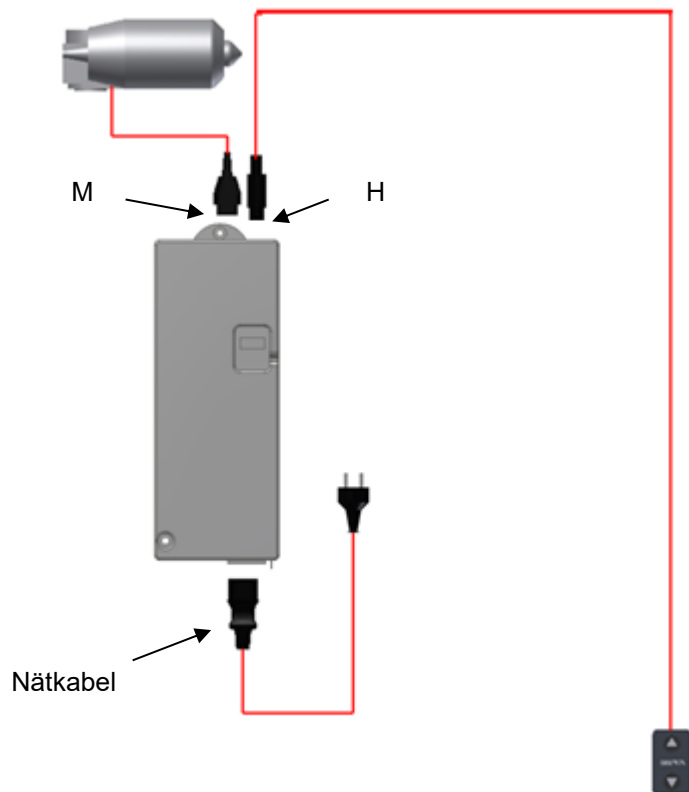

Montering av övre säkerhetsstopp

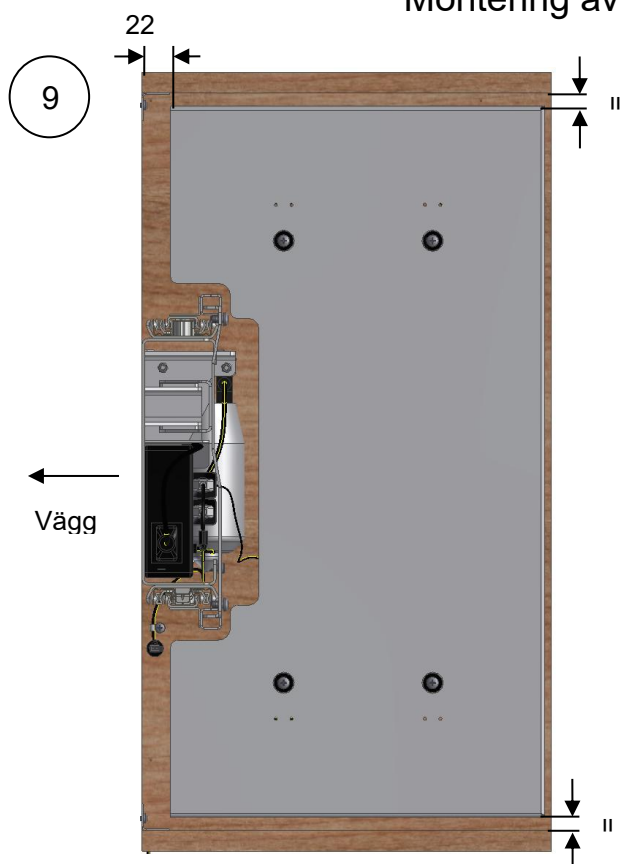

Montera det övre säkerhetsstoppet ovanpå skåpet. (Illustrationen visar skåpet sett underifrån)

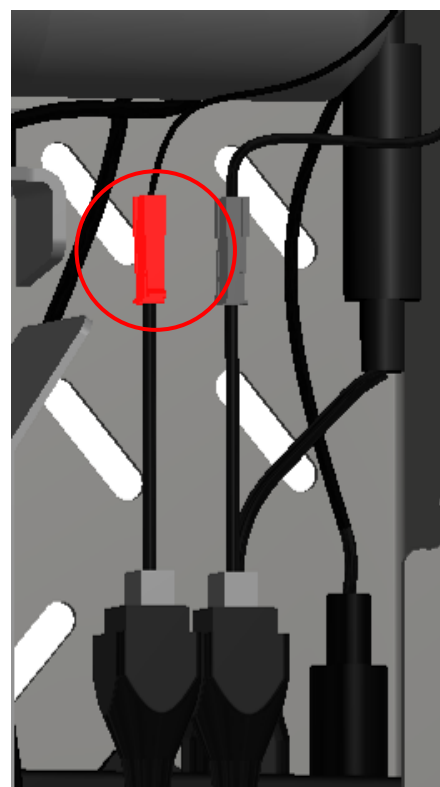

Anslut säkerhetsstoppet till styrenheten, till den markerade kabeln: F1. (se kopplingsschema på sidan 8)



4 x Ø5x20
träskruv




4 x 96121409,
plastbussning




11

Montera täckplatta 30-40400-085


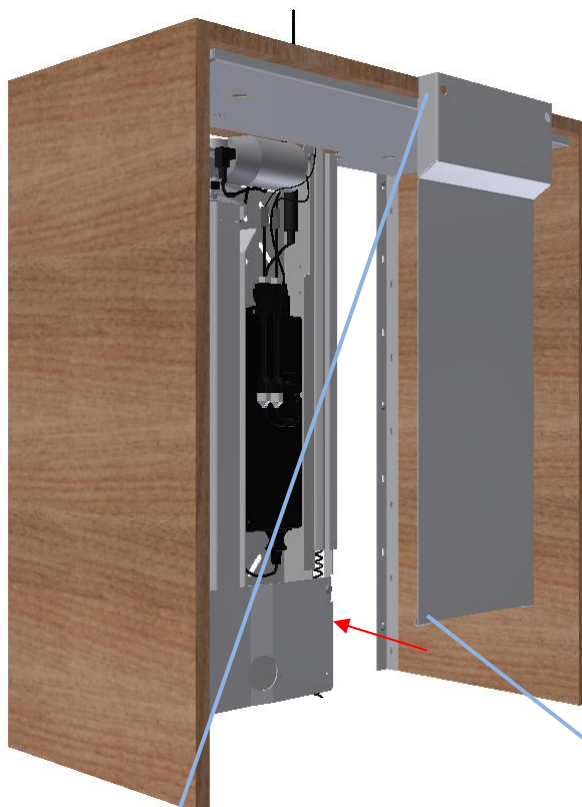


Den övre delen av täckplattan har "nyckelhål" som passar de förmonterade bultarna på lyftanordningen.

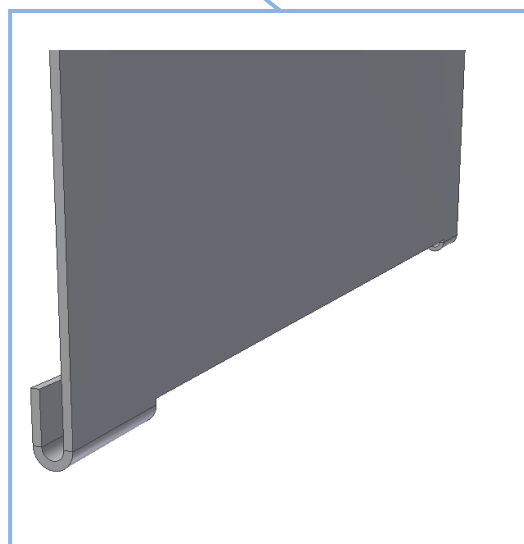

Den nedre delen av täckplattan har en fläns som passar runt lyftanordningen. När "nyckelhålet" och flänsen "tar tag", tryck plattan uppåt och dra åt bultarna.


12

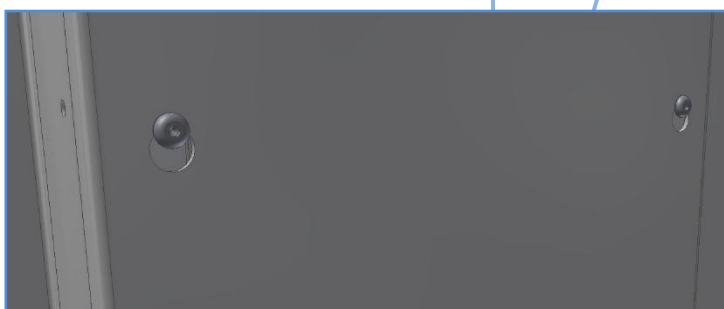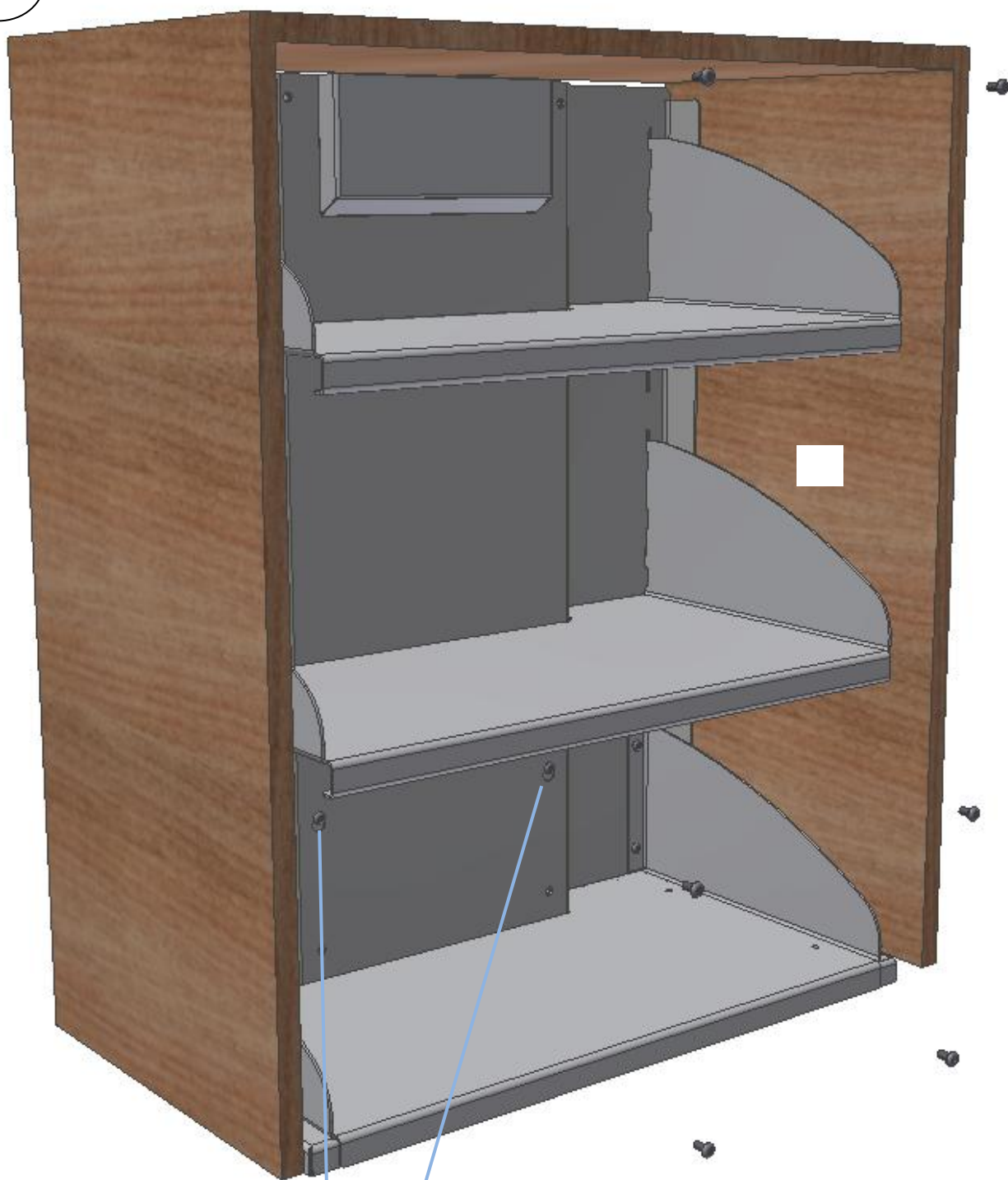

Lyft in frontplåten i skåpet och haka fast den i lyftanordningens förmonterade bultar. Montera nu de återstående 6 bultarna

6 x M6x10




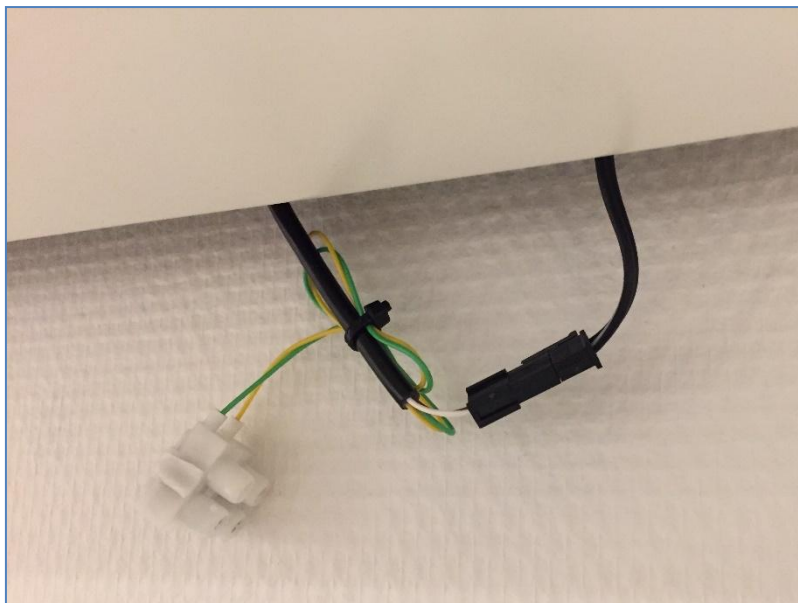

Anslut säkerhetsstopp och spiralkabel





13

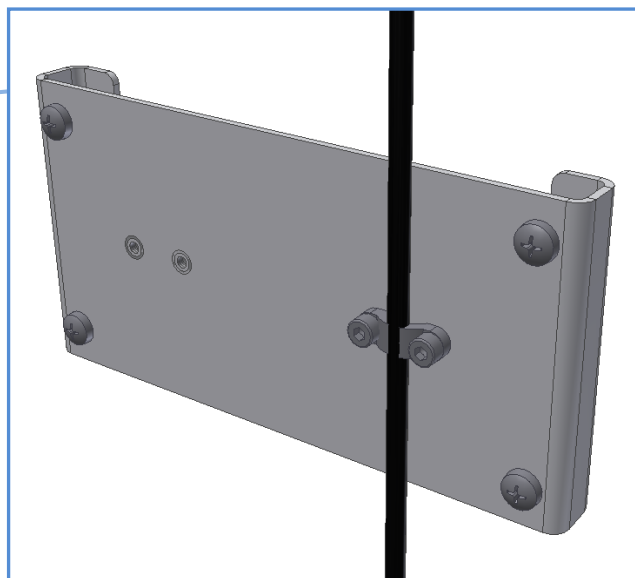

Montera kabelavlastare för nätkabel på vägg



Placera styromkopplaren enligt kundens
önskemål och anslut med kabel: 97000245.
Använd förlängningssladd om det behövs:
93000162

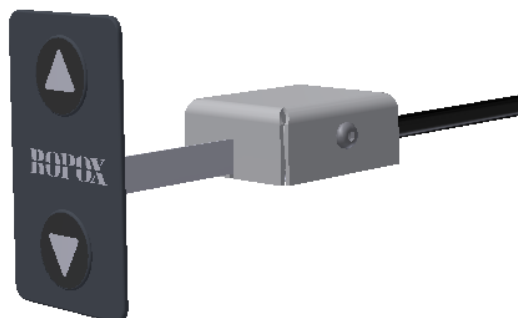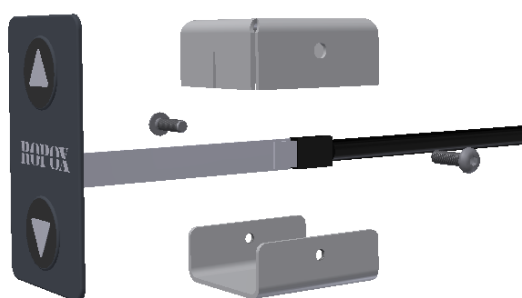

Montera 97701-841 och 97701-842 avskärmning för styromkopplare

2 x M3x8



6.1 Montering av tillbehör

6.1.1 Montering av Bluetooth-adapter för Ropox Connect-appen



6.1.1.1 Bestäm placeringen av adaptern och ta sedan Bluetooth-adaptern och den delade kabeln



6.1.1.2 Sätt i den delade kabeln i kontakten "HS"

i manöverboxen. Sätt sedan in adaptern i ena änden av den delade kabeln och knappen som följde med produkten i den andra

6.1.1.3 Om adaptern ska fixeras, ska den göras nu

6.1.2 Ladda ner appen Ropox Connect

Som ett alternativ för att använda vissa Ropox-produkter är det möjligt att ladda ner den kostnadsfria Ropox Connect-appen, som gör det möjligt att använda produkten trådlöst. Med Ropox Connect-appen kan du manövrera produkten uppåt eller nedåt och har möjlighet att spara höjdinställningar, så att användarna enkelt kan ändra från stående höjd till sittande höjd. För att se en utökad beskrivning av funktioner, tillgänglighetsinställningar med mera, se den bifogade manualen, TF 200.0054. För att ladda ner Ropox Connect-appen, följ instruktionerna nedan:

Så här laddar du ner Ropox Connect-appen

För iOS

1. Skanna QR-koden eller öppna appen: App Store.
2. I App Store trycker du på "Sök".
3. Sök efter "Ropox Connect".
4. Hitta Ropox Connect-appen och tryck på "Hämta".



7. Funktionstest

Efter avslutad installation och före användning måste modulens alla funktioner testas. Efter detta måste ett funktionstest utföras minst en gång per år av behörig personal.

1. Kontrollera att monteringsanvisningarna har följts.
2. Kontrollera att alla bultar och skruvar är åtdragna.
3. Kontrollera att alla kablar har anslutits korrekt och att kontakterna har tryckts in hela vägen
4. Enheten får inte vara belastad.
5. Det får inte finnas några föremål som hindrar ramen från att röra sig fritt inom höjdjusteringsområdet.

Uppstartsprocedur

1. Anslut nätkabeln och slå på strömmen
2. Anslut motorkablarna till M1
3. Anslut styromkopplaren till HS
4. Tryck på UP på styromkopplaren, flytta ramen till toppläget, kontrollera att rörelsen är jämn och smidig. Ramen är nu återställd.
5. Tryck på DOWN på manöverspaken, flytta ramen till bottenläget och kontrollera att rörelsen är jämn och smidig.

Säkerhetsstoppen måste testas:

Nedre säkerhetsstopp: Tryck på DOWN-knappen och låt skåpet röra sig 2-5 cm nedåt och aktivera säkerhetsstoppet. Enheten måste nu stoppa den nedåtgående rörelsen, röra sig 1-2 cm uppåt och stanna.



Övre säkerhetsstopp: Tryck på UP-knappen och låt skåpet röra sig 2-5 cm uppåt och aktivera säkerhetsstoppet. Enheten måste nu stoppa den uppåtgående rörelsen, röra sig 1-2 cm nedåt och stanna.

När alla dessa tester har utförts framgångsrikt är enheten klar för användning.

Se "Säkerhet vid användning" avsnitt 11.

8. Lista över komponenter, Verti-Inside

Artikelnummer	Beteckning	nummer	Illustration
30-40400-453 30-40400-019 30-40601-144 96000169 95010416	Verti-InsideElectric Lyftanordning Upphångningsarmatur Avlastning för nätkabel Kabelklämmor 24 mm M4x16 bult, cylindriskt huvud	1 (en) 1 (en) 1 (en) 1 (en) 2 (två)	
30-40400-085	Täckplåt	1 (en)	
	Nätkabel 300 cm	1 (en)	
30-67840 93000162	Kontrollbrytare standard, (3x6 cm) 1 (en) inkl. 150 cm kabel Förlängningssladd för styromkopplare 3,5 m	1 (en)	
98002087	Spiralkabel hane/hona	1 (en)	
30-40400-113 (40 cm) 30-40400-114 (50 cm) 30-40400-352 (60 cm) 30-40400-462 (60cm) Grå 30-40400-403 (70 cm) 30-40400-405 (80 cm) 30-40400-407 (90 cm) 30-40400-472 (90cm) Grå 30-40400-409 (100 cm) 30-40400-477 (100cm) Grå	Frontplatta	1 (en)	
30-40204-3 (40 cm) 30-40205-3 (50 cm) 30-40206-3 (60 cm) 30-40207-3 (70 cm) 30-40208-3 (80 cm) 30-40209-3 (90 cm) 30-40210-3 (100 cm)	Säkerhetsstopp i botten, för skåp 26,5 cm	1 (en)	
30-40214-3 (40 cm) 30-40215-3 (50 cm) 30-40216-3 (60 cm) 30-40216-0 (60cm) Grå 30-40217-3 (70 cm) 30-40218-3 (80 cm) 30-40219-3 (90 cm) 30-40219-0 (90cm) Grå 30-40220-3 (100 cm) 30-40220-0 (100cm) Grå	Säkerhetsstopp i botten, för 31 cm skåp	1 (en)	

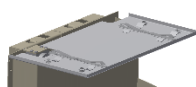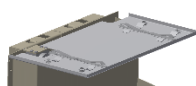30-40304-1 (40 cm) 30-40305-1 (50 cm) 30-40306-1 (60 cm) 30-40307-1 (70 cm) 30-40308-1 (80 cm) 30-40309-1 (90 cm) 30-40310-1 (100 cm)	Säkerhetsstopp, för skåp på 26,5 cm	1 (en)	
30-40314-1 (40 cm) 30-40315-1 (50 cm) 30-40316-1 (60 cm) 30-40316-0 (60cm) Grå 30-40317-1 (70 cm) 30-40318-1 (80 cm) 30-40319-1 (90 cm) 30-40319-0 (90cm) Grå 30-40320-1 (100 cm) 30-40320-0 (100cm) Grå	Säkerhetsstopp, för 31 cm skåp	1 (en)	
95122516	Skruv för spånskiva 3,5x16	14 (fjorton)	
95010008	M6x10 bult, runt huvud	8 (åtta)	
95020616	M6x16 försänkt skruv	4 (fyra)	
96121409	Hylsa för bussning	4 (fyra)	
30-40601-097	Distansbricka	4 (fyra)	
97701-841	Avskärmning för styromkopplare del 1	1 (en)	
97701-842	Avskärmning för styromkopplare del 2	1 (en)	

9. Alternativ, Verti-Inside

Delad kabel för styromkopplare 96000629:

Används om mer än en styromkopplare krävs

1 (en)



Styromkopplare, stor tryckplatta (14x7 cm) 30-67841:

Tryckplatta för funktionshindrade inkl. 150 cm kabel

1 (en)



Styromkopplare 40-14701-9:

Styromkopplare med spiralkabel

1 (en)

Smartbox 30-69002-1:

Tillval för säkerhetsstoppsplatta

Beställs om Diagonal monteras ovanför en FlexiElectric

1 st.



Ropox Connect-app 30-90591:


Fjärrkontroll med app

1 st.



LED-skenor för köksskåp.

30-42620-1

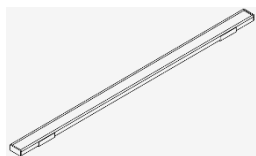

Säkerhetsstopp L=40-50cm
LED-skena L=320mm

30-42621-1



Säkerhetsstopp L=60-70cm
LED-skena L=520mm

30-42622-1




Säkerhetsstopp L=80-100cm
LED-skena L=720mm

30-42623-1




Säkerhetsstopp L=110-120cm
LED-skena L=1020mm

30-42624-1

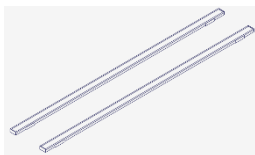


Säkerhetsstopp L=130-140cm
LED-skena 2 st. L=520mm

30-42625-1

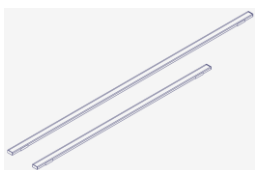

Säkerhetsstopp L=150cm
LED-skena L=520mm & L=720mm

30-42626-1

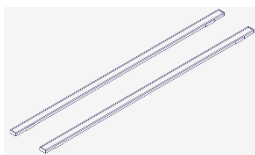

Säkerhetsstopp L=160-180cm
LED-skena 2 st. L=720mm


inkluderat:

- Strömförsörjning
- Kontroller
- Styrning
- Monteringsdetaljer




10. Placering av LED-skenor.

För Verti-Inside med ett djup på 26,5 cm

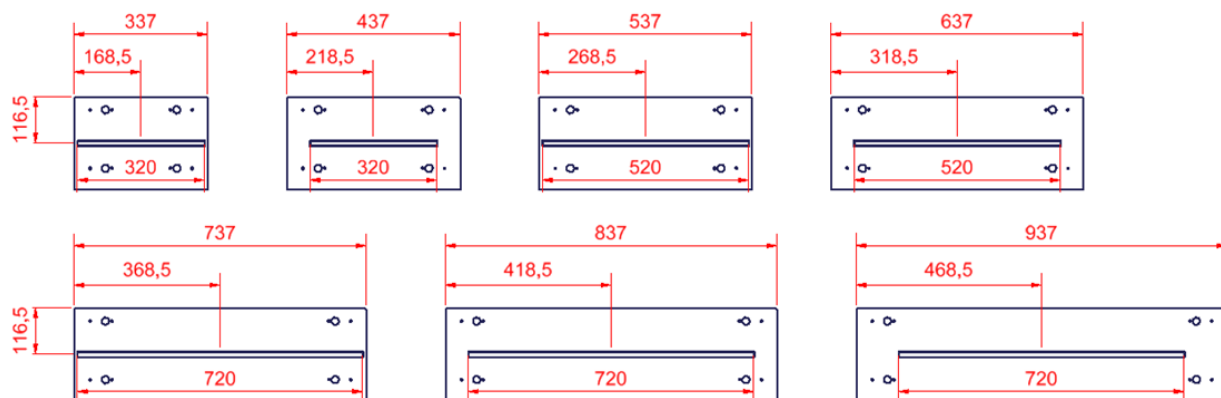

För Verti-Inside med ett djup på 31 cm

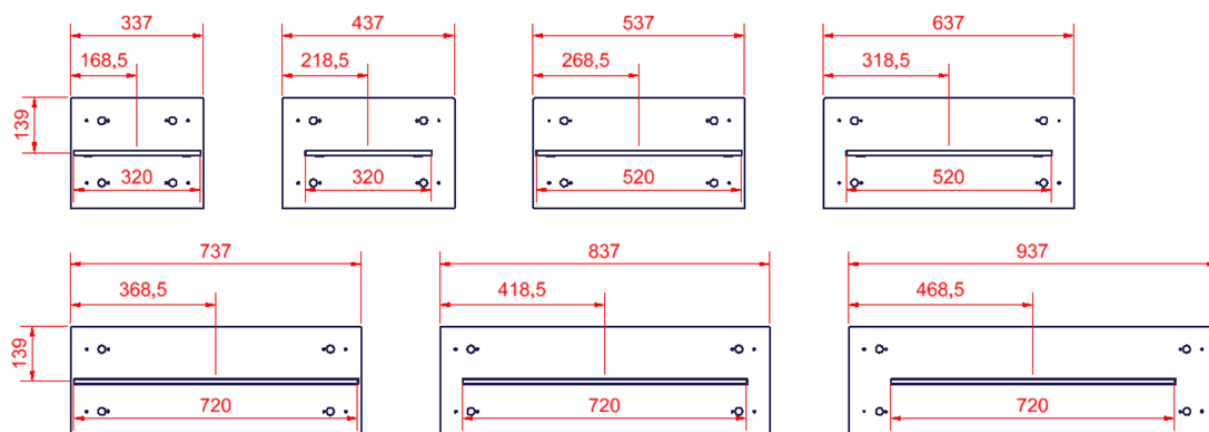


Tillbehör:
Extra LED-skenor för montering på överskåp.
Max. 3 m LED-skena/strömförsörjning.

30-42630-1




LED-skena L=320mm

30-42631-1

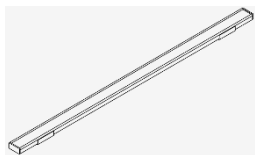


LED-skena L=520mm

30-42632-1

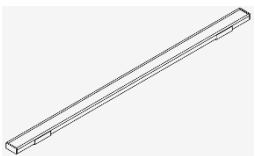

LED-skena L=720mm

30-42633-1

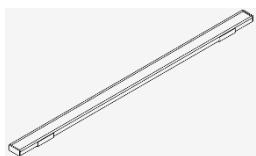

LED-skena L=1020mm

Reservdelar:

30-42627-1



Strömförsörjning

30-42628-1



Kontroller

30-42629-1



Styrning

30-42634-1



Kopplingsdosa


30-30002-1



230 V-kabel, Schuko

11. Kablar för LED-skenor.


Spiralkabel hane/hona är förberedd för montering av lampa.
Detaljerade instruktioner finns i den folder som medföljer med LED-skena.

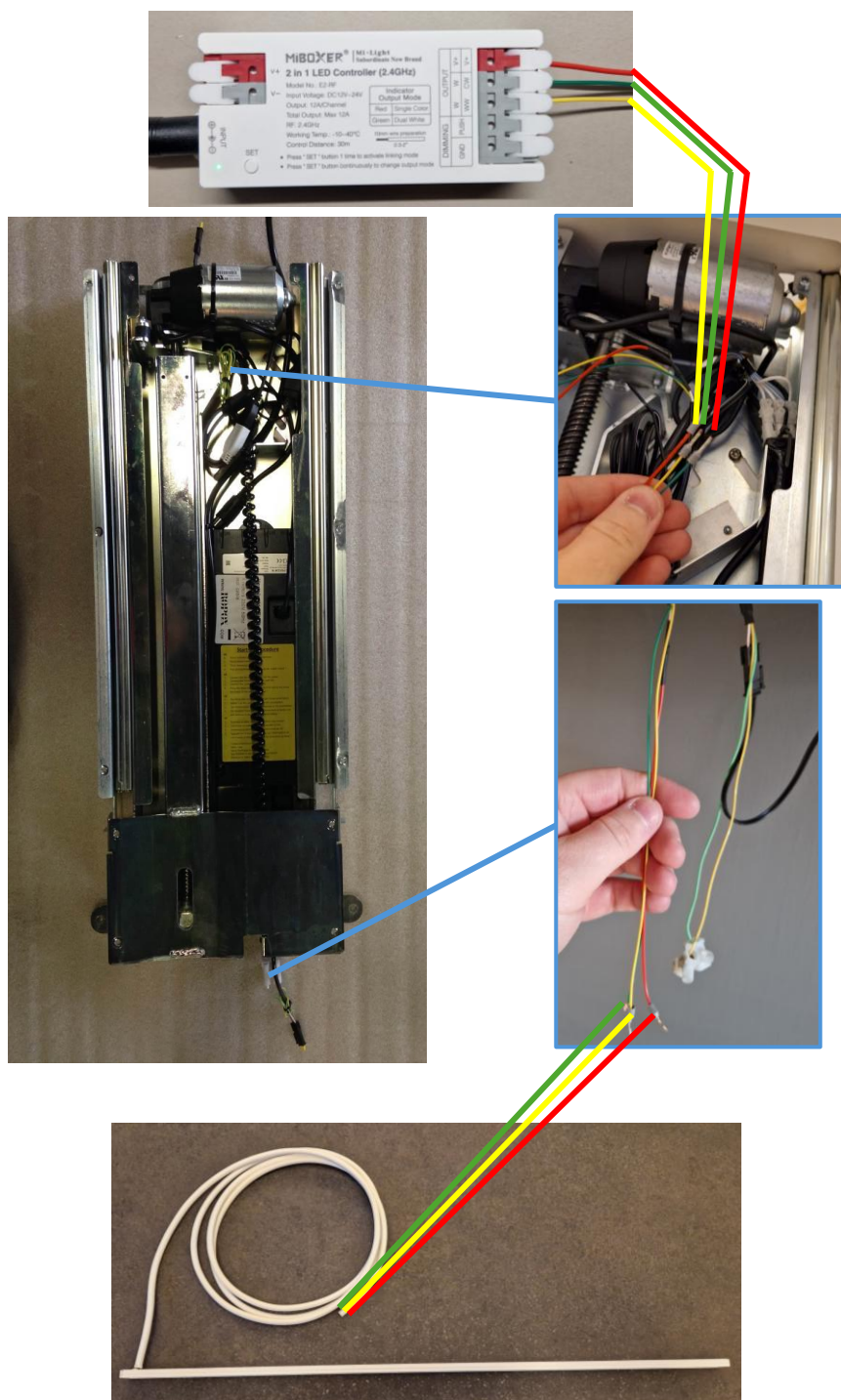


12. Säkerhet vid användning

- Verti-Inside får endast användas av personer som har läst och förstått denna bruksanvisning.
- Verti-Inside är en elektriskt justerbar ram. Även om säkerhetsstopp har monterats är det viktigt att se till att inga personer, djur eller föremål befinner sig under enheten under drift.
- Verti-Inside är en skåpmodul och får inte användas som lyftenhet eller personlyft.
- Använd alltid enheten på ett sätt som eliminerar risken för skador på personer eller egendom. Den som använder enheten är ansvarig för att undvika skador eller personskador.
- Barn och personer med nedsatt uppmärksamhetsförmåga bör endast använda enheten under uppsikt.
- Om produkten används på allmänt tillgängliga platser där barn eller personer med nedsatt observationsförmåga kan komma i närheten av den, måste den som använder enheten vara uppmärksam på de personer som befinner sig där för att förhindra farliga situationer.
- Se till att det finns fritt utrymme över och under enheten för att möjliggöra höjdjustering.
- Använd inte enheten om den är defekt eller skadad.
- Överbelasta inte enheten och se till att lastfördelningen är korrekt.
- Använd inte enheten i en explosiv miljö.
- I samband med inspektioner, service eller reparationer ska alltid enheten avlastas helt.
- Modifieringar, som kan påverka enhetens prestanda eller konstruktion, är inte tillåtna.
- Installation, service och reparationer måste utföras av behörig personal.
- Om enheten inte har monterats enligt dessa anvisningar kan reklamationsrätten upphöra att gälla.
- Använd endast Ropox originalreservdelar som utbytesdelar. Om andra reservdelar används kan reklamationsrätten upphöra att gälla.

Se till att inte klämmas mellan
hylla och skåpslucka vid
höjdjustering med stängd
skåpslucka

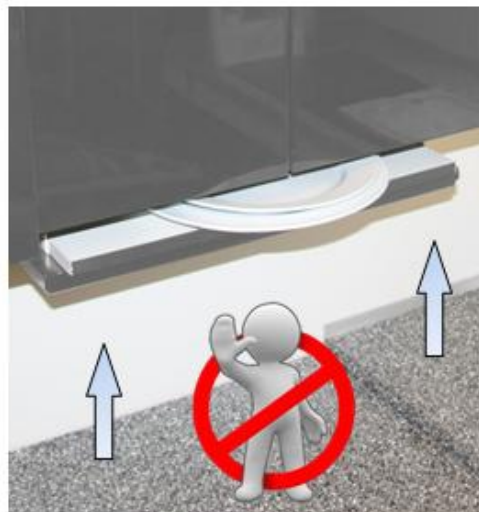

Se till att belastningen på enheten inte är ojämn. Lasten måste vara jämnt fördelad.

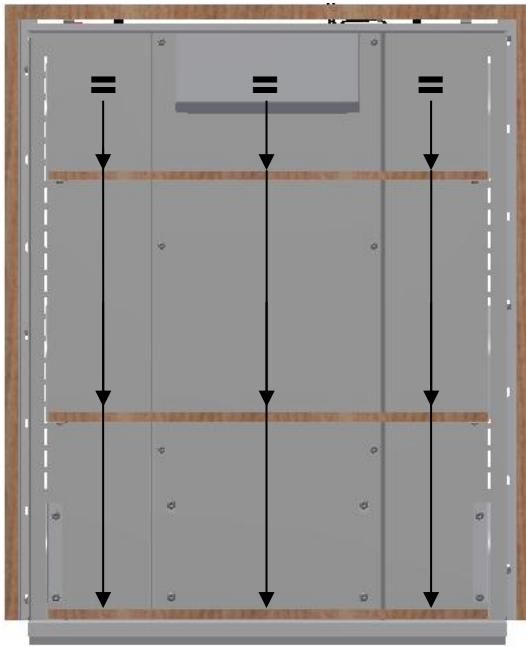

13. Rengöring/underhåll

13.1 Rengöring av ram



VARNING

Nätspänningen får INTE anslutas under rengöringen och elektriska komponenter får INTE spolas med vatten



Torka av ramen med en urvriden trasa med ljummet vatten och ett mildt rengöringsmedel.

Använd inga polerdukar eller slipmedel eller slipdukar, borstar eller svampar.

Torka ramen efter rengöring.

13.2 Underhåll

Inspektioner, service och reparationer måste utföras av behörig personal

Ramen är underhållsfri. Rörliga delar är livstidssmorda. Av säkerhets- och tillförlitlighetsskäl rekommenderar vi att ramen inspekteras en gång per år:

- Kontrollera att alla bultar är ordentligt åtdragna.
- Kontrollera att ramen rör sig fritt och utan problem från det nedre till det övre läget.
- **Återställning av ramen:** Tryck på UP-knappen och justera ramen till översta läget. Tryck en gång till på UP-knappen och håll den intryckt i 5 sek. för att återställa styrenheten. Kontrollera att rörelsen är smidig och jämn. Kontrollera att nätkabeln kan röra sig fritt.
- Kontrollera att alla kablar är korrekt monterade och oskadade.

Fyll i serviceschemat helt efter varje inspektion.

Använd endast Ropox originalreservdelar som utbytesdelar. Om andra reservdelar används kan reklamationsrätten upphöra att gälla.

13.3 Serviceschema, drift och underhåll

Service och underhåll Serienummer
Datum:
Underskrift:
Kommentarer:

Service och underhåll Serienummer
Datum:
Underskrift:
Kommentarer:

Service och underhåll Serienummer
Datum:
Underskrift:
Kommentarer:

Service och underhåll Serienummer
Datum:
Underskrift:
Kommentarer:

14. Felsökning

14.1 Ramen kan inte justeras i höjdled (justeringen är mycket svår)


1. Kontrollera att nätspänningen är ansluten till styrenheten och att strömmen är tillkopplad.
2. Kontrollera kablar och stickproppsanslutningar mellan styrenhet och motorer.
3. Kontrollera kabel- och stickkontaktarna mellan styrenhet och manöverdon.
4. Kontrollera att kablar för säkerhetsspärrar är anslutna till styrenhet och säkerhetsspärrar.
5. Kontrollera att säkerhetsstopp inte har aktiverats.

Återställningsprocedur

6. Om inget av ovanstående hjälper, återställ enheten:
 - Ta bort all vikt från Verti-Inside
 - Koppla bort motorkablarna
 - Koppla bort nätkabeln och vänta 5 sek.
 - Anslut nätkabeln
 - Anslut motorkabeln
 - Flytta enheten till översta positionen för återställning.

15. Etikett

Varje enhet har en egen etikett enligt illustrationen. Denna etikett innehåller viktig information som ska anges i samband med förfrågningar till leverantören. Den innehåller också information om vilken strömförsörjning som ska användas.

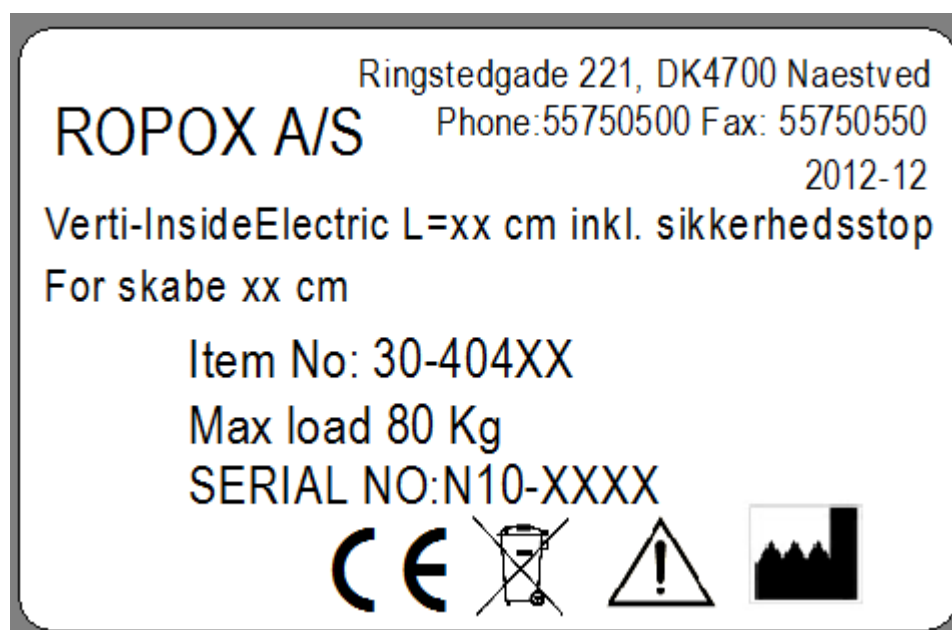

Symboler:



Denna bruksanvisning måste läsas före användning.



Avfall måste sorteras – om möjligt för återvinning



Ropox är tillverkare av produkten i fråga.



CE-märkning. Denna produkt uppfyller kraven för *allmän säkerhet och funktionalitet* i de gällande EU-direktiven och standarderna.



Placering av etikett

16. Klagomål

Se Allmänna försäljnings- och leveransvillkor på www.ropox.dk

Förvara alltid denna mapp tillsammans med produkten!

